

SICHERHEIT SCHON 10 TAGE NACH DER EMPFÄNGNIS



einfach + schnell + zuverlässig

Gebrauchsanleitung

Schwanger oder nicht? Diese Frage beantwortet VIOBELLA Schwangerschafts-Frühtest bereits 10 Tage nach einer möglichen Empfängnis – in nur wenigen Minuten.

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie den Test durchführen.

- 1. Öffnen Sie die Aluminiumhülle unmittelbar vor der Durchführung des Tests. Entnehmen Sie den Teststab.
- 2. Schieben Sie die Schutzkappe zurück.



- 3. Fassen Sie den Test am Griff an und halten Sie die Testspitze für einige Sekunden in den Urinstrahl. Alternativ können Sie den Urin auch in einem Becher auffangen und die Testspitze für etwa 5 Sekunden in den Urin tauchen.
- 4. Schieben Sie die Schutzkappe nun wieder vor und legen Sie den Test auf eine ebene Fläche.
- 5. Bei genauer Betrachtung sehen Sie nach einigen Sekunden die Feuchtigkeit im Testfenster entlang laufen.
- 6. Lesen Sie das Ergebnis nach 2-5 Minuten nach der Anwendung ab. Bitte beachten Sie, dass das Ergebnis spätestens nach 10 Minuten abgelesen werden sollte. Änderungen danach sind nicht gültig.

AbleSEN der Ergebnisse



Schwanger:
Zwei Linien erscheinen, eine Linie im kleinen Fenster und eine Linie im großen Fenster:
Sie können mit hoher Wahrscheinlichkeit (> 99 %) davon ausgehen schwanger zu sein. Ein positives Ergebnis wird mitunter schon nach einer Minute angezeigt.
Bitte beachten Sie: Beide Linien können unterschiedlich stark gefärbt sein. Dies ist normal! Sollten Sie bei der Auswertung nach 2-5 Minuten noch unsicher sein, lesen Sie den Test nach weiteren 5 Minuten nochmals ab. Häufig färbt sich die Linie im großen Fenster in dieser Zeit noch nach, so dass ein Auswerten des Tests einfacher wird. Lesen Sie bitte dazu Frage 6.

Nicht schwanger:
Eine Linie im kleinen Fenster erscheint: Sie können mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, nicht schwanger zu sein.

Ungültig:
Ist etwa 5 Minuten nach der Anwendung keine Linie sichtbar oder nur eine Linie im großen Fenster, so ist das Ergebnis ungültig.

FAQ – Häufig gestellte Fragen und Antworten

- 1. Wie zuverlässig ist VIOBELLA Schwangerschafts-Frühtest?**
Der VIOBELLA Schwangerschafts-Frühtest besitzt eine wissenschaftlich nachgewiesene Genauigkeit von über 99%.
- 2. Wie funktioniert VIOBELLA?**
Schon in der Frühphase der Schwangerschaft beginnt der Körper mit der Produktion des Schwangerschaftshormons hCG (humanes Chorion-Gonadotropin). Dieses Hormon wird auch über den Urin ausgeschieden und kann mit dem VIOBELLA Schwangerschafts-Frühtest ab einer Konzentration von 20 mIU/ml hCG im Urin nachgewiesen werden.
- 3. Wann kann ich VIOBELLA anwenden?**
Sie können VIOBELLA bereits ab dem 10. Tag nach der Empfängnis anwenden. Vor einer ausgebliebenen Monatsblutung empfehlen wir, den ersten Morgenurin zu verwenden, nach einer ausgebliebenen Monatsblutung kann jeder Urin verwendet werden.
- 4. Können Medikamente das Ergebnis beeinflussen?**
Im Allgemeinen hat die Einnahme von Medikamenten keinen Einfluss auf das Testergebnis. Ausnahmen sind lediglich Arzneimittel, die hCG enthalten. Sie können das Ergebnis beeinflussen.
- 5. Wie sicher ist VIOBELLA?**
Die Zuverlässigkeit von VIOBELLA Schwangerschafts-Frühtest ist besonders hoch. Dennoch kann in seltenen Fällen das Ergebnis nicht eindeutig sein.
- 6. Was mache ich, wenn ich mir bei dem Ergebnis nicht sicher bin?**
Sollte die zweite Linie im großen Fenster z.B. besonders schwach sichtbar sein, dann führen Sie bitte nach 3 Tagen einen neuen Test durch und verwenden Sie dabei Morgenurin. Wenn Sie schwanger sind, dann werden 2 deutlich sichtbare Linien erscheinen.
- 7. Der Test sagt, ich bin nicht schwanger, aber meine Periode ist überfällig. Was soll ich tun?**
Wenn das Testergebnis nicht schwanger lautet und Sie Ihre Periode dennoch nicht bekommen, empfehlen wir nach 3 Tagen einen weiteren Test durchzuführen. Fällt auch dieser Test negativ aus und Ihre Periode bleibt weiterhin aus, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.
- 8. Der Test sagt, ich bin schwanger, was soll ich tun?**
Bei einem positiven Testergebnis setzen Sie sich bitte gleich mit Ihrem Arzt in Verbindung. Er wird Sie über wichtige Hinweise und Ratschläge für einen optimalen Verlauf der Schwangerschaft informieren.

Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns an, Tel. +49-9342-918483, Schäfer Pharma GmbH.

Technische Daten

Produktname:	VIOBELLA Schwangerschafts-Frühtest
Wirksame Bestandteile:	Monoklonale Antikörper gegen hCG
Untersuchungsmaterial:	Frischer menschlicher Urin, keine Vorbehandlung, keine Aufbewahrung
Verwendungszweck:	In-vitro Diagnostikum zur Eigenanwendung zum Nachweis von hCG im menschlichen Urin
Leistungsmerkmale:	Untere Nachweisgrenze: 20 mIU hCG/ml Messbereich: 20 mIU hCG/ml – 600 IU hCG/ml Diagnostische Sensitivität >99% Diagnostische Spezifität >99%
Aufbewahrung:	In Originalverpackung bei Raumtemperatur (+2° bis +30°C) Nach Öffnen des Verpackungsbeutels sollte der Test sofort durchgeführt werden.
Testprinzip:	Der auf den Test aufgebrachte Urin wird durch Kapillarkräfte in den Test aufgesogen. Bei der Anwesenheit von hCG im Urin kommt es zu einer immunologischen Reaktion zwischen dem hCG und den im Test befindlichen Antikörpern unter Ausbildung einer roten Linie (Ergebnislinie). Andere Antikörper bilden die Kontrolllinie, die die ordnungsgemäße Funktion des Tests anzeigt. Die Methode wird als Immunchromatographie bezeichnet.
Stand:	Rev.3/2014-03/SvM

Hinweise

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
- Test nicht einnehmen!
- Test nicht benutzen, wenn der Verpackungsbeutel beschädigt ist!
- Test nicht nach Ablauf der Haltbarkeit benutzen!
- Benutzte Tests mit Hausabfall entsorgen!
- Zusätzlich benötigte Materialien: Eine Uhr und ggf. ein sauberer und trockener Becher zum Sammeln des Urins.
- Bei einigen eingesetzten Materialien (z.B. Antikörper) handelt es sich um potentiell infektiöse Materialien, von denen jedoch keine Gefahr ausgeht, wenn der Test gemäß der Gebrauchsanweisung verwendet wird.



Hersteller:
nal von minden GmbH
Carl-Zeiss-Str. 12
D-47445 Moers

Vertrieb:
Schäfer Pharma GmbH
Geiselbrunnweg 15a
D-97877 Wertheim

HAMİLE KALMANIZIN 10. GÜNÜNDEN İTİBAREN GÜVENCE



kolay + çabuk + güvenli

viobella
G e b e l i k T e s t i

Kullanma kılavuzu

Hamile ya da değil? Bu sorunun cevabını hamile kaldığınızdan 10 gün içinde VIOBELLA Gebelik Testiyle birkaç dakika içinde alabilirsiniz.

Testi uygulamadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun.

1. Alüminyum ambalajı, testi uygulamadan hemen önce açın. Test çubuğunu çıkartın.
2. Koruyucu kapağı çekerek açın.



3. Test çubuğunu sapından tutun ve ucunu birkaç saniye idrarın içine sokun. Alternatif olarak idrarınızı bir kaba koyup test ucunu yaklaşık 5 saniye boyunca içine sokabilirsiniz.
4. Koruyucu kapağı tekrar kapayın ve düz bir yüzeye koyun.
5. Birkaç saniye sonra dikkatle baktığınızda test penceresinde sıvının ilerlediğini göreceksiniz.
6. Kullanımınızın bitiminden 2-5 dakika içerisinde neticeyi okuyabilirsiniz. Testin neticesinin 10 dakika sonra alınması gerektiğini lütfen göz önünde bulundurun. Daha sonra ortaya çıkabilecek değişiklikler, geçersizdir.

Test neticesinin değerlendirilmesi



hamile



hamile değil



geçersiz

Hamile:

Bir çizgi küçük diğeriye büyük pencerede olmak üzere iki çizgi oluşur: Yüksek bir olasılıkla hamile olduğunuzu sayabilirsiniz (>% 99). Pozitif netice birkaç dakika içinde oluşacaktır.

Lütfen dikkat edin: Çizgilerin renkleri farklı tonda olabilir. Bu normaldir! Değerlendirmeden 2-5 dakika sonra hala emin değilseniz; 5 dakika daha bekleyip testi tekrar değerlendirin. Büyük pencerenin içindeki çizgi, rengini genelde daha sonra değiştirir, böylelikle değerlendirmeniz de daha kolay olur. Buna ek olarak lütfen 6. soruyu okuyun.

Hamile değil:

Küçük pencerede bir çizgi oluşur: Yüksek bir olasılıkla hamile olmadığınızı sayabilirsiniz.

Geçersiz:

Kullanımdan 5 dakika sonra hala çizgi oluşmadıysa ya da sadece büyük pencerede bir çizgi oluştuysa, netice geçersiz demektir.

FAQ – En çok sorulan sorular ve cevapları

1. VIOBELLA Gebelik Testi ne kadar güvencelidir?

VIOBELLA Gebelik Testi bilimsel olarak kanıtlanmış % 99 kesinlik gösterir.

2. VIOBELLA nasıl çalışır?

Vücut gebeliğin ilk devrelerinde hCG (human Chorionic Gonadotropin) hormonunu üretmeye başlar. Bu hormon idrar yoluyla atılır ve VIOBELLA Gebelik Testiyle idrarda 20 mIU/ml hCG konsantrasyonu ile tespit edilir.

3. VIOBELLA'yı ne zaman kullanabilirim?

VIOBELLA'yı hamile kalmanızın ilk 10 günü içinde kullanabilirsiniz. Periyodunuzun başlama zamanında önce, sabahları ilk idrarınızı kullanmanızı; periyodunuzun başlama zamanından sonra ise herhangi bir zamanda aldığınız idrarı kullanmanızı öneririz.

4. İlaçlar neticeyi etkileyebilir mi?

Genelde ilaçlar neticeyi etkilemez. Yalnız hCG içeren ilaçlar neticeyi yanlış etkileyebilir.

5. VIOBELLA'ya ne kadar güvenilir?

VIOBELLA Gebelik Testine güvenilirlik son derece yüksektir. Ancak bazı seyrek durumlarda netice tam açık olmayabilir.

6. Neticeden tam olarak emin değilsem ne yapmalıyım?

Mesela büyük penceredeki çizgi silikse, 3 gün sonra tekrar bir test uygulayın ve sabah idrarı kullanın. Hamileyseniz, iki belirli çizgi oluşacaktır.

7. Test hamile neticesi veriyor ama periyodum gelmiyorsa ne yapmalıyım?

Test neticesi hamile değil neticesi veriyor ama periyodunuz gelmiyorsa, 3 gün sonra tekrar bir

test yapmanızı öneririz. Bu test neticesi de negatif çıkıyor ve periyodunuz hala başlamıyorsa lütfen doktorunuza başvurun.

8. Test hamile neticesi veriyorsa ne yapmalıyım?

Test neticesi pozitifse, doktorunuza hemen başvurun. Doktorunuz size hamileliğinizin optimal geçmesi için gerekli bilgi ve tavsiyesi verecektir.

Ek sorularınız için
Tel. +49-9342-918483
Schäfer Pharma GmbH'yi arayın.

Tekniki Veriler

Ürün adı:	VIOBELLA Gebelik Testi
Etkili öğeler:	monoklonal karşıt cisimli hCG hormonuna karşı
Muayene malzemeleri:	taze insan idrarı, ön işlemsiz, saklanmamalı
Uygulama amacı:	İdrardaki hCG hormonunun tespit edebilmesi için kendiniz in-vitro uygulama tanısı.
Etkinlik belirtileri:	En alçak tespit sınırı: 20 mIU hCG/ml Ölçüm: 20 mIU hCG/ml - 600 IU hCG/ml diagnostik duyarlılık >% 99 diagnostik spesifite >% 99
Muhafaza:	Orijinal paket oda sıcaklığında (+2° bila +30°C arası) paket açıldıktan sonra hemen uygulanmalı.
Testin prensibi:	Teste kullanılan idrar kapiler kuvvetle testin içine çekilir. İdrarda hCG hormonu bulunursa, kırmızı çizgi (test çizgisi) altında testteki antikorun ve hCG hormonuna karşı immunolojik reaksiyon oluşur. Diğer antikorlar kontrol çizgisini oluşturup; testin doğru çalıştığını gösterir. Bu metod imunkromatografi olarak da tanımlanır.
Tarih:	Rev.3/2014-03/SvM

Dikkat

- Çocuklardan uzak saklanmalıdır!
- Testi yutmayınız!
- Testi koruyucu paket hasar görmüşse kullanmayın!
- Testi son kullanma tarihi bittikten sonra kullanmayın!
- Kullanılmış testi çöpe atarak atın!
- Gerekli olabilecek eşyalar: Bir saat ve icabında idrarı iöine koyabileceğiniz kuru ve temiz bir bardak.
- Bazı takılı maddeler (antikör gibi) olası enfektöz madde olup; test kullanım kılavuzuna göre uygulandığında bir tehlike taşımaz.



Üretici:
nal von minden GmbH
Carl-Zeiss-Str. 12
D-47445 Moers

Pazarlama:
Schäfer Pharma GmbH
Geiselbrunnweg 15a
D-97877 Wertheim