

Stoma-Irrigation mit Iryflex®

Irrigation



Gürtel	VE	PZN	REF
Zur Fixierung der Basisplatte auf der Haut	1	0433331	5028DE



Softima® Active Mini	VE	PZN	REF
Mini Beutel Beige			
≥ 15 - 45 mm	30	9061747	4610215DE

Softima® Active Mini




Stoma-Irrigation mit Iryflex®



Das Iryflex® Irrigationsset enthält alle zur Stoma-Irrigation benötigten Mittel.

Bitte legen Sie vor Beginn alles in Reichweite bereit.

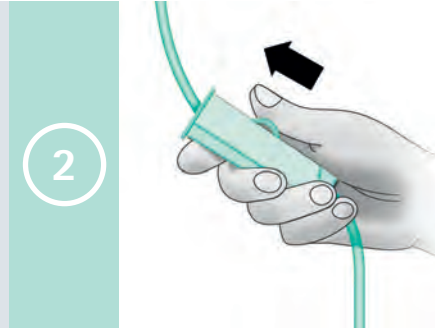

Bitte schließen Sie die Rollklemme, bevor Sie den Wasserbehälter füllen.



Achten Sie beim Befüllen des Wasserbehälters auf die richtige Temperatur. Nutzen Sie hierzu den integrierten Temperatur-Indikator. Die Temperatur sollte zwischen 36 und 38 Grad °C liegen.




Schließen Sie den gefüllten Wasserbehälter und hängen Sie ihn dann etwa auf Schulterhöhe.



Verbinden Sie nun den Konus mit dem Schlauchsystem.


Entlüften Sie danach das Schlauchsystem durch vorsichtiges Öffnen der Rollklemme.

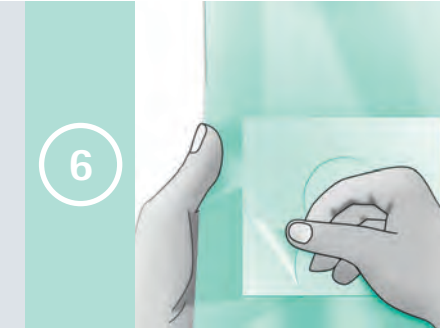

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Schlauchbeutel und platzieren Sie diesen auf die beiliegende Basisplatte.



Fixieren Sie die Basisplatte nun mit dem Gürtel, so dass die Basisplatte Ihr Stoma umschließt.

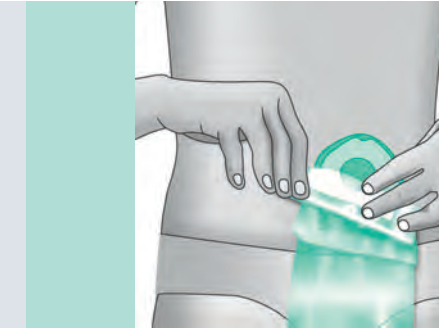

Wenn Sie das Softima® Key System benutzen, können Sie den Schlauchbeutel auch direkt auf Ihre Basisplatte aufbringen. Aufgrund des hautfreundlichen Klebstoffes ist der Schlauchbeutel auch direkt auf der Haut verwendbar.




Halten Sie das Ende des Schlauchbeutels in die Toilette. Sollte dieser zu lang sein, können Sie ihn entsprechend der benötigten Länge einrollen.



Stecken Sie den Konus durch die obere Öffnung des Schlauchbeutels und führen Sie dann den Konus vorsichtig in Ihr Stoma ein.



Öffnen Sie langsam die Rollklemme und lassen Sie das Wasser einlaufen. Der Spülvorgang sollte in zwei Stufen durchgeführt werden. 1. Stufe: 150 – 200 ml Wasser, um den Stuhl aufzuweichen. 2. Stufe: 15 – 18 ml Wasser je kg Körpergewicht.

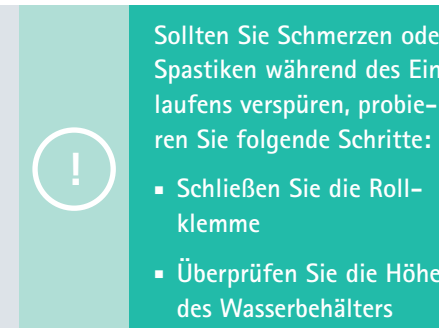

Sollten Sie Schmerzen oder Spastiken während des Einlaufens verspüren, probieren Sie folgende Schritte:

- Schließen Sie die Rollklemme
- Überprüfen Sie die Höhe des Wasserbehälters
- Überprüfen Sie nochmals die Wassertemperatur

Zu kaltes Wasser und ein zu hoher Flussdruck können zu spastischen Schmerzen führen.




Wenn das Wasser eingelaufen ist, entleeren Sie das verbliebene Wasser in den Schlauchbeutel.



Schließen Sie den Schlauchbeutel mittels der integrierten Klammer und warten Sie nun, bis sich der Darm komplett entleert hat. Öffnen Sie danach den Schlauchbeutel wieder und entleeren Sie diesen in die Toilette.



Wenn die Irrigation beendet ist, entfernen Sie den Schlauchbeutel wieder. Dieser kann dann über den Hausmüll entsorgt werden.

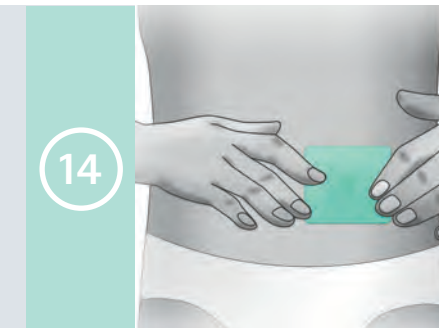

Versorgen Sie nun Ihr Stoma entweder mit Ihrer gewohnten Versorgung oder mit einem Minibeutel oder einer Stomakappe.