

Product Description: **ALLEVYN Gentle IFU (German Specific)**

Component: **249 x 90mm**
Dimensions: **(Double sided)**

Product Code: **66802135 / 66802136 / Colours: 66802137 / 66802138 / 66802139**



Artwork Ref/BSC: **34158 / 10601822**

Black

Prev Artwork Ref/BSC: **26956 / 10601569 / 18110391**

Date: **23 Aug 2023**

Revision: **08 - FINAL** Created by: **LB**

ALLEVYN^o GENTLE



ALLEVYN^o GENTLE

Haftender hydrozellulärer Schaumverband mit Silikon-Beschichtung

Beschreibung

Die ALLEVYN GENTLE Verbände sind haftende Schaumverbände mit Silikon-Beschichtung. Die Verbände bestehen aus einer perforierten Wundkontaktschicht aus Silikon, einem saugfähigen hydrozellulären Schaumkissen und einer atmungsaktiven Außenfolie.

Wirkungsweise

ALLEVYN GENTLE Verbände haben eine perforierte Wundkontaktschicht aus Silikon, durch die Exsudat in die Schaumschicht eindringen kann. Die sanfte Silikonhaftschiicht ist für den Einsatz auf zarter und empfindlicher Haut geeignet und erleichtert das Anlegen, erneute Platzieren während der Anwendung und das Entfernen. Die hydrozelluläre Schaumstoffschicht absorbiert Exsudat von der Wunde weg. Die atmungsaktive Außenfolie ermöglicht Verdunstung und hilft, eine bakterielle Kontamination der Wunde zu verhindern. Der dreischichtige Aufbau ermöglicht eine hohe Flüssigkeitsaufnahme und -abgabe und fördert ein feuchtes Wundheilungsmilieu, das für die Heilung optimal ist.

Indikationen

Sekundäres Wundheilungsmanagement bei oberflächlichen, granulierenden Wunden, chronischen und akuten exsudierenden Wunden, mehr oder weniger tiefen Wunden. Dazu gehören:

- Beingeschwüre
- Diabetische Fußgeschwüre

Smith+Nephew

- Operationswunden
 - Verbrennungen ersten und zweiten Grades
 - Entnahmestellen zur Hauttransplantation
 - Hautrisse
 - Druckgeschwüre
- Vorsichtsmaßnahmen**
- Nicht mit Oxidationsmitteln wie Hypochloritlösungen (z. B. EUSOL) oder Wasserstoffperoxid verwenden, da diese die Saugfähigkeit des Verbands verringern können.
 - Wenn Hautrötungen oder Zeichen einer Sensibilisierung auftreten, die Anwendung einstellen und medizinisches Fachpersonal konsultieren.
 - Nur zum Einmalgebrauch, bei Wiederverwendung kann eine Kreuzkontamination oder Infektion auftreten und der Verband kann unwirksam sein.
 - Nach dem Öffnen des Beutels keine unbenutzten Verbände für die Anwendung zu einem späteren Zeitpunkt aufbewahren.
 - Bei Verwendung auf infizierten Wunden sollte die Infektion gemäß den lokalen Protokollen untersucht und behandelt werden.
- Verbände sind zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal oder durch Patienten unter Anleitung von medizinischem Fachpersonal bestimmt.
- Wie in dieser Packungsbeilage beschrieben, sollte medizinisches Fachpersonal die Patienten bei Bedarf angemessen darüber beraten, wie der Verband angelegt, überwacht, entfernt und entsorgt wird und wann medizinisches Fachpersonal zu kontaktieren ist.

Gebrauchsanweisung


1. Die Applikationsstelle reinigen. Darauf achten, dass die umliegende Haut sauber, trocken und nicht zu stark behaart ist.
2. Geeignete Verbandgröße auswählen. Kann zur Anpassung an schwierige Bereiche zugeschnitten werden – Verband immer mit sauberer Technik zuschneiden. Das Zuschneiden des Verbands beeinträchtigt die Bakterienbarriere. Sicherstellen, dass alle exponierten Schaumbereiche mit einem geeigneten Folienverband bedeckt sind, wobei darauf zu achten ist, dass nicht der gesamte Verband bedeckt wird. Darauf achten, dass der Verband den gesamten zu schützenden Wundbereich abdeckt.
3. Erste Schutzfolie abziehen und die Haftseite des Verbands unter sauberer Technik auf der Haut anlegen.
4. Die verbleibende(n) Schutzfolie(n) unter sauberer Technik entfernen.
5. Glatt streichen. Darauf achten, dass der Verband die Wunde abdeckt. Den Verband nicht dehnen. Bei Bedarf kann der Verband neu platziert werden.
6. Zusätzlich mit einem Sekundärverband befestigen, z. B. OPSITE^o FLEXIFIX Verband, OPSITE^o FLEXIFIX GENTLE Verband, Tape, einem Schutzverband oder mit einem Produkt für die Kompressionstherapie.

Kann bei nekrotischen oder schorfigen Wunden zusammen mit INTRASITE^o GEL verwendet werden.

Entfernung: Eine Ecke anheben und bis zur vollständigen Entfernung langsam abziehen. ALLEVYN GENTLE Verbände gemäß den örtlichen klinischen Protokollen entsorgen oder hygienisch wegwerfen.

Häufigkeit des Verbandwechsels

Während der frühen Stadien der Behandlung den Verband häufig kontrollieren. Verbände können bis zu 7 Tage lang angelegt bleiben. Verbände sollten je nach Zustand der Wunde und der umliegenden Haut gewechselt werden oder wenn sich das Exsudat 1,5 cm vom Verbandsrand befindet. Das nachstehende Diagramm dient nur als Orientierungshilfe. Die Entscheidung zum Verbandwechsel sollte anhand der klinischen Beurteilung und der lokalen Protokolle unter Anleitung von medizinischem Fachpersonal erfolgen.

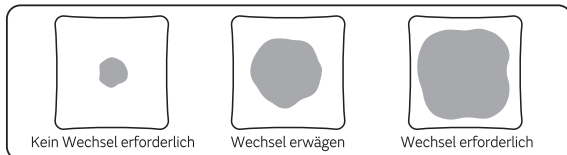

Die Skala* auf dem Beutel dient nur als Orientierungshilfe, und es muss sorgfältig auf die Vermeidung einer Kreuzkontamination geachtet werden.

Wenn Sie glauben, dass während der Verwendung dieses Produkts ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies bitte dem Hersteller und Ihrer zuständigen Behörde. Complaints@Smith+Nephew.com

ALLEVYN^o GENTLE



Smith+Nephew

Produktverfügbarkeit

Artikelnummer	Größe	Verfügbarkeit
66802135	5 cm x 5 cm	Karton mit 5 Stück
66802136	10 cm x 10 cm	Karton mit 5 Stück
66802137	10 cm x 20 cm	Karton mit 5 Stück
66802138	15 cm x 15 cm	Karton mit 5 Stück
66802139	20 cm x 20 cm	Karton mit 5 Stück

*Nur bei manchen Größen

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hesse Road, Hull HU3 2BN England
 *Marken von Smith+Nephew. ©Smith+Nephew 2023
 Ausgabedatum 07/2023. Änderung 01. www.smith-nephew.com
 Dieses Produkt unterliegt eventuell einem oder mehreren US-Patenten
 www.smith-nephew.com/patents

Smith & Nephew Operations B.V. Bloemlaan 2, 2132 NP Hoofddorp, Netherlands



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden

Grüner Punkt

10601822 34158