



Produktinformation

Anwendungsbereich von AgniGel®

- Brandwunden
- Trophische ulzerierende Wunden
- Fieberbläschen
- Feuchtigkeit assoziierte Hautdefekte
- Strahlenverbrennungen

Was ist AgniGel®?

AgniGel ist eine Art Hydrogel, das für die Brandwunden- und Wundversorgung entwickelt wurde. AgniGel, gewonnen aus Meeresalginaten, ist eine Mischung aus natürlichen und künstlichen Polymeren, welche durch Elektronenbindungen miteinander verbunden sind. Die Darreichungsform ist eine 3mm dicke Gelplatte.

Eigenschaften von AgniGel®

- fördert den Epithelisationsprozess und die Geschwindigkeit der Erneuerung der Haut
- ist luftdurchlässig und bakterienundurchlässig, minimiert das Infektionsrisiko
- absorbiert Wundexudate
- entfernt Wundexudate, Blutkoagel und Nekrosen zusammen mit dem Verband
- **Wundkontrolle ist ohne Verbandswechsel möglich**

AgniGel unterstützt den Patienten außerdem durch einen kontinuierlichen Kühleffekt. Es hält die Feuchtigkeit, verklebt nicht mit der Wunde und beugt Schmerzen beim Verbandwechsel vor.

Es lindert lokale Schmerzen und unterstützt den Heilungsprozess. Es ist komplett farblos, beugt Verkrustungen und übermäßiger Exsudation vor und fördert die Hautneubildung. Es ist nicht giftig und nicht allergen. Flexibel und beständig gegen mechanische Einwirkung.

Anwendungshinweise:

Verbrennungen 1. und 2. Grades:

Brandwunden sollten sofort mit AgniGel versorgt werden. AgniGel hält die Wunde kühl, lindert Schmerzen und schützt die Wunde vor Infektionen. Die Komresse kann für maximal 24 h in krustigen infizierten Wunden und tiefen Wunden mit nekrotischem Gewebe verbleiben.

Trophisch ulzerierende Wunden:

Die Anwendung von AgniGel zum Behandlungsbeginn reduziert lokale Schmerzen. Es hilft die Wunde zu reinigen und entfernt nekrotisches Gewebe vom Wundgrund. AgniGel beschleunigt den Regenerationsprozess des Gewebes. Im Fall von intensiver Wundexudation wird AgniGel in Kombination mit antiseptischen Präparaten eingesetzt.

Dekubitus:

Kleine Dekubiti benötigen ca. 1-2 Wochen für die Heilung. AgniGel sollte zusammen mit der chirurgischen Intervention bei ausgeprägten Dekubiti angewendet werden.

Hauttransplantation:

Sowohl auf der Seite des Hautspenders als auch des Empfängers beschleunigt AgniGel die Epidermisneubildung und reduziert das Risiko einer Kontamination.

Anwendung:

AgniGel ist ein 3mm dickes, steriles Einmalprodukt und in verschiedenen Größen erhältlich. Achten Sie auf Beschädigungen der Verpackung. Öffnen Sie die Sterilverpackung und entnehmen Sie AgniGel an der Entnahmelasche des Produktes. Bringen Sie AgniGel auf den Wundgrund auf und verschließen Sie die Wunde mit dem beigegefügt Stretchverband. Bitte achten Sie auf die Größe des Gelpads, diese sollte mit der Größe des Wundgrundes übereinstimmen und die Ränder sollten Kontakt mit gesundem Gewebe haben. AgniGel ist sofort nach Entnahme anzuwenden.

Verbandswechsel:

Die Dauer der Anwendung von AgniGel hängt vom Wundtyp und dem Stadium der Behandlung ab. Eine Kontrolle sollte nach 12 Stunden erfolgen, was durch die transparente Konsistenz ohne Padwechsel möglich ist.

Sollte das Pad mit Wundexudaten, etc. vollgesogen sein, so tauschen Sie es früher aus. (Die maximale Absorptionsfähigkeit bei einem 10x 10cm Pad beträgt 25-30 ml) Das Gelpad kann für maximal 48h in der Wunde verbleiben. Der Verband trocknet schneller, wenn sich der Patient in einer sehr trockenen und heißen Umgebung befindet, dies gilt es zu vermeiden. Der Verband sollte durch Kompressen mit sterilem Aqua injectabilia oder isotonischer Kochsalzlösung feucht gehalten werden.

Am Ende der Anwendung dehnt sich das Produkt ein wenig aus und wird elastischer. Der Verband kann, wenn nötig mit einem angefeuchteten Tuch 2 bis 4-mal abgedeckt werden.

Wundnachsorge:

Durch das transparent gestaltete Gelpad erkennen Sie schnell unerwartete Veränderungen in der Wundfläche und den Zeitpunkt für einen Padwechsel.

Haltbarkeit und Lagerung:

Das Produkt sollte vor Sonne und Hitze geschützt werden und kann in der Originalverpackung bei Zimmertemperatur gelagert werden. Die Haltbarkeit beträgt 2 Jahre ab Produktionsdatum.

Import und Vertrieb Deutschland:



Minocom Medizinprodukte UG (haftungsbeschränkt)
Ringstr. 19
41515 Grevenbroich
Tel: 02181-247000 Fax: 02181-247019
Email: info@agnigel.de Internet: www.agnigel.de

Hersteller:



Export-Import Co.
Cali Sanayi Bölgesi
Eflatun Cadde No: 18
Cali/Bursa TÜRKİYE

AgniGel ist registrierte Handelsmarke von Total Export-Import Co. und hergestellt in Bursa.