

L MESITRAN SOFT

L-MESITRAN Soft Wundgel

PZN: 02171450

Inhalt: 15 g

Hersteller: Mediq Deutschland GmbH

Zweckbestimmung

L-Mesitran Soft ist ein Wundgel, das folgende Bestandteile enthält: medizinischer Honig, medizinisches hypoallergenes Lanolin (Medilan®), Propylen Glycol, PEG 4000 und Vitamine C & E. Geeignet für chronische Wunden, Dekubitus (Phase I-IV), Venöse Stauungsgeschwüre, vegetierende Wunden (zur Geruchsbeseitigung und / oder Debridement), kolonisierte akute Wunden, Operationswunden, postoperative Wunden, traumatische Wunden (oberflächliche Schürfwunden, Schnitte), Verbrennungen ersten und zweiten Grades; auch durch Laserbehandlung. L-Mesitran ist präventiv antibakteriell einsetzbar, reduziert aber auch die Entzündungsreaktion, Schwellungen und Schmerzen. Reinigt die Wunde und sorgt für eine schnelle Regeneration des Gewebes und verringert die Gefahr der Entwicklung von Narbengewebe. Wenn das Wundgel in Kontakt mit der Wunde kommt, wird durch Osmose Flüssigkeit aus dem umgebenden Gewebe gezogen. L-Mesitran Wundgel schafft ideale Bedingungen für eine feuchte Wundheilung. Autolyse und Epithelisierung werden unterstützt. Der Heilungsprozess wird so gefördert. Aufgrund der starken osmotischen Aktivität hat L-Mesitran Wundgel antimikrobielle Eigenschaften. Das Wundgel verdünnt sich allmählich und kann durch lokale Wundreinigung leicht entfernt werden. L-Mesitran Soft Wundgel ist eine primäre Wundaufgabe, die von den meisten gängigen sekundären Wundaufgaben abgedeckt werden kann. Die Eigenschaften des Wundgels helfen auch zu verhindern, dass der Sekundärverband am Wundherd verklebt. Durch die Verwendung von natürlichen Inhaltsstoffen, kann jede Charge des Wundgels in der Farbe (weiß - gelb -braun) variieren. Das Wundgel kann Zuckerkrystalle enthalten, jedoch wird die Wirksamkeit oder die Anwendung dadurch nicht beeinträchtigt. Dünn oder auch in Wundfüllmenge auftragen und mit einem Wundverband oder Pflaster abdecken.

Zusammensetzung

Wundgel mit medizinischem Honig