

MyoTrain®

Bandage zur Behandlung von Muskelverletzungen des Oberschenkels.



Indikationen	Merkmale	Wirkweise
<ul style="list-style-type: none"> • Muskelverletzungen am Oberschenkel (insbesondere Muskelverhärtungen, Muskelzerrungen, Muskelfaserrisse, Muskelrisse) • Vorsorge bei Wiederholungsverletzungen • Muskelprellungen (Pferdekuss) des Oberschenkels • Unterstützung in der Nachbehandlung von Muskelverletzungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Anatomisches Formgestrick, silikonierter Hafttrand und druckreduzierter Randbereich sorgen für eine optimale Passform und hervorragenden Tragekomfort. • Die beiden Pelotten (Akut- und Funktionspelotte) sind frei einsetzbar; die MyoTrain® kann auch ohne Pelotten getragen werden. • Das Klettgurtsystem ermöglicht ein leichtes An- und Ablegen und gewährleistet eine individuelle Kompression. • Das anatomische Formgestrick wirkt auch ohne Gurte propriozeptorisch. 	<ul style="list-style-type: none"> • MyoTrain® wirkt nach den Prinzipien eines so genannten Muskelaufhängeverbandes (Tapeverband) mit Kompression. • Unmittelbar nach der Verletzung kann die zusätzlich eingelegte kleinere Akutpelotte die verletzte Stelle gezielt komprimieren, um die Blutung zu stoppen und die Ausbreitung des Hämatoms einzugrenzen. • Die größere Funktionspelotte komprimiert die Umgebung der Verletzungsstelle, um die dort regelmäßig entstehende ödematöse Schwellung zu minimieren. • Längsrillen in der Oberflächenstruktur der Funktionspelotte fördern den Lymphabfluss. • MyoTrain® reguliert den Muskeltonus und beugt Rezidivverletzungen vor.



optional einsetzbar:
Funktionspelotte und
kleine Akutpelotte