

## Proxid Enzyme:

### PZN: 4653503 10 Tabletten

#### Beschreibung:

Jede Tablette enthält Subtilisin A als aktiven Bestandteil.

#### Wirkung:

Auf Ihren Kontaktlinsen entwickelt sich nach längerem Tragen ein Oberflächenfilm, der sich aus Protein und anderen Substanzen der Tränenflüssigkeit zusammensetzen. Dieser Reiniger enthält Enzyme, die Proteine und andere Ablagerungen abbauen und deren Entfernung ermöglichen.

#### Anwendung:

Eignet sich zur wöchentlichen Reinigung, aller weichen Kontaktlinsen.

#### Allgemeine Hinweise:

- Anwender, die gegen einen der Inhaltsstoffe des Enzymatischen Reinigers allergisch sind, sollten dieses Produkt nicht verwenden.
- Waschen und spülen Sie ihre Hände vor jedem Berühren der Kontaktlinsen.
- Pflegen Sie immer die selbe Linse (rechts oder links) zuerst, damit Sie diese nicht vertauschen.
- Wenn Sie einen neuen Linsenbehälter benutzen, spülen Sie diesen vor dem Gebrauch mit einer desinfizierenden Wasserperoxidlösung (Proxid 1) aus.
- Leeren Sie den Linsenbehälter nach jedem Gebrauch aus, spülen Sie ihn mit der gleichen Lösung, die Sie zum Auflösen der Enzymtablette verwenden aus. Lassen Sie den Behälter an der Luft trocknen.

#### Pflegeanleitung:

- Nehmen Sie ihre Kontaktlinsen nacheinander aus dem Auge und legen diese in das entsprechende Körbchen des Linsenbehälters.
- Füllen Sie ihren Linsenbehälter mit (Proxid 1), halten Sie sich genau an die Gebrauchsanleitung.
- Geben Sie je eine Tablette in das Linsenkorbchen, warten Sie bis sich die Tabletten vollständig aufgelöst haben.
- Bewahren Sie die Kontaktlinsen in der (Proxid 1) Lösung auf, nach der Desinfektionszeit, schütten Sie die Lösung aus dem Behälter.
- Spülen Sie die Kontaktlinsen mit einer Neutralisationslösung (Proxid 2), bevor Sie die Linsen tragen.
- Spülen Sie den Linsenbehälter gründlich mit Proxid 1 aus und lassen ihn an der Luft trocknen.

#### Warnhinweise:

- Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.
- Wenn Sie anhaltende Augenbeschwerden haben z.B. übermäßiger Tränenfluss, Augenrötungen oder Sehveränderungen haben, nehmen Sie die Kontaktlinse sofort vom Auge, da sich die Beschwerden sonst verschlimmern können.

#### Vorsichtsmaßnahmen:

- Verwenden Sie immer frisch zubereitete Enzymlösung., schütten Sie diese sofort nach Gebrauch weg.
- Verwenden Sie nur Empfohlene Linsenbehälter
- Verwenden Sie die Tabletten nicht, wenn sie braun verfärbt sind.
- Spülen und neutralisieren Sie Ihre Kontaktlinsen, nach der Gebrauchsanweisung.
- Linsen vor dem Einsetzen in das Auge immer abspülen.
- Tabletten bei Raumtemperatur aufbewahren, hohe Hitze vermeiden.
- Vor Ablauf des Verfalldatums verwenden.
- Nicht verwenden, wenn die Folie beschädigt wurde.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

#### Vertrieb in Deutschland:

**Osmed UG**  
**Frankfurter Str. 51**  
**58095 Hagen**  
**Tel: 02331/ 788290**  
**Fax: 02331/ 7882929**  
**eMail: [info@osmed.de](mailto:info@osmed.de)**

