

Arion Cronos

Desinfektionssystem ohne Konservierungsstoffe für weiche Kontaktlinsen und verbesserte Wirksamkeit bei hoher Zeitersparnis.

Was ist Arion Cronos?

Arion Cronos ist eine Ein-Schritt-Methode ohne Konservierungsstoffe auf der Basis einer Peroxidlösung, die alle weichen Kontaktlinsen desinfiziert (Einweglinsen, Austauschlinsen und konventionelle Kontaktlinsen). Es enthält 360 ml Desinfektionslösung und 36 Neutralisierungstabletten.

Wie funktioniert Arion Cronos?

Nach Einlegen der Kontaktlinsen in die Körbchen wird die Wasserstoffperoxid-Lösung Arion Cronos und eine Vitamin B2-haltige Tablette zur Farbveränderung dazugegeben. Arion Cronos wandelt sich nach dem Einwirken in eine augenverträgliche Salzlösung um. Trotzdem ist es nicht zur längeren Aufbewahrung der Kontaktlinsen geeignet, da es frei von Konservierungsstoffen ist (maximal 48 Stunden).

Tragekomfort

Die Neutralisierungstabletten erfüllen folgende Funktionen:

1. Sie zersetzen das Wasserstoffperoxid nach erfolgter Desinfektion der Kontaktlinsen und wandeln die Flüssigkeit in eine sterile und absolut augenverträgliche Salzlösung ohne Konservierungsstoffe um. Somit ist ein anschließendes Abspülen der Linse nicht erforderlich.
2. Sie bewirken eine Farbveränderung der Lösung und zeigen so dem Anwender das Ende der Neutralisierung an.
3. Sie erhöhen aufgrund der neuartigen Komponente HPC in der Tablettenbeschichtung den Tragekomfort beim Anwender.

Verbesserte Wirksamkeit bei hoher Zeitersparnis

Phase 1:

Verlängerung der Desinfektionszeit

Dank der neuen Komponente HPC verzögert sich der Beginn der Neutralisierung und es steht eine Desinfektionszeit von 12 Minuten zur Verfügung, die für eine sichere Desinfektion ausreicht.

Phase 2:

Verringerung der zur Neutralisierung notwendigen Zeit.

Das Enzym Katalase in den Arion Cronos Tabletten beschleunigt die Neutralisierung und reduziert so die komplette Reinigungszeit von 2 Stunden auf 1 Stunde.

3 %-ige Wasserstoff-Peroxid-Konzentration

Vertrieb in Deutschland:

Osmed UG

Frankfurter Str. 51

58095 Hagen

Tel: 02331/788290

Fax: 02331/7882929

e-Mail: info@osmed.de

web: www.Osmed.de