

# Askina® Pad | Pad S

## Saugfähige Vliesstoffkompress




### TIPP

Netzartig, glänzende Polyesterfolie wundseitig auflegen! So wird ein Verkleben der Wundauflage mit der Wunde und dem Wundrand vermieden.

Askina® Pad Vliesstoffkompressen sind sehr weich und anschmiegsam und ermöglichen eine gute Polsterung der Wunde. Durch die so gesicherte Wundruhe kann ein schonender und schmerzärmer Verbandwechsel durchgeführt und der Heilungsprozess gefördert werden.

### Das Drei-Schicht-System

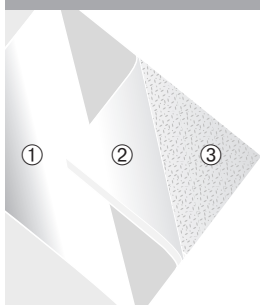

#### 1. Schicht – Feste Vliesstoffoberseite

Kein Fusseln des Polsters mehr möglich

#### 2. Schicht – Mehrlagiges Baumwollacrylfaserpolster

Besonders saugfähig, hohe Polsterwirkung

#### 3. Schicht – Wundseite netzartige Polyesterfolie

Kein Verkleben mit der Wunde, rascher Sekrettransport durch microfeines Gitternetz

### Einsatzgebiete Askina® Pad

- › Absorbierende Wundauflage zur Versorgung von Hautwunden aller Art in der Traumatologie, Dermatologie und Chirurgie
- › Als sekundäre Wundauflage bei infizierten Wunden

### Einsatzgebiete Askina® Pad S

Gebrauchsfertige Schlitzkompress mit Lochstanzung zur Wundversorgung von

- › Kathetern (Drainagen, PEG-Sonden, suprapubischen Blasendrainagen, Infusionskathetern)
- › Draht- und Nagelextensionen

| Askina® Pad | Abmessung                                  | VE        | PZN     | REF     |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| Pad         | 5 cm x 5 cm                                | 25 Stück  | 6646045 | 9024000 |
|             | 5 cm x 5 cm                                | 100 Stück | 6647346 | 9024018 |
|             | 10 cm x 10 cm                              | 10 Stück  | 6646051 | 9024026 |
|             | 10 cm x 10 cm                              | 100 Stück | 6647352 | 9024034 |
|             | 20 cm x 10 cm                              | 100 Stück | 6646068 | 9024042 |
| Pad S       | 5 cm x 5 cm                                | 30 Stück  | 0323536 | 9024050 |
|             | 7,5 cm x 7,5 cm                            | 30 Stück  | 0323542 | 9024069 |
|             | Lochdurchmesser 4,1 – 11 mm für Ch. 9 – 30 |           |         |         |

