


# PRODUKTINFORMATION

**KERMA® Verbandstoff GmbH Hainichen**

Seit 1886 im Dienst der Medizin


**KERMA.de**

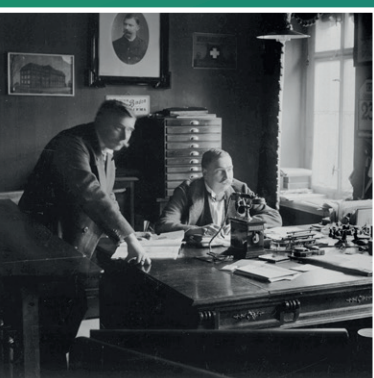


**Ausgabe Juni 2024**

Mit dieser Produktinformation verlieren alle bisherigen Produktinformationen ihre Gültigkeit.  
Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



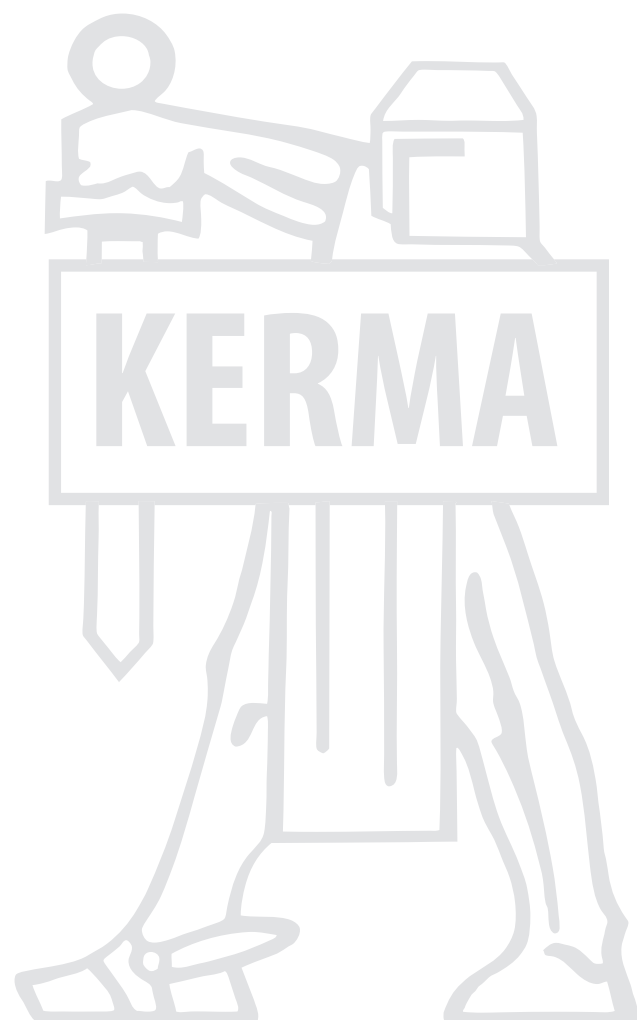

# SEIT 1886 IM DIENST DER MEDIZIN

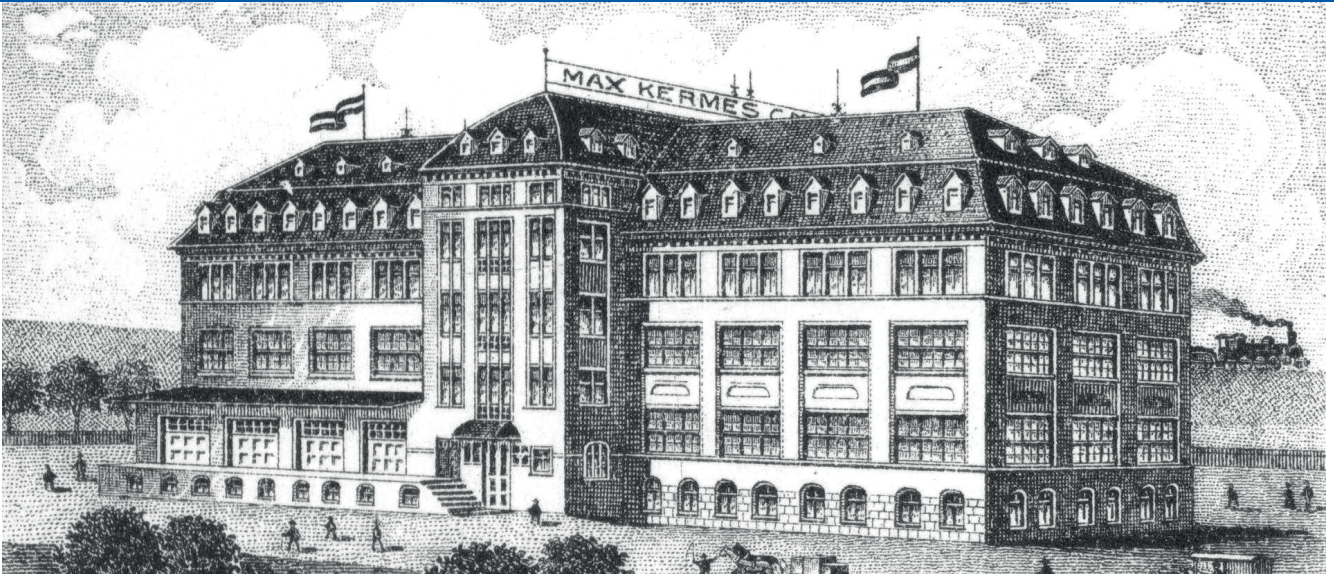

Die privaten Kümernisse und die Turbulenzen der Geschichte haben Firma, Familie und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den letzten Jahren stets herausgefordert. Alle haben sich dieser Herausforderung erfolgreich gestellt. Eine Unternehmensgeschichte wie die unsrige gibt es hundertfach in Deutschland. Doch nur wenige Firmen sind so gestärkt wie wir daraus hervorgegangen. Wir wissen nicht, was die Zukunft bereithält. Wir werden aber alles dafür tun, dieses traditionsreiche Unternehmen im Sinne seines Gründers Friedrich Max Kermes fortzuführen und Sie – unsere Kunden – stets in den Mittelpunkt dieses Tuns zu stellen.

Wir pflegen Geschäftsbeziehungen zum gegenseitigen Vorteil und begegnen unseren Partnern stets auf Augenhöhe. Mit Ihnen zusammen werden wir auch noch in Jahrzehnten wahrheitsgemäß sagen können:

**„Seit 1886 im Dienst der Medizin“.**

Herzlichst

Ihre Familie Kermes und alle KERMA®s

Im 135. Jubiläumsjahr 2021 wurde mit der **Zertifizierung nach der neuesten EU-Verordnung MDR** ein weiterer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte gesetzt. Wie bereits bei der Erstzertifizierung gehört KERMA® zu den Ersten der Branche überhaupt, die über ein solches Zertifikat verfügen.



**KERMA® Verbandstoff GmbH**

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de) | **KERMA.de**

# EU Certificate

## Production Quality Assurance

### REGULATION (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex XI, Part A



Registration No.: DZ 1625800-1

Manufacturer: **KERMA Verbandstoff GmbH**  
Ziegelstr. 29  
09661 Hainichen  
Germany

EUDAMED Single  
Registration No.: N/A

Products: Products of class I, sterile:

M010102 Pure Cotton  
M020101 Cotton Gauzes, Cut  
M020102 Cotton Gauzes, Folded  
M020199 Cotton Gauzes - Others  
M020299 Non-Woven Gauzes - Others  
M040301 Eye Pads, Cotton Or Non-Woven Materials  
M9099 Devices For Medication - Others (For Adhesive Strips, Skin-Closure See  
H900102)

The scope of certification is limited to the aspects relating to establishing, securing  
and maintaining sterile conditions

Authorised  
representative(s): N/A

| Certificate history |              |             |
|---------------------|--------------|-------------|
| Revision:           | Description: | Issue date: |
| 0                   | Initial      | 2021-05-04  |

The Notified Body hereby declares that the requirements of Annex XI, Part A of the REGULATION (EU) 2017/745 have been met for the listed products. The above named manufacturer has established and applies a production quality assurance, which is subject to periodic surveillance, defined by Annex XI, Part A, Section 7 of the aforementioned regulation. If class III devices or class IIb devices are covered by this certificate, an EU type-examination certificate in accordance with Annex X of the aforementioned regulation is required before placing them on the market.

Report No.: 3333072-50

Effective date: 2021-05-04

Expiry date: 2026-05-03

Issue date: 2021-05-04



Dipl.-Ing. A. Fechner  
TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

TÜV Rheinland LGA Products GmbH is a Notified Body according to REGULATION (EU) 2017/745 concerning medical devices with the identification number 0197.

# INHALTSVERZEICHNIS

## Kompressen / Verbandmull

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Mullkompressen 8-fach und 12-fach gelegt | 6–7 |
| Zellstoff-Vlies-Kompressen               | 8–9 |
| Zellstoff-Vlies-Kompressen gerollt       | 10  |
| Kompressenstoff – Die Riesen-Komprese    | 11  |
| Zellstoff-Mull-Kompressen                | 12  |
| Zellstoff-Mull-Kompressen gerollt        | 13  |
| Saugkompressen                           | 14  |
| Augenkompressen                          | 15  |
| Mullzuschnitte                           | 16  |
| Verbandmull Meterware                    | 17  |

## Tupfer

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Mulltupfer handgefertigt, ballonförmig              | 18–19 |
| Zelltupf – Verbandzellstofftupfer von der Rolle     | 20    |
| Stieltupfer handgefertigt, einseitig und beidseitig | 21    |
| Spitztupfer handgefertigt                           | 22    |

## Tamponade / Tampons

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Verbandmull-Streifenpackungen/Tamponade    | 23 |
| Verbandmull-Streifen gelegt, handgefertigt | 24 |
| Wattetampons handgefertigt                 | 25 |

## Binden / Verbände

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Verbandzellstoffbinden        | 26 |
| Nasenverband (Nasenschleuder) | 27 |

## Verbandwatte

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Augenwatte                     | 28 |
| Verbandwatte                   | 29 |
| Verbandwatte-Pressrollen       | 30 |
| Wattestielträger handgefertigt | 31 |

## Hygiene- und Inkontinenzartikel

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Krankenunterlagen         | 32–33 |
| Unterlage mit Folieschutz | 34    |
| Einmal-Nasenschlitztücher | 35    |

## Verbandzellstoff hochgebleicht / Zellstoff ungebleicht

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Verbandzellstoff-Zuschnitte                        | 36–37 |
| Verbandzellstoff-Watteblättchen (Zellwa-Blättchen) | 38    |
| Zellstoff-Zuschnitte ungebleicht                   | 39    |

## Spezialverbandstoffe

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Stabilisierungs- und Druckpolsterrolle | 40 |
|----------------------------------------|----|

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

41–43



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION



## MULLKOMPRESSEN

### Produkt

8-fach oder 12-fach gelegte Kompressen aus 17-fädigem Verbandmull Baumwolle (DIN EN 14079 – VM17, Ph.Eur.) mit eingeschlagener Schnittkante, daher keine Randfäden, und ohne Röntgenkontrastfaden.

Mullkompressen sind hochsaugfähig, weich, luftdurchlässig.

Mullkompressen werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

### Indikation

Das große Einsatzgebiet der Mullkompressen umfasst die allgemeine Wundversorgung. Sie werden u.a. auch als Träger für Salben, zur Abdeckung und Reinigung von Wunden eingesetzt.

**KERMA® Verbandstoff GmbH**  
Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen  
Tel. 037207 408-22 und -30  
Fax 037207 408-20  
E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)  
**KERMA.de**

### steril

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)             | Abmessung     | Originalpackung                                  | Versand-<br>einheit     |
|----------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 42140    | <b>07453584</b><br>110745358417 | 5cm × 5cm     | 25 × 2 Stück<br>in Peelpackung/<br>Faltschachtel | 8 Packungen/<br>Karton  |
| 42141    | <b>07453590</b><br>110745359080 | 7,5cm × 7,5cm | 25 × 2 Stück<br>in Peelpackung/<br>Faltschachtel | 8 Packungen/<br>Karton  |
| 42142    | <b>07453609</b><br>110745360901 | 10cm × 10cm   | 25 × 2 Stück<br>in Peelpackung/<br>Faltschachtel | 8 Packungen<br>Karton   |
| 42143    | <b>07453615</b><br>110745361564 | 10cm × 20cm   | 25 × 2 Stück<br>in Peelpackung/<br>Faltschachtel | 12 Packungen/<br>Karton |
| 42144    | <b>10810846</b><br>111081084664 | 10cm × 10cm   | 10 Stück<br>im Sterilbeutel/<br>Folie            | 30 Packungen/<br>Karton |

### unsteril

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)             | Abmessung     | Originalpackung               | Versand-<br>einheit     |
|----------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 42116    | <b>07412757</b><br>110741275702 | 5cm × 5cm     | 100 Stück<br>in Faltschachtel | 10 Packungen/<br>Karton |
| 42117    | <b>07412786</b><br>110741278621 | 7,5cm × 7,5cm | 100 Stück<br>in Faltschachtel | 10 Packungen/<br>Karton |
| 42115    | <b>07118408</b><br>110711840863 | 10cm × 10cm   | 100 Stück<br>in Faltschachtel | 10 Packungen/<br>Karton |
| 42118    | <b>07412800</b><br>110741280078 | 10cm × 20cm   | 100 Stück<br>in Faltschachtel | 10 Packungen/<br>Karton |

## Lieferform: 12-fach gelegt

| <b>steril</b> |                                 |               |                                                  |                         |
|---------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Art.-Nr.      | PZN<br>UDI-DI (PPN)             | Abmessung     | Originalpackung                                  | Versand-<br>einheit     |
| 42120         | <b>07259132</b><br>110725913242 | 5cm × 5cm     | 5 × 2 Stück<br>in Peelpackung/<br>Folie          | 30 Packungen/<br>Karton |
| 42121         | <b>07259149</b><br>110725914932 | 5cm × 5cm     | 25 × 2 Stück<br>in Peelpackung/<br>Faltschachtel | 8 Packungen/<br>Karton  |
| 42122         | <b>07259155</b><br>110725915595 | 7,5cm × 7,5cm | 5 × 2 Stück<br>in Peelpackung/<br>Folie          | 30 Packungen/<br>Karton |
| 42123         | <b>07259161</b><br>110725916161 | 7,5cm × 7,5cm | 25 × 2 Stück<br>in Peelpackung/<br>Faltschachtel | 8 Packungen/<br>Karton  |
| 42124         | <b>07259178</b><br>110725917851 | 10cm × 10cm   | 5 × 2 Stück<br>in Peelpackung/<br>Folie          | 30 Packungen/<br>Karton |
| 42125         | <b>07259184</b><br>110725918417 | 10cm × 10cm   | 25 × 2 Stück<br>in Peelpackung/<br>Faltschachtel | 8 Packungen/<br>Karton  |
| 42126         | <b>07259190</b><br>110725919080 | 10cm × 20cm   | 5 × 2 Stück<br>in Peelpackung/<br>Folie          | 30 Packungen/<br>Karton |
| 42127         | <b>07259209</b><br>110725920901 | 10cm × 20cm   | 25 × 2 Stück<br>in Peelpackung/<br>Faltschachtel | 12 Packungen/<br>Karton |

| <b>unsteril</b> |                                 |               |                               |                         |
|-----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| Art.-Nr.        | PZN<br>UDI-DI (PPN)             | Abmessung     | Originalpackung               | Versand-<br>einheit     |
| 42110           | <b>07118414</b><br>110711841429 | 5cm × 5cm     | 100 Stück<br>in Faltschachtel | 10 Packungen/<br>Karton |
| 42111           | <b>07118420</b><br>110711842092 | 7,5cm × 7,5cm | 100 Stück<br>in Faltschachtel | 10 Packungen/<br>Karton |
| 42112           | <b>07118437</b><br>110711843782 | 10cm × 10cm   | 100 Stück<br>in Faltschachtel | 10 Packungen/<br>Karton |
| 42114           | <b>07118443</b><br>110711844348 | 10cm × 20cm   | 100 Stück<br>in Faltschachtel | 10 Packungen/<br>Karton |



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

## MULLKOMPRESSEN

**KERMA® Verbandstoff GmbH**  
Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen  
Tel. 037207 408-22 und -30  
Fax 037207 408-20  
E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)  
**KERMA.de**



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### ZELLSTOFF-VLIES-KOMPRESSEN 12-lagig

#### Produkt

Beidseitig vernähte Komresse, bestehend aus einer oberen und unteren Lage hautfreundlichem Hygienevlies und 10 Lagen sauerstoffgebleichtem, hochsaugfähigem Verbandzellstoff nach DAB.

Zellstoff-Vlies-Kompressen werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten und sind beidseitig verwendbar.

#### Indikation

Zellstoff-Vlies-Kompressen eignen sich für Wunden aller Art, besonders für sezernierende Wunden, die im ambulanten und stationären Bereich zu versorgen sind. Ferner sind sie hervorragend für die Versorgung von Stoma-Patienten geeignet. Kleine Abmessungen werden auch im HNO-Bereich verwendet, u.a. als Zungenlappchen.



#### Lieferform:

| steril   |                          |             |                                                   |                                |
|----------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Abmessung   | Originalpackung                                   | Versand-<br>einheit            |
| 44131    | 04050199<br>110405019980 | 6cm × 8cm   | 5 × 1 Stück<br>in Peelpackung/<br>Folie           | 20 Packungen/<br>Faltschachtel |
| 44133    | 04050176<br>110405017627 | 6cm × 8cm   | 100 × 2 Stück<br>in Peelpackung/<br>Faltschachtel | 4 Packungen/<br>Karton         |
| 44134    | 04050182<br>110405018290 | 8cm × 10cm  | 100 × 2 Stück<br>in Peelpackung/<br>Karton        | Original-<br>packung           |
| 44137    | 06347638<br>110634763834 | 10cm × 10cm | 5 × 2 Stück<br>in Peelpackung/<br>Folie           | 20 Packungen/<br>Karton        |
| 44138    | 06347644<br>110634764400 | 10cm × 20cm | 5 × 2 Stück<br>in Peelpackung/<br>Folie           | 10 Packungen/<br>Karton        |
| 44129    | 07259020<br>110725902001 | 20cm × 30cm | 5 × 2 Stück<br>in Peelpackung/<br>Folie           | Original-<br>packung           |
| 44130    | 07259037<br>110725903788 | 20cm × 30cm | 30 × 2 Stück<br>in Peelpackung/<br>Karton         | Original-<br>packung           |

**KERMA® Verbandstoff GmbH**

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

**KERMA.de**



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### ZELLSTOFF-VLIES- KOMPRESSEN 12-lagig

| unsteril |                          |             |                               |                                |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Abmessung   | Originalpackung               | Versand-<br>einheit            |
| 44101    | 04082549<br>110408254906 | 6cm × 8cm   | 10 Stück<br>in Folie          | 40 Packungen/<br>Karton        |
| 44111    | 04050130<br>110405013018 | 6cm × 8cm   | 100 Stück<br>in Faltschachtel | 30 Packungen/<br>Karton        |
| 44102    | 04082555<br>110408255569 | 8cm × 10cm  | 10 Stück<br>in Folie          | 20 Packungen/<br>Faltschachtel |
| 44112    | 04050147<br>110405014708 | 8cm × 10cm  | 100 Stück<br>in Faltschachtel | 30 Packungen/<br>Karton        |
| 44110    | 04096534<br>110409653477 | 10cm × 10cm | 100 Stück<br>in Faltschachtel | 23 Packungen/<br>Karton        |
| 44118    | 03404672<br>110340467244 | 10cm × 10cm | 500 Stück<br>im Karton        | Original-<br>packung           |
| 44103    | 04082561<br>110408256135 | 10cm × 20cm | 10 Stück<br>im Papierbeutel   | 40 Packungen/<br>Karton        |
| 44113    | 04050153<br>110405015371 | 10cm × 20cm | 100 Stück<br>in Faltschachtel | 12 Packungen/<br>Karton        |
| 44116    | 06894501<br>110689450156 | 10cm × 20cm | 500 Stück<br>im Karton        | Original-<br>packung           |
| 44104    | 04082578<br>110408257825 | 20cm × 30cm | 10 Stück<br>in Folie          | Original-<br>packung           |
| 44114    | 04082526<br>110408252650 | 20cm × 30cm | 100 Stück<br>im Karton        | Original-<br>packung           |
| 44105    | 04082584<br>110408258488 | 20cm × 40cm | 10 Stück<br>in Folie          | Original-<br>packung           |
| 44115    | 04082532<br>110408253216 | 20cm × 40cm | 100 Stück<br>im Karton        | Original-<br>packung           |

**KERMA® Verbandstoff GmbH**  
Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen  
Tel. 037207 408-22 und -30  
Fax 037207 408-20  
E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)  
**KERMA.de**



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### ZELLSTOFF-VLIES-KOMPRESSEN gerollt, 12-lagig

#### Produkt

Beidseitig vernähte Komresse auf Rolle, bestehend aus einer oberen und unteren Lage hautfreundlichem Hygienevlies sowie 10 Lagen sauerstoffgebleichtem, hochsaugfähigem Verbandzellstoff nach DAB. Es können verschiedene Kompressenlängen nach Bedarf zugeschnitten werden (sparsamer Verbrauch).

Gerollte Zellstoff-Vlies-Kompressen werden unsteril angeboten, sind jedoch sterilisierbar und können beidseitig verwendet werden.

#### Indikation

Die Kompressen sind universell einsetzbar für Wunden aller Art, besonders für sezernierende Wunden, auch für Adipositas-Patienten.

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

[KERMA.de](http://KERMA.de)



#### Lieferform:

##### unsteril

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Abmessung   | Originalpackung     | Versand-<br>einheit  |
|----------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 44906    | 06347673<br>110634767319 | 10cm x 10 m | 1 Rolle<br>in Folie | Original-<br>packung |



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### Lieferform:

| unsteril |                                 |              |                       |                         |
|----------|---------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)             | Abmessung    | Originalpackung       | Versand-<br>einheit     |
| 45642    | <b>04050118</b><br>110405011886 | 40cm × 100cm | 1 Stück<br>in Folie   | 30 Packungen/<br>Karton |
| 45645    | <b>17250385</b><br>111725038575 | 40cm × 50cm  | 50 Stück<br>im Karton | Original-<br>packung    |

## KOMPRESSENSTOFF

### Die Riesen-Kompresse, 12-lagig

#### Produkt

Kompresenstoff besteht aus 10 Lagen sauerstoffgebleichtem, hochsaugfähigem Verbandzellstoff nach DAB, ist beidseitig mit Hygienevlies belegt und vernäht. Durch die Größe des Kompresenstoffs können bedarfsgerechte Kompresen-Zuschnitte gefertigt werden. Er kann aber auch direkt als Kompresse bei Adipositas-Patienten eingesetzt werden.

Kompresenstoff wird unsteril angeboten, ist jedoch sterilisierbar und kann beidseitig verwendet werden.

#### Indikation

Kompresenstoff eignet sich für die großflächige Wundversorgung aller Art (z.B. bei Adipositas-Patienten).

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

[KERMA.de](http://KERMA.de)



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### ZELLSTOFF-MULL-KOMPRESSEN 12-lagig

#### Produkt

Beidseitig vernähte Komresse, bestehend aus einer oberen Lage 20-fädigem Verbandmull aus Baumwolle (DIN EN 14079 – VM20, Ph.Eur.), 10 Lagen sauerstoffgebleichtem, hochsaugfähigem Verbandzellstoff nach DAB und einer unteren Lage Hygienevlies. Sie ist stets mit der Mullfläche auf die Wunde zu applizieren.

Zellstoff-Mull-Kompressen werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

#### Indikation

Die Zellstoff-Mull-Kompressen eignen sich für Wunden aller Art, besonders für stark sezernierende Wunden und für Salbenverbände.

#### Lieferform:

##### steril

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Abmessung   | Originalpackung                                  | Versand-<br>einheit     |
|----------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 44161    | 06347667<br>110634766753 | 10cm × 10cm | 5 × 2 Stück<br>in Peelpackung/<br>Folie          | 20 Packungen/<br>Karton |
| 44164    | 07218073<br>110721807348 | 10cm × 10cm | 25 × 2 Stück<br>in Peelpackung/<br>Faltschachtel | 12 Packungen/<br>Karton |
| 44162    | 06347650<br>110634765063 | 10cm × 20cm | 5 × 2 Stück<br>in Peelpackung/<br>Folie          | 10 Packungen/<br>Karton |

##### unsteril

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Abmessung   | Originalpackung               | Versand-<br>einheit     |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|
| 44180    | 04909658<br>110490965868 | 10cm × 10cm | 10 Stück<br>in Folie          | 40 Packungen/<br>Karton |
| 44181    | 04909664<br>110490966434 | 10cm × 20cm | 10 Stück<br>im Papierbeutel   | 40 Packungen/<br>Karton |
| 44171    | 04095279<br>110409527940 | 10cm × 20cm | 100 Stück<br>in Faltschachtel | 12 Packungen/<br>Karton |

**KERMA® Verbandstoff GmbH**


Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

**KERMA.de**

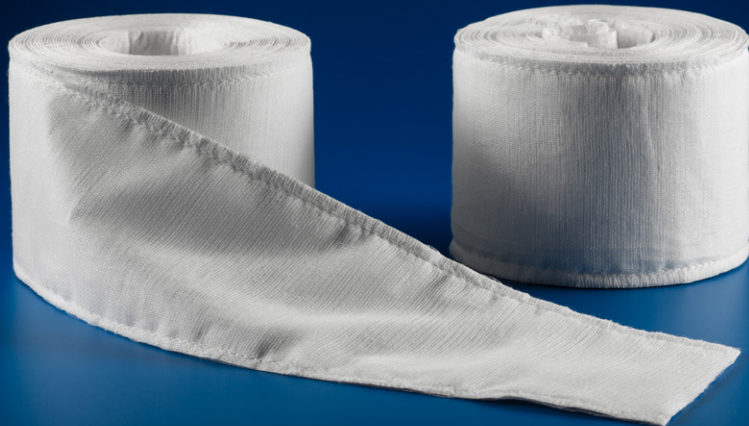

KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### ZELLSTOFF-MULL-KOMPRESSEN gerollt, 12-lagig

#### Produkt

Beidseitig vernähte Komresse auf Rolle, bestehend aus einer oberen Lage 20-fädigem Verbandmull aus Baumwolle (DIN EN 14079 – VM20, Ph.Eur.), 10 Lagen sauerstoffgebleichtem, hochsaugfähigem Verbandzellstoff nach DAB und einer unteren Lage Hygienevlies. Es können verschiedene Kompressenlängen nach Bedarf zugeschnitten werden (sparsamer Verbrauch). Sie sind stets mit der Mullfläche zur Wunde zu applizieren.

Gerollte Zellstoff-Mull-Kompressen werden unsteril angeboten, sind jedoch sterilisierbar.

#### Indikation

Die Zellstoff-Mull-Kompressen sind universell einsetzbar, besonders für stark sezernierende Wunden und Salbenverbände, u.a. für Adipositas-Patienten.

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

[KERMA.de](http://KERMA.de)

#### Lieferform:

| unsteril |                          |            |                     |                      |
|----------|--------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Abmessung  | Originalpackung     | Versand-<br>einheit  |
| 44904    | 06347696<br>110634769672 | 10cm × 10m | 1 Rolle<br>in Folie | Original-<br>packung |



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION



## SAUGKOMPRESSEN

### Produkt

Beidseitig vernähte Komresse, bestehend aus einer oberen und unteren Lage hautfreundlichem Hygienevlies und einer Sauglage aus 100% Viskosefasern.

Die Komresse ist besonders weich und anschmiegsam und besitzt neben ihrer Polsterung eine hohe Saugkapazität.

Saugkompressen werden unsteril angeboten, sind jedoch sterilisierbar und können beidseitig verwendet werden.

### Indikation

Saugkompressen eignen sich für Wunden aller Art, besonders für stark sezernierende Wunden, die im ambulanten und stationären Bereich zu versorgen sind.

### Lieferform:

#### unsteril

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Abmessung   | Originalpackung              | Versand-<br>einheit     |
|----------|--------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|
| 44141    | 04095233<br>110409523331 | 10cm x 20cm | 40 Stück<br>in Faltschachtel | 12 Packungen/<br>Karton |

**KERMA® Verbandstoff GmbH**

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

**KERMA.de**



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### Lieferform:

| steril   |                          |             |                                                  |                         |
|----------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Abmessung   | Originalpackung                                  | Versand-<br>einheit     |
| 42106    | 07218096<br>110721809604 | 5,8cm × 7cm | 5 × 1 Stück<br>in Peelpackung/<br>Folie          | 30 Packungen/<br>Karton |
| 42107    | 07218104<br>110721810495 | 5,8cm × 7cm | 25 × 1 Stück<br>in Peelpackung/<br>Faltschachtel | 17 Packungen/<br>Karton |
| 42108    | 07259008<br>110725900869 | 5,8cm × 7cm | 10 Stück<br>im Sterillbeutel/<br>Folie           | 30 Packungen/<br>Karton |

| unsteril |                          |             |                                         |                         |
|----------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Abmessung   | Originalpackung                         | Versand-<br>einheit     |
| 42104    | 02101691<br>110210169106 | 5,8cm × 7cm | 5 Stück<br>in Papier/<br>Faltschachtel  | 50 Packungen/<br>Karton |
| 42101    | 04050064<br>110405006483 | 5,8cm × 7cm | 10 Stück<br>in Papier/<br>Faltschachtel | 90 Packungen/<br>Karton |
| 42102    | 04050070<br>110405007049 | 5,8cm × 7cm | 25 Stück<br>in Papier/<br>Faltschachtel | 16 Packungen/<br>Karton |
| 42103    | 04050087<br>110405008739 | 5,8cm × 7cm | 50 Stück<br>in Papier/<br>Faltschachtel | 33 Packungen/<br>Karton |

## AUGEN- KOMPRESSEN

### Produkt

Augenkompressen bestehen aus Verbandwatte (Baumwolle), die beidseitig mit 20-fädigem Verbandmull, ebenfalls aus Baumwolle (DIN EN 14079 – VM20, Ph.Eur.), bedeckt und in ovaler Form ausgestanzt ist. Sie sind weich, anschmiegsam, gut zu fixieren und passen sich gut an. Durch die nicht verfestigten Ränder wird ein weiches Anliegen am Auge garantiert.

Augenkompressen werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

### Indikation

Augenkompressen dienen der Versorgung von Verletzungen am Auge, zur Abdeckung nach operativen Eingriffen, zur Applikation von Pharmaka und zum speziellen Schutz des Auges.

**KERMA® Verbandstoff GmbH**  
Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen  
Tel. 037207 408-22 und -30  
Fax 037207 408-20  
E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)  
**KERMA.de**



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### MULLZUSCHNITTE

#### Produkt

Mullzuschnitte aus hochwertiger Baumwolle werden aus 20-fädigem Verbandmull (DIN EN 14079 – VM20, Ph.Eur.) hergestellt.

Sie werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril geliefert.

#### Indikation

Mullzuschnitte können vielseitig angewandt werden, z.B. zur Abdeckung und Reinigung von Wunden aller Art sowie als Träger für Salben etc.

**KERMA® Verbandstoff GmbH**

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

**KERMA.de**



#### Lieferform:

##### steril

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Abmessung   | Originalpackung                                    | Versand-<br>einheit     |
|----------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 42224    | 04050331<br>110405033147 | 15cm × 15cm | 25 Stück<br>in Klarsicht-<br>Peelpackung/<br>Folie | 15 Packungen/<br>Karton |
| 42226    | 04050354<br>110405035403 | 20cm × 20cm | 25 Stück<br>in Klarsicht-<br>Peelpackung/<br>Folie | 15 Packungen/<br>Karton |

##### unsteril

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Abmessung   | Originalpackung               | Versand-<br>einheit     |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|
| 42201    | 04422519<br>110442251955 | 10cm × 10cm | 500 Stück<br>in Folie         | 10 Packungen/<br>Karton |
| 42202    | 04422525<br>110442252521 | 15cm × 15cm | 500 Stück<br>in Folie         | 7 Packungen/<br>Karton  |
| 42204    | 04422502<br>110442250265 | 20cm × 20cm | 100 Stück<br>in Folie         | 20 Packungen/<br>Karton |
| 42205    | 04422531<br>110442253184 | 20cm × 20cm | 500 Stück<br>in Faltschachtel | 6 Packungen/<br>Karton  |
| 42206    | 04422548<br>110442254874 | 30cm × 30cm | 500 Stück<br>in Folie         | 4 Packungen/<br>Karton  |
| 42207    | 04422554<br>110442255440 | 40cm × 40cm | 500 Stück<br>in Folie         | 3 Packungen/<br>Karton  |
| 42208    | 17388600<br>111738860058 | 40cm × 60cm | 500 Stück<br>in Folie/Karton  | Original-<br>packung    |



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### VERBANDMULL Meterware

#### Produkt

20-fädiger Verbandmull (DIN EN 14079 – VM20, Ph.Eur.), 1m breit, wird in verschiedenen Längen angeboten und ist mehrfach zusammengelegt.

#### Keine Zickzack-Legung!

Verbandmull wird steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

#### Indikation

Der Verbandmull ist ein traditioneller und vielseitig verwendbarer Verbandstoff zur Wundversorgung, Abdeckung und Reinigung.

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

**KERMA.de**

### Lieferform:

| steril   |                          |           |                                                         |                         |
|----------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Abmessung | Originalpackung                                         | Versand-<br>einheit     |
| 42420    | 11580147<br>111158014748 | 1m × 1m   | 1 Stück<br>in Klarsicht-<br>Peelpackung/<br>Folie       | 10 Packungen/<br>Karton |
| 42419    | 17380596<br>111738059644 | 1m × 1m   | 70 × 1 Stück<br>in Klarsicht-<br>Peelpackung/<br>Karton | Original-<br>packung    |

| unsteril |                          |           |                            |                         |
|----------|--------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|
| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Abmessung | Originalpackung            | Versand-<br>einheit     |
| 42411    | 04422560<br>110442256006 | 1m × 0,5m | 1 Stück<br>in Folie        | Original-<br>packung    |
| 42412    | 04422577<br>110442257793 | 1m × 1m   | 1 Stück<br>im Papierbeutel | 15 Packungen/<br>Karton |
| 42413    | 04422583<br>110442258359 | 1m × 2m   | 1 Stück<br>in Folie        | 20 Packungen/<br>Karton |
| 42414    | 04422608<br>110442260843 | 1m × 5m   | 1 Stück<br>in Folie        | 30 Packungen/<br>Karton |
| 42415    | 04422614<br>110442261409 | 1m × 10m  | 1 Stück<br>in Folie        | 20 Packungen/<br>Karton |
| 42416    | 04422620<br>110442262072 | 1m × 20m  | 1 Stück<br>in Folie        | 10 Packungen/<br>Karton |
| 42417    | 04422637<br>110442263762 | 1m × 40m  | 1 Stück<br>in Folie        | Original-<br>packung    |



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### MULLTUPFER handgefertigt ballonförmig

#### Produkt

Mulltupfer werden aus 20-fädigem Verbandmull (Baumwolle, DIN EN 14079 – VM20, Ph.Eur.) hergestellt. Diese hochsaugfähigen Schlinggazetupfer sind ballonförmig, ohne Röntgenkontrastfaden und ohne Gummiring.

Mulltupfer werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

#### Indikation

Mulltupfer dienen – je nach Größe – zur Wundreinigung, Blut- und Sekretaufnahme sowie zur Hautdesinfektion.

#### Lieferform:

| steril   |                          |                                           |                                                                |                         |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Abmessung<br>Mull-<br>zuschnitt/<br>Größe | Originalpackung                                                | Versand-<br>einheit     |
| 42530    | 07118377<br>110711837716 | 15cm × 15cm<br>walnussgroß                | 50 × 2 Stück<br>in Klarsicht-<br>Peelpackung/<br>Faltschachtel | 12 Packungen/<br>Karton |
| 42513    | 02845948<br>110284594865 | 15cm × 15cm<br>walnussgroß                | 5 Stück<br>in Klarsicht-Peel-<br>packung/Folie                 | 30 Packungen/<br>Karton |
| 42510    | 01408772<br>110140877275 | 15cm × 15cm<br>walnussgroß                | 20 × 5 Stück<br>in Klarsicht-<br>Peelpackung/<br>Faltschachtel | 12 Packungen/<br>Karton |
| 42532    | 07380454<br>110738045466 | 15cm × 15cm<br>walnussgroß                | 30 Stück<br>im Sterilbeutel/<br>Folie                          | 20 Packungen/<br>Karton |
| 42531    | 07118383<br>110711838379 | 20cm × 20cm<br>pflaumen-<br>groß          | 40 × 2 Stück<br>in Klarsicht-<br>Peelpackung/<br>Faltschachtel | 12 Packungen/<br>Karton |
| 42511    | 01408826<br>110140882678 | 20cm × 20cm<br>pflaumen-<br>groß          | 20 × 4 Stück<br>in Klarsicht-<br>Peelpackung/<br>Faltschachtel | 12 Packungen/<br>Karton |
| 42514    | 02845954<br>110284595431 | 20cm × 20cm<br>pflaumen-<br>groß          | 5 Stück<br>in Klarsicht-<br>Peelpackung/<br>Folie              | 30 Packungen/<br>Karton |

KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

[KERMA.de](http://KERMA.de)



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### MULLTUPFER handgefertigt ballonförmig

| steril   |                                 |                                           |                                                          |                         |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)             | Abmessung<br>Mullzu-<br>schnitt/<br>Größe | Originalpackung                                          | Versand-<br>einheit     |
| 42536    | <b>01408849</b><br>110140884934 | 20cm × 20cm<br>pflaumen-<br>groß          | 50 × 5 Stück<br>in Klarsicht-<br>Peelpackung/<br>Karton  | Original-<br>packung    |
| 42534    | <b>01408861</b><br>110140886163 | 20cm × 20cm<br>pflaumen-<br>groß          | 30 × 10 Stück<br>in Klarsicht-<br>Peelpackung/<br>Karton | Original-<br>packung    |
| 42533    | <b>07380460</b><br>110738046032 | 20cm × 20cm<br>pflaumen-<br>groß          | 30 Stück<br>im Sterilbeutel/<br>Folie                    | 10 Packungen/<br>Karton |
| 42512    | <b>02080902</b><br>110208090293 | 20cm × 20cm<br>pflaumen-<br>groß          | 100 Stück<br>im Sterilbeutel/<br>Folie                   | 20 Packungen/<br>Karton |
| 42535    | <b>16853147</b><br>111685314794 | 30cm × 40cm<br>extragroß                  | 120 × 5 Stück<br>in Klarsicht-<br>Peelpackung/<br>Karton | Original-<br>packung    |

| unsteril |                                 |                                           |                       |                         |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)             | Abmessung<br>Mullzu-<br>schnitt/<br>Größe | Originalpackung       | Versand-<br>einheit     |
| 42523    | <b>00659118</b><br>110065911877 | 15cm × 15cm<br>walnussgroß                | 100 Stück<br>in Folie | 16 Packungen/<br>Karton |
| 42520    | <b>07118331</b><br>110711833107 | 15cm × 15cm<br>walnussgroß                | 500 Stück<br>in Folie | 10 Packungen/<br>Karton |
| 42525    | <b>00659124</b><br>110065912443 | 20cm × 20cm<br>pflaumen-<br>groß          | 100 Stück<br>in Folie | 16 Packungen/<br>Karton |
| 42524    | <b>07118348</b><br>110711834894 | 20cm × 20cm<br>pflaumen-<br>groß          | 500 Stück<br>in Folie | 8 Packungen/<br>Karton  |
| 42522    | <b>08627307</b><br>110862730777 | 30cm × 30cm<br>eigroß                     | 250 Stück<br>in Folie | 7 Packungen/<br>Karton  |
| 42528    | <b>08627299</b><br>110862729983 | 30cm × 40cm<br>extragroß                  | 250 Stück<br>in Folie | 4 Packungen/<br>Karton  |

**KERMA® Verbandstoff GmbH**  
Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen  
Tel. 037207 408-22 und -30  
Fax 037207 408-20  
E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)  
**KERMA.de**



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### ZELLTUPF Verbandzellstofftupfer von der Rolle

#### Produkt

Verbandzellstofftupfer haben eine polsterartige Form und sind in der Größe 4cm x 5cm durch problemloses Abreißen sofort verwendbar.

Durch die rollenartige Aufmachung eignen sich Zelltupf-Produkte hervorragend zum Nachfüllen vorhandener Spenderboxen.

Zelltupf werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

#### Indikation

Verbandzellstofftupfer können vielseitig verwendet werden – u.a. zur Hautreinigung vor Infusionen und Injektionen, zur lokalen Desinfektion kleiner Wunden vor chirurgischen Eingriffen, als Saugpolster bei kleinen Verletzungen sowie für viele Arbeiten im Laborbereich, in Stomatologie, Medizin, Kosmetik und Fußpflege.

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

**KERMA.de**

#### Lieferform:

##### steril

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Abmessung | Originalpackung                                                            | Versand-<br>einheit     |
|----------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 41455    | 00816948<br>110081694842 | 4cm x 5cm | <b>2 Rollen</b> à 500<br>Stück in Folie<br>(je 1 Rolle im<br>Sterilbeutel) | 12 Packungen/<br>Karton |

##### unsteril

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Abmessung | Originalpackung                         | Versand-<br>einheit     |
|----------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 41451    | 08820263<br>110882026340 | 4cm x 5cm | <b>2 Rollen</b> à 500<br>Stück in Folie | 12 Packungen/<br>Karton |





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### Lieferform:

#### steril

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)             | Ausführung | Originalpackung                                     | Versand-<br>einheit     |
|----------|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 42545    | <b>01743826</b><br>110174382684 | einseitig  | 5 Stück<br>in Klarsicht-Peel-<br>packung/Folie      | 30 Packungen/<br>Karton |
| 42546    | <b>17373478</b><br>111737347854 | einseitig  | 230×5 Stück<br>in Klarsicht-Peel-<br>packung/Karton | Original-<br>packung    |
| 42547    | <b>17265240</b><br>111726524018 | beidseitig | 40×3 Stück<br>in Klarsicht-Peel-<br>packung/ Karton | Original-<br>packung    |

#### unsteril

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)             | Ausführung | Originalpackung               | Versand-<br>einheit  |
|----------|---------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------|
| 42542    | <b>04804586</b><br>110480458621 | einseitig  | 120 Stück<br>in Faltschachtel | Original-<br>packung |
| 42540    | <b>04769447</b><br>110476944759 | beidseitig | 120 Stück<br>in Faltschachtel | Original-<br>packung |

## STIELTUPFER handgefertigt

### Produkt

Mullzuschnitt aus 20-fädigem Verbandmull (Baumwolle, DIN EN 14079 – VM20, Ph.Eur.), der auf ein Ende oder auch auf beide Enden eines Holzstabes (Länge ca. 20cm, Ø ca. 4mm) ca. 7cm lang mit verdeckten Schnittkanten fest gewickelt ist.

Stieltupfer werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

### Indikation

Stieltupfer eignen sich hervorragend zur Wundversorgung, für Abstriche, als Träger für Desinfektionslösungen, zum Desinfizieren und Reinigen von Wunden und Hautpartien sowie zur Reinigung von Geräten im Laborbereich.

Diese vielseitige Verwendbarkeit wird noch durch das Einsatzgebiet „Mundpflege“ erweitert. Mit Wasser oder Tee getränkte Stieltupfer lassen sich zum Wohle des Patienten sehr gut zur Reinigung der Mundhöhle oder zum Benetzen der Lippen verwenden – gerade auch bei Unverträglichkeit von oder Aversion gegen Zitronenstäbchen u.ä.

**KERMA® Verbandstoff GmbH**  
Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen  
Tel. 037207 408-22 und -30  
Fax 037207 408-20  
E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)  
**KERMA.de**



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### SPITZTUPFER handgefertigt

#### Produkt

Spitzstupfer aus hochwertiger Baumwolle werden aus 20-fädigem Verbandmull (DIN EN 14079 – VM20, Ph.Eur.) verschiedener Abmessungen hergestellt. Sie werden in gelegter, gedrehter und gerollter Form produziert.

Spitzstupfer werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

#### Indikation

Spitzstupfer werden u.a. im HNO-Bereich verwendet. Die gedrehten Tupfer sind aufgrund ihrer spitzen Form besonders für Eingriffe am Ohr geeignet, vorzugsweise im Bereich des Gehörgangs.

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen  
Tel. 037207 408-22 und -30  
Fax 037207 408-20  
E-Mail: verkauf@kerma.de  
KERMA.de



42551



42553 / 42561



42557



42558



42563



42570

### Lieferform:

#### steril

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Ausführung                                            | Originalpackung                                                 | Versand-<br>einheit  |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 42561    | 12464590<br>111246459074 | <b>gedreht</b><br>Länge ca. 8cm<br>Breite ca. 0,5cm   | 50 × 10 Stück<br>in Klarsicht-Peel-<br>packung/Karton           | Original-<br>packung |
| 42563    | 17387629<br>111738762972 | <b>gedreht</b><br>Länge ca. 4,5cm<br>Breite ca. 0,5cm | 50 × 10 Stück<br>in Klarsicht-<br>Peelpackung/<br>Faltschachtel | Original-<br>packung |

#### unsteril

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Ausführung                                                                   | Originalpackung                            | Versand-<br>einheit      |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 42551    | 17387612<br>111738761282 | <b>gedreht</b><br>Länge ca. 5cm<br>Breite ca. 0,5cm                          | 20 Stück<br>im Foliebeutel                 | Original-<br>packung     |
| 42553    | 14226050<br>111422605072 | <b>gedreht</b><br>Länge ca. 8cm<br>Breite ca. 0,5cm                          | 50 × 10 Stück<br>im Foliebeutel/<br>Karton | Original-<br>packung     |
| 42558    | 17416035<br>111741603530 | <b>gedreht, mit<br/>Rückholfaden</b><br>Länge ca. 7cm<br>Breite ca. 0,6cm    | 50 Stück<br>in Faltschachtel               | Original-<br>packung     |
| 42557    | 17416029<br>111741602964 | <b>gedreht</b><br>Länge ca. 9cm<br>Breite ca. 0,8cm                          | 25 Stück<br>im Foliebeutel                 | Original-<br>packung     |
| 42570    | 17387635<br>111738763538 | <b>gerollt</b><br>Länge ca. 7cm<br>Breite ca. 1,5cm                          | 50 Stück<br>in Faltschachtel               | Original-<br>packung     |
| 42573    | 17387641<br>111738764104 | <b>gedreht</b><br>Länge ca. 4cm<br>Breite ca. 1cm<br>Mullzuschnitt<br>2-fach | 10 Stück<br>im Foliebeutel                 | 50 Packun-<br>gen/Karton |



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### Lieferform:

| steril   |                          |            |                                                                       |                      |
|----------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Abmessung  | Originalpackung                                                       | Versand-<br>einheit  |
| 42401    | 04046795<br>110404679534 | 6cm x 5 m  | 1 Stück<br>im Sterilbeutel/<br>Spenderfalt-<br>schachtel und<br>Folie | Original-<br>packung |
| 42402    | 04046803<br>110404680328 | 8cm x 5 m  | 1 Stück<br>im Sterilbeutel/<br>Spenderfalt-<br>schachtel und<br>Folie | Original-<br>packung |
| 42403    | 04046826<br>110404682681 | 10cm x 5 m | 1 Stück<br>im Sterilbeutel/<br>Spenderfalt-<br>schachtel und<br>Folie | Original-<br>packung |

## VERBANDMULL- STREIFEN- PACKUNGEN/ TAMPONADE

### Produkt

20-fädiger Verbandmull aus hochwertiger Baumwolle (DIN EN 14079 – VM20, Ph.Eur.) in Streifenform 4-fach gelegt. Die Schnittkanten sind verdeckt, wodurch keine störenden Randfäden auftreten. Streifenpackungen werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und auf Wunsch auch unsteril in verschiedenen Längen und folgenden Breiten angeboten:

- 24cm – 4-fach gelegt auf 6cm
- 32cm – 4-fach gelegt auf 8cm
- 40cm – 4-fach gelegt auf 10cm

Der in Zickzackform gelegte Mullstreifen ist im Sterilbeutel und einer handlichen Spenderfalt-schachtel verpackt, wodurch eine praktische und wirtschaftliche Entnahme garantiert ist. Die Spenderfalt-schachtel ist zusätzlich in Folie eingeschweißt.

### Indikation

Der Verbandmull (Streifenpackung) wird zur allgemeinen Wundversorgung, zum Tamponieren und Reinigen von Wunden aller Art sowie für Salbenverbände verwendet.

**KERMA® Verbandstoff GmbH**  
Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen  
Tel. 037207 408-22 und -30  
Fax 037207 408-20  
E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)  
**KERMA.de**



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### VERBANDMULL- STREIFEN GELEGT handgefertigt

#### Produkt

20-fädiger Verbandmull  
aus Baumwolle (DIN EN  
14079 – VM 20, Ph.Eur.).

Verbandmull-Streifen, gelegt  
werden steril (dampfsterilisiert bei  
134°C) angeboten.

#### Indikation

Die Verbandmull-Streifen  
werden bevorzugt im  
HNO- und Dentalbereich  
verwendet.

#### Lieferform:

| steril   |                                 |                                                                                                                                         |                                                       |                      |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)             | Abmessung                                                                                                                               | Originalpackung                                       | Versand-<br>einheit  |
| 42435    | <b>12464584</b><br>111246458411 | Verbandmull-<br>Streifen,<br>gelegt auf<br>1,5cm × 10cm,<br>Mullzuschnitt:<br>6cm × 23cm<br>mit eingeschla-<br>genen Schnitt-<br>kanten | 50 × 10 Stück<br>in Klarsicht-Peel-<br>packung/Karton | Original-<br>packung |
| 42436    | <b>17250422</b><br>111725042288 | Verbandmull-<br>Streifen gelegt<br>1cm × 4cm<br>mit Festkante                                                                           | 50 × 1 Stück<br>in Klarsicht-Peel-<br>packung/Karton  | Original-<br>packung |



**KERMA® Verbandstoff GmbH**

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

**KERMA.de**



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### WATTETAMPONS handgefertigt

#### Produkt

Wattebausch mit einer Mull-  
umhüllung aus 20-fädigem  
Verbandmull (Baumwolle,  
DIN EN 14079 – VM20 Ph.Eur.),  
durch einen doppelten Faden  
zusammengehalten (Länge  
ca. 20cm), der zusätzlich  
als Rückholfaden fungiert.  
Wattetampons sind in drei ver-  
schiedenen Größen lieferbar:

- **walnussgroß – Ø ca. 4cm,  
Gewicht ca. 2,4g**
- **extragroß – Ø ca. 5cm,  
Gewicht ca. 3,8g**
- **faustgroß – Ø ca. 6cm,  
Gewicht ca. 7,0g**

Wattetampons werden steril  
(dampfsterilisiert bei 134°C) und  
unsteril angeboten.

#### Indikation

Die Wattetampons werden zum  
Tamponieren verschiedener  
Wunden verwendet, vor allem  
im gynäkologischen und  
chirurgischen Bereich.

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

**KERMA.de**

### Lieferform:

#### steril

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)             | Größe                    | Originalpackung                                      | Versand-<br>einheit  |
|----------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| 42502    | <b>04045502</b><br>110404550279 | walnussgroß<br>Ø ca. 4cm | 12 Stück<br>im Sterilbeutel/<br>Faltschachtel        | Original-<br>packung |
| 42508    | <b>16223593</b><br>111622359379 | walnussgroß<br>Ø ca. 4cm | 50 × 1 Stück<br>in Klarsicht-Peel-<br>packung/Karton | Original-<br>packung |
| 42503    | <b>04045519</b><br>110404551969 | extragroß<br>Ø ca. 5cm   | 12 Stück<br>im Sterilbeutel/<br>Faltschachtel        | Original-<br>packung |
| 42504    | <b>10810869</b><br>111081086920 | extragroß<br>Ø ca. 5cm   | 50 × 1 Stück<br>in Klarsicht-Peel-<br>packung/Karton | Original-<br>packung |
| 42500    | <b>16223601</b><br>111622360173 | faustgroß<br>Ø ca. 6cm   | 50 × 1 Stück<br>in Klarsicht-Peel-<br>packung/Karton | Original-<br>packung |

#### unsteril

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)             | Größe                  | Originalpackung                           | Versand-<br>einheit  |
|----------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 42507    | <b>10810875</b><br>111081087583 | faustgroß<br>Ø ca. 6cm | 10 × 5 Stück<br>im Foliebeutel/<br>Karton | Original-<br>packung |



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### VERBANDZELL- STOFFBINDEN ca. 3,50m

#### Produkt

Verbandzellstoffbinden bestehen aus mehrlagigem, sauerstoffgebleichtem Verbandzellstoff und sind mit einer Papierbänderole versehen.

#### Indikation

Verbandzellstoffbinden werden im medizinischen und veterinärmedizinischen Bereich u.a. als Stützverband oder Polstermaterial (auch unter Gipsbinden) sowie in Haushalt, Kosmetik und Fußpflege verwendet.

#### Lieferform:

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Abmessung  | Originalpackung         | Versand-<br>einheit  |
|----------|--------------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| 41301    | 04045844<br>110404584471 | 6cm breit  | 1 Binde<br>in Bänderole | 120 Stück/<br>Karton |
| 41302    | 04045850<br>110404585037 | 8cm breit  | 1 Binde<br>in Bänderole | 100 Stück/<br>Karton |
| 41303    | 04045867<br>110404586727 | 10cm breit | 1 Binde<br>in Bänderole | 90 Stück/<br>Karton  |
| 41304    | 04045873<br>110404587390 | 12cm breit | 1 Binde<br>in Bänderole | 80 Stück/<br>Karton  |
| 41305    | 04045896<br>110404589646 | 15cm breit | 1 Binde<br>in Bänderole | 110 Stück/<br>Karton |
| 41306    | 04045904<br>110404590440 | 18cm breit | 1 Binde<br>in Bänderole | 45 Stück/<br>Karton  |



**KERMA® Verbandstoff GmbH**

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

**KERMA.de**



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### Lieferform:

**unsteril**

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Größe               | Originalpackung     | Versand-<br>einheit  |
|----------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 43360    | 12409987<br>111240998778 | Universal-<br>größe | 5 Stück<br>in Folie | Original-<br>packung |

## NASENVERBAND (Nasenschleuder)

### Produkt

Ein längs- und querelastischer Netzschlauch aus Polyamid mit mittig eingearbeiteter Saugkompressen. Die Kompressen schmiegt sich an der Oberlippe an und hat ein großes Absorptionsvermögen, so dass die aufgenommene Flüssigkeit im Inneren der Kompressen gebunden wird. Durch die eingearbeiteten Ohrenschlaufen ist ein einfaches Anlegen möglich. Die Enden können auch am Hinterkopf verknotet werden. Der Nasenverband kann als Sprechstundenbedarf abgerechnet werden.

### Indikation

Vorzugsweise erfolgt der Einsatz im HNO-Bereich nach Nasenoperationen. Der Nasenverband nimmt dann Blut und Wundsekret auf.

Bei Erkältungskrankheiten kann das Saugkissen mit ätherischen Ölen beträufelt werden, was die Atmung erleichtert. Dies ist auch für Kinder geeignet.

### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

[KERMA.de](http://KERMA.de)



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### AUGENWATTE

#### Produkt

Augenwatte ist eine hochreine Verbandwatte aus 100% Baumwolle, besitzt eine hohe Saugfähigkeit, ist weich, weiß und frei von jeglichen Zusätzen.

Augenwatte wird steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

#### Indikation

Augenwatte ist vielseitig verwendbar. Neben dem medizinischen Bereich u.a. Augenheilkunde, HNO etc., in dem sie zum Beispiel als Polster- oder Saugmaterial sowie für Wattestäbchen benutzt wird, findet sie auch auf technischem Gebiet Anwendung. Aufgrund ihrer Struktur eignet sich die KERMA®-Augenwatte hervorragend zur Reinigung von optischen Oberflächen/ Mikroskopoptiken.

#### Lieferform:

| steril   |                          |       |                                            |                         |
|----------|--------------------------|-------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Masse | Originalpackung                            | Versandereinheit        |
| 42926    | 10071099<br>111007109977 | 10g   | 10g<br>im Sterilbeutel<br>(zickzack)/Folie | 15 Packungen/<br>Karton |

| unsteril |                          |       |                             |                         |
|----------|--------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------|
| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Masse | Originalpackung             | Versandereinheit        |
| 42920    | 04751039<br>110475103961 | 10g   | 10g<br>in Folie (zickzack)  | 50 Packungen/<br>Karton |
| 42921    | 04751045<br>110475104527 | 25g   | 25g<br>in Folie (zickzack)  | 25 Packungen/<br>Karton |
| 42922    | 04751051<br>110475105190 | 50g   | 50g<br>in Folie (zickzack)  | 25 Packungen/<br>Karton |
| 42923    | 04751068<br>110475106880 | 100g  | 100g<br>in Folie (zickzack) | 25 Packungen/<br>Karton |

**KERMA® Verbandstoff GmbH**

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

**KERMA.de**



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### VERBANDWATTE steril

#### Produkt

Verbandwatte ist eine hochreine Watte aus 100% Baumwolle, besitzt eine hohe Saugfähigkeit, ist weich, weiß und frei von jeglichen Zusätzen.

Verbandwatte wird steril (dampfsterilisiert bei 134°C) angeboten.

#### Indikation

Verbandwatte ist vielseitig verwendbar. Im medizinischen Bereich, u.a. in der Augenheilkunde, im HNO- und Dentalbereich, wird sie zum Beispiel als Polster- oder Saugmaterial benutzt.

#### Lieferform:

| steril   |                          |                                                             |                                                                |                         |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Masse /<br>Abmessung                                        | Original-<br>packung                                           | Versandereinheit        |
| 42927    | 12387493<br>111238749333 | 10g                                                         | 10g<br>im Sterilbeutel<br>(zickzack)/Folie                     | 15 Packungen/<br>Karton |
| 42928    | 17250416<br>111725041625 | 5cm × 5cm                                                   | 50 × 1 Stück<br>in Klarsicht-<br>Peelpackung/<br>Faltschachtel | Original-<br>packung    |
| 42929    | 17390376<br>111739037613 | Kugelform,<br>gemischt,<br>10 × ca. 3mm +<br>10 × ca. 5,5mm | 50 × 1 Stück<br>in Klarsicht-<br>Peelpackung/<br>Faltschachtel | Original-<br>packung    |

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

**KERMA.de**



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### VERBANDWATTE – PRESSROLLEN aus 100% Baumwolle

#### Produkt

100% Baumwolle als Vlies  
(ca. 2,2m lang), gerollt und ge-  
presst **mit Papierzwischenlage**.

Die Rolle ist ca. 6cm bzw.  
8cm breit und hat einen  
Durchmesser von 6–7cm.

Verbandwatte in Pressrollenform  
wird unsteril angeboten.

#### Indikation

Die Verbandwatte kann als Saug-  
und Polstermaterial in den Berei-  
chen Medizin und Hygiene,  
aber auch im veterinärmedizinischen  
Bereich verwendet werden.

#### Lieferform:

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Ausführung     | Originalpackung        | Versand-<br>einheit  |
|----------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------------|
| 47903    | 12464561<br>111246456155 | 6cm × ca. 2,2m | 20 Rollen<br>im Karton | Original-<br>packung |
| 47904    | 12464578<br>111246457845 | 8cm × ca. 2,2m | 20 Rollen<br>im Karton | Original-<br>packung |



**KERMA® Verbandstoff GmbH**

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

**KERMA.de**



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### WATTESTIEL- TRÄGER handgefertigt

#### Produkt

Verbandwatteszuschnitt aus 100% Baumwolle, der auf ein Ende eines Holzstabes (Länge 20cm, Ø ca. 4mm) fest gewickelt ist. Der Wattekopf hat einen Durchmesser von ca. 1,5cm und ist ca. 4cm lang.

Wattestielträger werden unsteril angeboten, sind jedoch sterilisierbar.

#### Indikation

Zur Wundversorgung, als Träger für Desinfektionslösungen und Salben, zum Reinigen von Wunden und Hautpartien.

**KERMA® Verbandstoff GmbH**  
Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen  
Tel. 037207 408-22 und -30  
Fax 037207 408-20  
E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)  
**KERMA.de**

#### Lieferform:

| unsteril |                          |                        |                  |                      |
|----------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Ausführung             | Originalpackung  | Versand-<br>einheit  |
| 42951    | 14160836<br>111416083667 | Wattekopf<br>einseitig | 5 Stück in Folie | Original-<br>packung |



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### KRANKEN- UNTERLAGEN Saug- und Schutz- unterlagen

#### Produkt

Die Unterlagen 12-lagig und 8-lagig bestehen aus drei Komponenten:

**Aufliegefläche:** weiches Hygienevlies, feuchtigkeitsdurchlässig

**Saugkörper:** hochsaugfähiger, weicher, 10-lagiger bzw. 6-lagiger Verbandzellstoff

**Wäscheschutz:** dichte, rutschfeste, weiche und undurchlässige Folie

Alle drei Materialien sind beidseitig vernäht und somit fest miteinander verbunden. Krankenunterlagen erleichtern die tägliche Hygiene bettlägeriger Patienten, schützen die Haut vor aggressiver Feuchte und Wundliegen, sind auch ein Schutz für Betttuch und Matratze. Der Lagenzellstoff garantiert ein gleichmäßiges Ableiten der Flüssigkeiten.

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

**KERMA.de**

#### Lieferform:

##### L 10 (Unterlagen 12-lagig)

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)             | Abmessung   | Originalpackung        | Versand-<br>einheit     |
|----------|---------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| 45601    | <b>04082130</b><br>110408213055 | 60cm × 40cm | 10 Stück<br>in Folie   | 9 Packungen/<br>Karton  |
| 45602    | <b>04082147</b><br>110408214745 | 60cm × 60cm | 10 Stück<br>in Folie   | 9 Packungen/<br>Karton  |
| 45603    | <b>04082153</b><br>110408215311 | 60cm × 80cm | 10 Stück<br>in Folie   | 10 Packungen/<br>Karton |
| 45604    | <b>04094601</b><br>110409460107 | 60cm × 90cm | 10 Stück<br>in Folie   | 10 Packungen/<br>Karton |
| 45614    | <b>04094475</b><br>110409447506 | 60cm × 90cm | 100 Stück<br>im Karton | Original-<br>packung    |





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### KRANKEN- UNTERLAGEN Saug- und Schutz- unterlagen

#### Indikation

Die Unterlagen werden unter anderem in der Geriatrie und Inkontinenzpflege, bei nässenden Hauterkrankungen, zur Wochenbettversorgung und als Liegenauflage bei Behandlungen im ambulanten und stationären Bereich verwendet (z.B. bei Darmspiegelungen).

**KERMA® Verbandstoff GmbH**  
Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen  
Tel. 037207 408-22 und -30  
Fax 037207 408-20  
E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)  
**KERMA.de**

| L 6 (Unterlagen 8-lagig) |                                 |             |                        |                        |
|--------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| Art.-Nr.                 | PZN<br>UDI-DI (PPN)             | Abmessung   | Originalpackung        | Versand-<br>einheit    |
| 45621                    | <b>04082242</b><br>110408224296 | 60cm × 40cm | 10 Stück<br>in Folie   | 8 Packungen/<br>Karton |
| 45631                    | <b>04082271</b><br>110408227118 | 60cm × 40cm | 200 Stück<br>im Karton | Original-<br>packung   |
| 45622                    | <b>04082259</b><br>110408225986 | 60cm × 60cm | 10 Stück<br>in Folie   | Original-<br>packung   |
| 45632                    | <b>04082288</b><br>110408228808 | 60cm × 60cm | 100 Stück<br>im Karton | Original-<br>packung   |
| 45624                    | <b>04265480</b><br>110426548057 | 60cm × 90cm | 10 Stück<br>in Folie   | 9 Packungen/<br>Karton |
| 45634                    | <b>04265497</b><br>110426549747 | 60cm × 90cm | 100 Stück<br>im Karton | Original-<br>packung   |
| 45635                    | <b>07259043</b><br>110725904354 | 90cm × 2m   | 5 Stück<br>in Folie    | 5 Packungen/<br>Karton |
| 45636                    | <b>17388617</b><br>111738861748 | 60cm × 2m   | 50 Stück<br>im Karton  | Original-<br>packung   |



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### UNTERLAGE MIT FOLIESCHUTZ Saug- und Schutz- unterlagen

#### Produkt

Die Unterlage mit Folieschutz – 8-lagig – besteht aus einer 6-lagigen Verbandzellstoffeinlage mit einer oberen Lage Hygienevlies und einer unteren Lage Folie und ist beidseitig vernäht.

#### Indikation

Unterlagen mit Folieschutz können als Wäscheschutz, Schutzunterlage, Schutzlätzchen, Schutzkomresse bei nässenden großflächigen Hauterkrankungen u.a. im medizinischen und veterinärmedizinischen Bereich und der Geriatrie verwendet werden. Stoma-Patienten haben mit dieser Unterlage, die sie als Wäscheschutz verwenden, gute Erfahrungen gemacht. Ferner wird sie in der Urologie beispielsweise als Unterlage beim Einsetzen bzw. Entfernen von Kathetern sowie im gynäkologischen Bereich genutzt. Auch nach kleinen chirurgischen Eingriffen wird diese beim Entfernen von Fäden als Unterlage verwendet.

#### Lieferform:

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Abmessung   | Original-<br>packung   | Versand-<br>einheit  |
|----------|--------------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| 45625    | 17390146<br>111739014662 | 25cm × 30cm | 100 Stück<br>im Karton | Original-<br>packung |
| 45626    | 17390152<br>111739015228 | 25cm × 40cm | 100 Stück<br>im Karton | Original-<br>packung |

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

[KERMA.de](http://KERMA.de)





KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### EINMAL-NASEN- SCHLITZTÜCHER

#### Produkt

Nach dem Airlaid-Verfahren hergestellte, weiche und hochsaugfähige Faservliese, jeweils 30cm × 21cm groß, unsteril und mit mittiger Kreuzschlitzstanzung.

#### Indikation

Einmal-Nasenschlitztücher werden vorzugsweise in Physiotherapie-Praxen eingesetzt; speziell auf Behandlungsliegen und -stühlen, deren Kopfteil mit Nasenschlitz ausgestattet ist. Dadurch wird der direkte Kontakt zwischen Patient und Liege vermieden. Einmal-Nasenschlitztücher – hygienisch und praktisch im Gebrauch.

#### Zusatzinformation

Kein Medizinprodukt

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

[KERMA.de](http://KERMA.de)

#### Lieferform:

| Art.-Nr. | PZN      | Abmessung   | Originalpackung       | Versandereinheit        |
|----------|----------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 41700    | 01121102 | 30cm × 21cm | 100 Stück<br>in Folie | 20 Packungen/<br>Karton |



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### VERBAND- ZELLSTOFF- ZUSCHNITTE sauerstoffgebleicht

#### Produkt

Verbandzellstoff-Zuschnitte sind saugfähig, weich, **sauerstoffgebleicht** und somit frei von Krebs erregenden optischen Aufhellern. Sie entsprechen den Anforderungen des DAB.

#### Indikation

Produkte aus Verbandzellstoff sind vielseitig verwendbar im medizinischen Bereich, in Physiotherapie, häuslicher Krankenpflege, im Haushalt, der Kosmetik und Fußpflege.

#### Lieferform:

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Abmessung   | Originalpackung    | Versand-<br>einheit  |
|----------|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| 41221    | 04422809<br>110442280972 | 6cm × 6cm   | 1000g<br>im Karton | Original-<br>packung |
| 41201    | 04422689<br>110442268937 | 6cm × 6cm   | 3kg<br>im Karton   | Original-<br>packung |
| 41222    | 04422815<br>110442281538 | 9cm × 9cm   | 1000g<br>im Karton | Original-<br>packung |
| 41202    | 04422695<br>110442269503 | 9cm × 9cm   | 10kg<br>im Karton  | Original-<br>packung |
| 41224    | 04422821<br>110442282104 | 12cm × 12cm | 1000g<br>im Karton | Original-<br>packung |
| 41204    | 04422703<br>110442270394 | 12cm × 12cm | 10kg<br>im Karton  | Original-<br>packung |
| 41225    | 04422838<br>110442283891 | 12cm × 20cm | 1000g<br>im Karton | Original-<br>packung |
| 41205    | 04422726<br>110442272650 | 12cm × 20cm | 10kg<br>im Karton  | Original-<br>packung |
| 41218    | 07118466<br>110711846604 | 15cm × 15cm | 5kg<br>im Karton   | Original-<br>packung |
| 41206    | 04422732<br>110442273216 | 15cm × 15cm | 10kg<br>im Karton  | Original-<br>packung |
| 41226    | 04422844<br>110442284457 | 15cm × 20cm | 1000g<br>im Karton | Original-<br>packung |
| 41207    | 04422749<br>110442274906 | 15cm × 20cm | 10kg<br>im Karton  | Original-<br>packung |
| 41217    | 07118472<br>110711847267 | 20cm × 20cm | 5kg<br>im Karton   | Original-<br>packung |

**KERMA® Verbandstoff GmbH**

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

**KERMA.de**

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)             | Abmessung   | Originalpackung                                                               | Versand-<br>einheit          |
|----------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 41208    | <b>04422755</b><br>110442275569 | 20cm × 20cm | 10kg<br>im Karton                                                             | Original-<br>packung         |
| 41215    | <b>07266480</b><br>110726648080 | 20cm × 20cm | 10kg<br>im Karton à 1kg<br>unterverpackt in<br>Folie ohne Kenn-<br>zeichnung  | Original-<br>packung         |
| 41227    | <b>04422850</b><br>110442285023 | 20cm × 30cm | 1000g<br>im Karton                                                            | Original-<br>packung         |
| 41209    | <b>04422761</b><br>110442276135 | 20cm × 30cm | 5kg<br>im Karton                                                              | Original-<br>packung         |
| 41211    | <b>04422784</b><br>110442278488 | 30cm × 30cm | 10kg<br>im Karton                                                             | Original-<br>packung         |
| 41228    | <b>04422867</b><br>110442286713 | 30cm × 40cm | 1000g<br>im Karton                                                            | Original-<br>packung         |
| 41212    | <b>04422790</b><br>110442279054 | 30cm × 40cm | 5kg<br>im Karton                                                              | Original-<br>packung         |
| 41213    | <b>01528708</b><br>110152870891 | 30cm × 40cm | 10kg<br>im Karton à 1 kg<br>unterverpackt in<br>Folie ohne Kenn-<br>zeichnung | Original-<br>packung         |
| 41401    | <b>04422873</b><br>110442287376 | 40cm × 60cm | 100g<br>in Folie                                                              | Original-<br>packung         |
| 41402    | <b>04422896</b><br>110442289632 | 40cm × 60cm | 250g<br>in Folie                                                              | Original-<br>packung         |
| 41403    | <b>04422904</b><br>110442290426 | 40cm × 60cm | 500g<br>in Folie                                                              | 15 Packun-<br>gen/<br>Karton |
| 41404    | <b>04422910</b><br>110442291089 | 40cm × 60cm | 1000g<br>in Folie                                                             | 9 Packungen/<br>Karton       |
| 41406    | <b>04782123</b><br>110478212323 | 40cm × 60cm | 5kg<br>in Folie (Ballen)                                                      | Original-<br>packung         |
| 41405    | <b>04422927</b><br>110442292779 | 40cm × 60cm | 10kg<br>in Folie (Ballen)                                                     | Original-<br>packung         |
| 41407    | <b>07588522</b><br>110758852202 | 40cm × 60cm | 3 × 5kg<br>in Folie (Ballen)/<br>Karton                                       | Original-<br>packung         |



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### VERBAND- ZELLSTOFF- ZUSCHNITTE sauerstoffgebleicht

**KERMA® Verbandstoff GmbH**  
Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen  
Tel. 037207 408-22 und -30  
Fax 037207 408-20  
E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)  
**KERMA.de**



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### VERBAND- ZELLSTOFF- WATTEBLÄTTCHEN (Zellwa-Blättchen)

#### Produkt

Verbandzellstoff-Watteblättchen sind saugfähig, weich, **sauerstoffgebleicht** und somit frei von Krebs erregenden optischen Aufhellern. Sie entsprechen den Anforderungen des DAB.

#### Indikation

Verbandzellstoff-Watteblättchen sind auf Grund der kleinen Zugschnittgrößen, der geringen Packungsmenge und der günstigen Aufbewahrung in Faltschachteln in vielen Bereichen der Medizin (auch Stomatologie und Labor), in Kliniken, der häuslichen Krankenpflege sowie der Kosmetik und Fußpflege für eine besonders sparsame, sinnvolle und hygienische Verwendung hervorragend geeignet.



#### Lieferform:

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Abmessung   | Originalpackung          | Versand-<br>einheit     |
|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 41230    | 13819167<br>111381916722 | 6cm x 6cm   | 200g<br>in Faltschachtel | 12 Packungen/<br>Karton |
| 41231    | 04422643<br>110442264328 | 4cm x 6cm   | 500g<br>in Faltschachtel | 14 Packungen/<br>Karton |
| 41232    | 04422666<br>110442266681 | 12cm x 13cm | 300g<br>in Faltschachtel | 21 Packungen/<br>Karton |
| 41233    | 04422672<br>110442267247 | 20cm x 20cm | 300g<br>in Faltschachtel | 25 Packungen/<br>Karton |

**KERMA® Verbandstoff GmbH**

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

**KERMA.de**



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### Lieferform:

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Abmessung   | Originalpackung                                                              | Versand-<br>einheit     |
|----------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 41257    | 17250391<br>111725039141 | 15cm × 15cm | 10kg<br>im Karton                                                            | Original-<br>packung    |
| 41256    | 04096540<br>110409654043 | 20cm × 20cm | 10kg<br>im Karton à 1kg<br>unterverpackt in<br>Folie ohne Kenn-<br>zeichnung | Original-<br>packung    |
| 41255    | 07211616<br>110721161619 | 20cm × 20cm | 5kg<br>im Karton                                                             | Original-<br>packung    |
| 41254    | 07211591<br>110721159135 | 20cm × 30cm | 5kg<br>im Karton                                                             | Original-<br>packung    |
| 41258    | 06708591<br>110670859112 | 20cm × 60cm | 5kg<br>im Karton                                                             | Original-<br>packung    |
| 41253    | 07211585<br>110721158569 | 30cm × 40cm | 5kg<br>im Karton                                                             | Original-<br>packung    |
| 41414    | 00413280<br>110041328077 | 40cm × 60cm | 1000g<br>in Folie                                                            | 12 Packungen/<br>Karton |
| 41252    | 07211579<br>110721157906 | 40cm × 60cm | 5kg<br>in Folie (Ballen)                                                     | Original-<br>packung    |
| 41251    | 07211562<br>110721156216 | 40cm × 60cm | 3 × 5kg<br>in Folie (Ballen)/<br>Karton                                      | Original-<br>packung    |

## ZELLSTOFF- ZUSCHNITTE ungebleicht

### Produkt

Ungebleichte Zellstoffprodukte sind hochsaugfähig und weich.

### Indikation

Ungebleichter Zellstoff wird im medizinischen und veterinärmedizinischen Bereich, in Physiotherapie, Haushalt und überall dort verwendet, wo eine Anwendung von **Verbandzellstoff** nach DAB **nicht** erforderlich ist.

### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

**KERMA.de**



KERMA® Verbandstoff GmbH  
Hainichen

## PRODUKTINFORMATION

### STABILISIERUNGS- UND DRUCK- POLSTERROLLE biegsam

#### Produkt

Hautfreundliches Hygienevlies, beidseitig vernäht mit mehrlagigem sauerstoffgebleichtem, hochsaugfähigem Verbandzellstoff nach DAB, gewickelt um einen biegbaren Plast-Metallstreifen und durch ein hochelastisches, hautfreundliches Netzgewirke zusammengehalten.

Das Produkt wird grundsätzlich steril angeboten und sollte in jedem Verbandskasten, jeder Hausapotheke und Arzttasche vorhanden sein.

#### Indikation

Das Erzeugnis ist geeignet zum Erreichen eines Druckpolster-effektes. Es gewährleistet die Ruhestellung des zu verbindenden Körperteils oder auch des in den Körper eingedrungenen Fremdkörpers. Durch ihre Biegsamkeit ist die „Stabirolle“ gut zur Fixierung von Finger- und Handverletzungen anwendbar. Ihre Polsterung bietet eine hohe Saugfähigkeit und gute Anschmiegsamkeit.

#### Lieferform:

##### steril

| Art.-Nr. | PZN<br>UDI-DI (PPN)      | Abmessung                               | Originalpackung                                | Versand-<br>einheit  |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| 44801    | 08545242<br>110854524245 | Länge ca.<br>20cm, oval,<br>Ø ca. 2,5cm | 1 Stück<br>in Klarsicht-Peel-<br>packung/Folie | Original-<br>packung |

Die Stabilisierungs- und Druckpolsterrolle ist ein steriler medizinischer Unterstützer für die Erste Hilfe.

Sie wurde vom Deutschen Roten Kreuz bei der Notfallrettung getestet und als besonders vorteilhaft eingeschätzt und empfohlen, weil sie u.a. als Sterilgut direkt auf offenen Wunden einsetzbar ist.

#### KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30

Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

[KERMA.de](http://KERMA.de)



Alle Vereinbarungen, Angebote und Lieferungen der KERMA® Verbandstoff GmbH (im folgenden KERMA® genannt) erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Kunden der KERMA® im Sinne dieser AGB sind Unternehmen im Sinne von § 14 BGB. Die AGB gelten nach Anwendung auch für zukünftige Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden werden selbst bei Kenntnis nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird durch KERMA® ausdrücklich zugestimmt.

### 1. ALLGEMEINES / VERTRAGSSCHLUSS

Alle Angebote der KERMA® sind freibleibend und unverbindlich.

Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen (Vertragsangebot).

Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung der KERMA® zustande. Es gelten prinzipiell die in den Auftragsbestätigungen genannten Preise und Liefertermine.

Bei Lieferung ohne schriftliche Auftragsbestätigung gilt die von der KERMA® ausgestellte Rechnung als Auftragsbestätigung.

Der Kunde hat die Auftragsbestätigung sofort auf Richtigkeit zu überprüfen. Den eigenen Anschriftenwechsel hat der Kunde der KERMA® unverzüglich anzuzeigen.

Für vom Kunden gewünschte Änderungen/Sonderanfertigungen übernimmt dieser das Risiko der Eignung für den von ihm vorgesehenen abweichenden Verwendungszweck.

Mündliche Vereinbarungen, Änderungen sowie Ergänzungen eines Vertrages sind nur dann verbindlich, wenn sie von KERMA® schriftlich bestätigt sind.

Für den Export gelten gesonderte Vereinbarungen.

### 2. PREISE

Die in der Auftragsbestätigung genannten Preise werden in Rechnung gestellt. Bei Lieferung ohne schriftliche Auftragsbestätigung werden die am Versandtag gültigen Preise in Rechnung gestellt, sofern nicht ausdrücklich andere Preise vereinbart wurden.

Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

Nebenkosten auf Grund von Sonderwünschen des Käufers gehen zu dessen Lasten und werden gesondert berechnet.

Die Mehrwertsteuer wird am Tage der Lieferung in der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Höhe zusätzlich berechnet.

### 3. LIEFERUNG

#### 3.1. Lieferfrist, Liefermengen

Wenn nicht anders vereinbart, wird eine 7-tägige Lieferfrist – ausgehend vom Auftragseingangsdatum – angestrebt. Nachträgliche Änderungs- und Ergänzungswünsche des Auftraggebers verlängern die Frist angemessen.

Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

Sofern nicht ausdrücklich ausgeschlossen, ist KERMA® zu Teillieferungen berechtigt. Teillieferungen bedeuten nicht Verzug.

KERMA® ist weiter berechtigt, in einer Warenlieferung verschiedene Liefertermine zusammenzufassen. Jede Teillieferung wird als Erledigung eines besonderen Auftrages im Sinne dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen betrachtet.

#### 3.2. Lieferanschrift

Die Lieferung der Ware erfolgt an die vereinbarte Anschrift. Bei nachträglicher Änderung trägt der Käufer alle dadurch entstandenen Mehrkosten. Die Zweitzustellung in Folge des Verschuldens des Käufers kann KERMA® zusätzlich in Rechnung stellen.

### 3.3. NICHTERFÜLLUNG DER LIEFERUNG

KERMA® haftet dem Kunden bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn der Lieferverzug auf einer von ihr zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruht. Beruht der Lieferverzug nicht auf einer von der KERMA® zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung, ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

Ist das Geschäft für beide Teile ein Handelsgeschäft im Sinne des § 343 HGB, steht dem Kunden im Falle einer von KERMA® zu vertretenden Nichteinhaltung eines Liefertermins nach Setzen einer Nachfrist von mindestens sechs Wochen lediglich ein Rücktrittsrecht zu. Weitergehende Rechte, insbesondere Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung, verspäteter Lieferung und sonstige Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie auf einfacher Fahrlässigkeit der KERMA® beruhen.

#### 3.4. Kundenwünsche

Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Kunden verzögert, so lagert KERMA® die Lieferungen und Leistungen auf Kosten und Gefahr des Kunden ein. In diesem Fall steht die Anzeige der Lieferbereitschaft der Übergabe bzw. der Auslieferung gleich.

### 4. ZAHLUNG

#### 4.1. Zahlungsbedingung

Der Rechnungsbetrag ist, sofern keine abweichende schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, innerhalb von 14 Tagen nach dem Rechnungsdatum ohne Abzug zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde automatisch in Zahlungsverzug.

Die Fristen sind eingehalten, wenn das Geld innerhalb des angegebenen Termins bei KERMA® eingegangen ist bzw. bei Bezahlung im Lastschriftverfahren vorbehaltlos gutgeschrieben ist.

KERMA® ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder volle Vorausbezahlung der Lieferung zu verlangen und/oder weitere Lieferungen nur gegen Vorkasse durchzuführen oder von der Stellung einer angemessenen Sicherheit abhängig zu machen, sofern begründete Zweifel über die Zahlungsfähigkeit oder Zahlungswilligkeit des Käufers bestehen.

#### 4.2. Zahlungsverzug

Bei Überschreitung der Zahlungsfrist kann KERMA® schriftlich eine Nachfrist von fünf Tagen setzen und Verzugsschaden geltend machen. Befindet sich der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so ist KERMA® nach Setzen einer 5-tägigen Nachfrist berechtigt, auch von anderen (noch) nicht oder nicht vollständig ausgeführten Verträgen mit dem Kunden zurückzutreten.

Bei Zahlung nach Fälligkeit kann KERMA® Verzugszinsen nach § 288 BGB in Höhe von 9%-Punkten über dem Basiszinssatz im Sinne von § 247 BGB geltend machen.

KERMA® bleibt es vorbehalten, einen zusätzlichen Verzugsschaden geltend zu machen, falls dieser tatsächlich entstanden ist.


### 5. VERSAND

#### 5.1. Lieferbasis

Versandkosten werden gesondert berechnet zu Lasten des Kunden. Mehrkosten bei Express- oder Eilgutsendungen und der Versand ins Ausland gehen zu Lasten des Kunden.

#### 5.2. Gefahrübergang

Mit der Übergabe der Ware an den Paketdienst/Spediteur/Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der

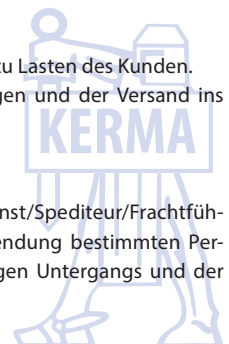

zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über.  
Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde mit der Annahme der Leistung im Verzug ist (siehe Ziffer 3.4.).

### 5.3. Versandeinheit

Die in der Preisliste festgelegten Versandeinheiten sind grundsätzlich verbindlich. D. h. Bestellungen, die von den Verpackungseinheiten zum Zeitpunkt der Lieferung abweichen, werden, wenn nicht anders vereinbart, auf komplette Versandeinheiten nach oben korrigiert.  
Vom Kunden gewünschte Abweichungen zur Versandeinheit sind möglich, können jedoch zu 5% Verpackungskosten vom Nettowarenwert der gelieferten Menge führen.

### 5.4. Verpackung

Bei Sonderwünschen zur Verpackung wird der Mehrbetrag in Rechnung gestellt.  
Mehrwegpaletten und andere Leihverpackungen sind vom Kunden umgehend kostenlos zurückzuliefern.

## 6. EIGENTUMSVORBEHALT

### 6.1.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus Warenlieferungen aus der gesamten Geschäftsverbindung, einschließlich Nebenforderungen, Schadenersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln, Eigentum von KERMA®. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen von KERMA® in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird.

### 6.2.

Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verbunden, vermischt oder verarbeitet, so erfolgt dies für KERMA®, ohne dass diese hieraus verpflichtet wird. Durch die Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung erwirbt der Käufer nicht das Eigentum gem. §§ 947 ff. BGB an der neuen Sache. Bei Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung mit nicht der KERMA® gehörenden Sachen erwirbt KERMA® Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Faktorenwertes der Vorbehaltsware zum Gesamtwert.

### 6.3.

Der Kunde ist zur Weiterveräußerung oder zur Weiterverarbeitung der Vorbehaltsware nur unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bedingungen berechtigt:

- Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb veräußern oder verarbeiten, sofern sich seine Vermögensverhältnisse nicht nachträglich wesentlich verschlechtern.
- Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Kunde bereits jetzt – mit allen Nebenrechten und einschließlich etwaiger Saldoforderungen – sicherheitshalber in Höhe des Rechnungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware an KERMA® ab. KERMA® nimmt diese Abtretung an.
- KERMA® ermächtigt den Kunden widerruflich, die an KERMA® abgetretenen Forderungen für deren Rechnung in eigenem Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt oder bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden.

### 6.4

Übersteigt der Wert der für KERMA® bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 15%, ist KERMA® auf Verlangen des Kunden zur Freigabe von Sicherheiten nach Wahl des Kunden verpflichtet.

### 6.5.

Der Kunde ist verpflichtet, KERMA® von einer Pfändung oder einer sonstigen Beeinträchtigung oder Gefährdung der Vorbehaltsware oder der für KERMA® bestehenden sonstigen Sicherheiten unverzüglich zu benachrichtigen.

### 6.6.

Der Kunde verpflichtet sich, die Vorbehaltsware ausreichend, insbesondere gegen Feuer, Wasser, Sturm, Blitzschlag und Diebstahl zu versichern. Der Kunde tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der obengenannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an KERMA® in Höhe des Faktorenwertes der Ware ab. KERMA® nimmt die Abtretung an.

### 6.7.

KERMA® ist berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht dieses Abschnittes, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen. Für diesen Fall erklärt der Kunde bereits jetzt seine Zustimmung dazu, dass KERMA® die beim Kunden befindliche Vorbehaltsware bzw. – soweit KERMA® alleiniger Eigentümer ist – die neue Sache im Sinne von Ziffer 6.2. dieses Abschnittes wegnehmen bzw. wegnehmen lassen kann. Zur Durchführung dieser Maßnahmen, wie auch zu einer allgemeinen Besichtigung der Vorbehaltsware bzw. neuen Sache, hat der Kunde KERMA® oder von KERMA® beauftragte Personen nach Vorankündigung zu üblichen Zeiten Zutritt zu gewähren.

## 7. GEWÄHRLEISTUNG

### 7.1.

Für Schäden aus unsachgemäßer Lagerung oder Verwendung übernimmt KERMA® keine Haftung.

### 7.2.

Der Kunde hat die gelieferte Ware unverzüglich auf Qualitäts- und Mengenabweichungen zu untersuchen und KERMA® offensichtliche Mängel sofort, spätestens innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Empfang der Ware in Textform anzuzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruches ausgeschlossen. Verdeckte Mängel sind KERMA® innerhalb einer Frist von 7 Tagen ab Entdeckung in Textform anzuzeigen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

### 7.3.


Ist mit dem Kunden eine Abnahme der Ware vereinbart, so gilt die Ware mit erfolgter Abnahme als genehmigt. Weitergehende Mängelansprüche des Kunden sind dann ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen verdeckten Mangel handelt, der auch bei sorgfältiger Untersuchung während der Abnahme nicht erkennbar war.

### 7.4.

Wird eine Teillieferung beanstandet, so ist sie ohne Einfluss auf die Erfüllung des Vertrages und auf weitere Lieferungen.

### 7.5.

KERMA® ist Gelegenheit zu geben, fristgerecht gerügte Mängel zu prüfen. Beanstandete Ware ist auf Verlangen unverzüglich an KERMA® zurückzusenden. Wenn der Kunde diesen Verpflichtungen nicht nachkommt oder ohne schriftliche Zustimmung von KERMA® Änderungen an der bereits beanstandeten Ware vornimmt oder diese weiterveräußert, verliert er etwaige Gewährleistungsansprüche. Ebenso kann KERMA® die Nacherfüllung unbeschadet § 275 Abs. 2 und 3 BGB verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.

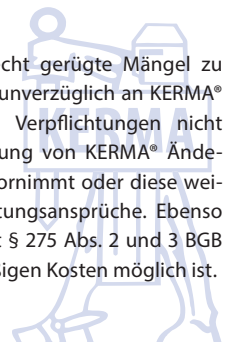

7.6.

Für bestehende Mängel leistet KERMA® nach eigener Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Sollte sich nicht aus der Art der Sache, des Mangels oder sonstigen Umständen etwas anderes ergeben, hat KERMA® nach eigener Wahl mindestens zwei Versuche der Nacherfüllung.

7.7.

Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen.

7.8.

Erklärt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, so steht ihm daneben kein Schadenersatzanspruch wegen des Mangels zu.

Fordert der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadenersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und dem Wert der mangelhaften Sache. Das gilt nicht bei Arglist oder vorsätzlicher Täuschung.

7.9.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab Lieferung der Ware.

7.10.

Eine Gewährleistung besteht nicht für konstruktionsbedingte Mängel bei Sonderanfertigung, die nach der Konstruktionsvorgabe des Kunden hergestellt worden ist.

7.11.

Ebenfalls ist eine Gewährleistung ausgeschlossen für Schäden, die auf natürlichen Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, sowie für branchenübliche technologisch begründete Abweichungen in den Maßen, der Form sowie für nicht behebbare, z.B. in der Natur des Stoffes liegende Farbabweichungen.

7.12.

KERMA® gibt ihren Kunden keine Garantien im Rechtssinne ab. Die Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

## 8. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN

8.1.

Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich die Haftung von KERMA® auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von KERMA®.

Bei der leicht fahrlässigen Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haftet KERMA® nicht. Weitergehende Ansprüche des Kunden gegen KERMA® sind ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadenersatzansprüche wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung. KERMA® haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind. Vor allem haftet KERMA® nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Kunden.

8.2.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet KERMA® – außer in den Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit der gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten – nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

8.3.

Die Haftungsbeschränkung gilt nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern der gelieferten Ware für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Sie gilt auch nicht bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und beim Fehlen von zugesicherten Eigenschaften, wenn und soweit die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Kunden gegen Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind, abzusichern.

8.4.

Soweit die Haftung von KERMA® ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

8.5.

Die gesetzlichen Regelungen zur Beweislast bleiben hiervon unberührt.

## 9. ERFÜLLUNGORT

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Hainichen/Sachsen.

## 10. EIGENTUMS-, URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE

KERMA® behält sich an allen Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen, Fotos, Mustern und sonstigen Unterlagen die Urheber-, Eigentums- und Nutzungsrechte vor. Sie sind auf Verlangen unverzüglich zurückzusenden und dürfen nur mit Zustimmung von KERMA® an Dritte weitergegeben werden.

## 11. ZESSION

11.1. KERMA® ist berechtigt, Forderungen gegenüber dem Kunden an Dritte ohne Einwilligung des Kunden abzutreten.

11.2. Die Abtretung der Forderungen des Kunden gegenüber der KERMA® bedarf ihrer vorherigen schriftlichen Zustimmung.

## 12. SCHLUSSBESTIMMUNGEN


12.1.

Das Vertragsverhältnis unterliegt, auch wenn es sich um Lieferungen ins Ausland handelt, dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

12.2.

Gerichtsstand ist 09661 Hainichen.

Stand 4. Dezember 2023

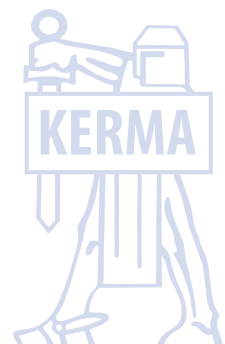



**KERMA® Verbandstoff GmbH**

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen

Tel. 037207 408-22 und -30 | Fax 037207 408-20

E-Mail: [verkauf@kerma.de](mailto:verkauf@kerma.de)

**KERMA.de**