

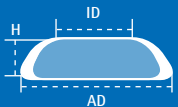
Anwendungshinweise

- Lesen und beachten Sie die Gebrauchsanweisung
- Anwendung nach Anleitung durch medizinisches Fachpersonal
- Max. Anwendungszeitraum mit ärztlicher Kontrolle:
2 bis 3 Zyklen à maximal 29 Tage
- Die Verträglichkeit und Richtigkeit der Pessarlage ist durch
Ultraschall und / oder Befragung der Patientin sicherzustellen.
- Vor jeder Anwendung ist das Produkt auf Unversehrtheit und
Saubерkeit der Oberfläche zu prüfen. Bei Veränderungen der
Oberfläche ist das Pessar durch ein neues zu ersetzen.
- Die Anwendung ist vom Arzt zu dokumentieren
- Alle 1–2 Wochen vom Arzt den pH-Wert kontrollieren
und das Pessar reinigen lassen
- Nicht bei Blasen-, Harnweg-, oder Scheidenentzündung
verwenden
- Medesign-Pessare sind Latexfrei

Ergänzende Produkte

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| • Ladysoft-Gleitgel | erleichtert das Einsetzen des Pessars |
| • Femsoft Intim-Waschlotion | sanfte Reinigung des Intimbereiches |
| • Femsoft Intim-Creme | pflegt und schützt den Intimbereich |

 Verwendbar bis	 Artikelnummer (MED...)
 Chargenbezeichnung	 Achtung
 Herstellungsdatum	 Gebrauchsanweisung beachten
 Hersteller	 CE 0483 CE-Zeichen mit Identifikationsnummer der benannten Stelle

Cerclage-Pessar	Größe	ID	AD	H	Artikel-Nr.
 	• 32 – 65 – 17				MED1000084
	• 32 – 65 – 21				MED1000050
	• 32 – 65 – 25				MED1000086
	• 32 – 70 – 17				MED1000087
	• 32 – 70 – 21				MED1000088
	• 32 – 70 – 25				MED1000089
	• 35 – 65 – 17				MED1000090
	• 35 – 65 – 21				MED1000091
	• 35 – 65 – 25				MED1000092
	• 35 – 65 – 30				MED1000093
	• 35 – 70 – 17				MED1000094
	• 35 – 70 – 21				MED1000095
	• 35 – 70 – 25				MED1000096

ID = Innendurchmesser · AD = Außendurchmesser · H = Höhe
Alle Größenangaben in mm

Inhalt:

- 1 Pessar mit Gebrauchsanweisung
1 Ladysoft Gleitgel mit Gebrauchsanweisung

Haben Sie noch Fragen zur Anwendung oder möchten
uns Ihre Erfahrungen mitteilen, so schreiben Sie uns.

Cerclage-PessarGebrauchsanweisung 

CE 0483

Made in Germany

M E D E S I G N
Dietramszell · Dubai · München

Wozu wird eine Behandlung mit einem Cerclage-Pessar durchgeführt:

Cerclage-Pessare dienen in der Regel dazu, den Muttermund während einer Schwangerschaft zu entlasten. Dies kann dazu beitragen ein drohende Frühgeburt zu verhindern. Cerclage-Pessare kommen deshalb zum Einsatz, wenn Ihr Muttermund verkürzt oder innen geöffnet ist. Außerdem ist die Verwendung eines Cerclage-Pessars anzuraten, wenn:

- Sie bereits eine Frühgeburt hatten, bei der eine Infektion als Ursache ausgeschlossen wurde
- Sie bereits eine Mehrlingsschwangerschaft hinter sich haben
- Sie während der Schwangerschaft erhöhten körperlichen Belastungen (z.B. durch langes Stehen) ausgesetzt sind oder
- die Aktivität des Beckenbodens zu überprüfen
- eine starke Senkung der Gebärmutter vorliegt (schmerzhafter Druck nach unten bei körperlicher Belastung)

Was bewirkt ein Cerclage-Pessar?

Das Cerclage-Pessar stützt den Muttermund weit oben ab und / oder verlagert ihn Richtung Kreuzbein, ohne ihn jedoch zu verschließen. Dies führt zu einer optimalen Druckentlastung.

medesign Cerclage-Pessare werden aus einem speziell für den medizinischen Gebrauch entwickelten, flexiblem und gewebefreundlichen Silikon hergestellt. Die Pessare sind sehr elastisch und lassen sich in gefaltetem Zustand (am besten unter zu Hilfenahme eines Gleitgels wie z.B. Ladysoft) schmerzfrei einführen. Sitzt das Pessar optimal, ist es nicht zu spüren.

Wie läuft die Cerclage-Behandlung ab?

Die Cerclage-Behandlung sollte etwa zwischen der 15. und 20. Schwangerschaftswoche begonnen werden. Die Auswahl der richtigen Größe ist die Voraussetzung für eine optimale Behandlung und Beschwerdefreiheit. medesign Cerclage-Pessare werden in verschiedenen Größen angeboten. Ihr Frauenarzt wird die für Sie richtige Größe ermitteln.

Ihr Arzt wird zunächst mit einer vaginalen Ultraschalluntersuchung (im Liegen oder Stehen) feststellen, ob der innere Muttermund geöffnet oder der Muttermund insgesamt verkürzt ist. Er wird außerdem untersuchen, ob eine Infektion vorliegt.

Das Pessar mit der richtigen Größe wird dann mit der Wölbung nach oben eingeführt. So kann der größere Durchmesser den Muttermund durch das Aufliegen auf dem Kreuzbein und/oder der Beckenbodenmuskulatur abstützen. Das Pessar wird so platziert, dass sich der Muttermund im oberen Ringdurchmesser befindet. Eine geringe Schwellung (Ödembildung) des Gebärmutterhalses kann ein gewünschter Effekt sein. Eventuelle Senkungsbeschwerden sind sofort nach dem Einsetzen behoben. Wird das Cerclage-Pessar mit der Wölbung nach unten eingelegt, kann kein optimaler Abstützeffekt erzielt werden.

Bei weiteren Untersuchungen wird der Frauenarzt immer wieder überprüfen, ob das Pessar den Muttermund nicht zu fest umschließt. Wurde das Pessar wegen Senkungsbeschwerden eingesetzt, kann es bei Beschwerdefreiheit bis zur Entbindung liegen bleiben. Wurde es zur Verhinderung einer drohenden Fehlgeburt eingesetzt, wird es in der 37. Schwangerschaftswoche entfernt. Kontrolle und Wechsel des Pessars nur durch medizinisches Fachpersonal.

Während der Cerclage-Behandlung wird ihr Frauenarzt regelmäßig (alle ein bis zwei Wochen) den pH-Wert Ihrer Scheide kontrollieren und dabei das Pessar in seiner Umgebung reinigen und desinfizieren. Zur unterstützenden Reinigung und Pflege des Intimbereiches verwenden Sie z.B. Femsoft Intim-Waschlotion. Eine speziell entwickelte Waschlotion auf der Basis von Molke und Brennessel mit einem niedrigen pH-Wert (3,8 bis 4).

Was kann ich gegen vermehrten Ausfluss tun?

Eine leicht erhöhte Fluorbildung ist eine häufige Begleiterscheinung bei der Behandlung mit Cerclage-Pessaren. Sie kann durch sorgfältige Intimhygiene verhindert bzw. vermindert werden.

Cerclage-Pessar Größen

Cerclage-Pessare werden nach dem Außerdurchmesser (jeweils 65 oder 70 mm), der Höhe der Wölbung (jeweils 17, 21, 25 oder 30 mm) und dem Innendurchmesser (jeweils 32 oder 35 mm) unterschieden.

Normalerweise genügt bei Einlingsschwangerschaften eine Höhe von 17 oder 25 mm. In frühen Schwangerschaftswochen und / oder bei Senkungsbeschwerden sowie bei Mehrlingsschwangerschaften ist es ratsam, ein höheres Modell zu verwenden (25 oder 30 mm).

Entsorgung

medesign-Pessare sind aus geprüften medizinischem Silikon hergestellt und können im Hausmüll entsorgt werden. Das Silikon ist nicht biologisch Abbaubar, daher sollte es nicht über die Toilette entsorgt werden.



Kontraindikatoren zur Pessaranwendung sind Infektionen von Vagina und Zervix.