



Korsolex® basic

Aldehydhaltiges Desinfektionsmittel zur manuellen Aufbereitung thermolabiler und -stabiler Instrumente.



Produkteigenschaften

- Breites Wirkungsspektrum, inkl. Viruzidie und Sporizidie gegen *C. difficile*
- Hohe Materialverträglichkeit
- RKI-Listung A und B

Anwendungsgebiete

Korsolex® basic^{a)} ist ein aldehyd-basiertes Desinfektionsmittelkonzentrat mit umfassendem Wirkspektrum zur manuellen Aufbereitung von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten, inklusiver flexibler Endoskope.

Geeignet zur Schlussdesinfektion, gemäß RKI.

Anwendung

Grundsätzlich muss vor der Anwendung von Korsolex® basic eine Reinigung, bspw. mit Bodedex® forte^{b)}, zur Entfernung organischer Rückstände erfolgen.

Die Lösung stets mit kaltem Wasser (max. Raumtemperatur) ansetzen

• Tauchbadverfahren

Dosierungsempfehlungen und Einwirkzeiten siehe Tabelle Wirksamkeiten. Alle Oberflächen und Hohlräume müssen vollständig mit Desinfektionslösung benetzt sein.

• Zirkulationsverfahren

Kann für alle gängigen Zirkulationsverfahren, die mit kaltem Wasser arbeiten, eingesetzt werden. Das Konzentrat wird entsprechend den Empfehlungen der Gerätehersteller angeschlossen.

Wirksamkeit	Prüfmethode (geringe Belastung)	Einwirkzeit					
		5 Min.	15 Min.	30 Min.	1 Std.	2 Std.	4 Std.
Bakterien / Pilze							
Bakterizidie / Levurozidie	VAH		2,0 %	1,0 %	1,0 %		
Fungizidie	VAH		3,0 %	2,0 %	1,0 %		
Tuberkulozidie	VAH		5,0 %	3,0 %	1,5 %		
Mykobakterizidie	VAH			3,0 %	2,0 %		
Bakteriensporen							
C. difficile	EN 17126					4,0 %	
Viren							
Begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV)	DVV	1,0 %					
Viruzidie	DVV		1,5 %				
Viruzidie	EN 14476 / EN 17111		2,0 %	1,0 %			
RKI-Listung							
Mittel zur Desinfektion nach behördlicher Anordnung gem. § 18 IfSG	Bereich A – vegetative Bakterien inkl. Mykobakterien, Pilzen und Pilzsporen			4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %
	Bereich B – behüllte und unbehüllte Viren				3,0 %		

Nach der Desinfektion gründlich Abspülen bzw. Wässern und Trocknen der Instrumente. Das Wasser sollte mindestens Trinkwasserqualität besitzen. Vollentsalztes Wasser ist für hochwertiges Instrumentarium empfehlenswert.

Zur Oberflächendesinfektion von nicht einlegbaren Medizinprodukten

Anwendung von Korsolex® basic in Kombination mit dem BODE X-Wipes Safety Pack^{b)} zur Oberflächendesinfektion von nicht einlegbaren Medizinprodukten.

Korsolex® basic



Materialverträglichkeit

Ausgezeichnete Materialverträglichkeit gegenüber Endoskopen sowie besonders geeignet für die Aufbereitung von Instrumentarien aus Gummi, Kunststoff, Metall, Porzellan und Glas.

Mikrobiologie

Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, sporizid gegen *C. difficile*, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), viruzid.

Kompatibilität

Vor dem Einsatz von Korsolex® basic dürfen keine aminhaltigen Desinfektionsmittel verwendet werden, da eine Inkompatibilität besteht.

Zusammensetzung

100 g Konzentrat enthalten:
Glutaral 15,2 g; (Ethylendioxy)dimethanol 19,7 g.

Listung

VAH, RKI, IHO-Desinfektionsmittelliste

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen grüne, klare Flüssigkeit
pH-Wert Konzentrat ca. 4
pH-Wert 2 %ige Lösung ca. 7
pH-Wert 4 %ige Lösung ca. 7
Dichte (20 °C) ca. 1,09 g/cm³

Standzeiten

Die Standzeit der Gebrauchslösung beträgt 1 Tag. Bei Verwendung des BODE X-Wipes Safety Pack beträgt die Standzeit 7 Tage.

Fachberatung

HARTMANN SCIENCE CENTER

Tel: +49 (0) 40 - 54 00 6 -111

E-Mail: science-center@hartmann.info



**Wir forschen für
den Infektionsschutz**
hartmann-science-center.com

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
Korsolex® basic	2 Liter Flasche	980 150	07699871	4
	5 Liter Kanister	980 152	07699888	1

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

(a) 

(b) 



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Deutschland

Tel. +49 (0) 7321-36-0
Fax +49 (0) 7321-36-36
info@hartmann.info
www.hartmann.info

Hersteller: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg
Ein Unternehmen der HARTMANN GRUPPE