

# GÜLDENMOOR



## Natur-Moorkissen

Naturmoor wärmt und kühlt sanft und hilft überall dort wo Wärme bzw. Kälte gut tut. 100 % Naturmoor, fein gemahlen für warme und kalte Anwendungen.



### Anwendung als Wärmekissen:

Kompresse ca. 2 - 3 Minuten in heißes Wasser (80 - 90° C) legen - nicht kochen.  
Vor Gebrauch die Temperatur prüfen!

### Anwendung als Kältekissen:

Kompresse für den schnellen Einsatz ständig im Kühlschrank lagern.



-  **Inhalt:** 150 g    PZN: 9685241
-  **Inhalt:** 500 g    PZN: 9685235



Schloss Neuhaus Goldenmoor GmbH

Birkenweg 9  
37639 Bevern

Tel.: **05531-12148-0**  
Fax: **05531-12148-29**  
Mail: [info@gueldenmoor.de](mailto:info@gueldenmoor.de)

# GÜLDENMOOR