



Kalt-Warm-Kompressen

Ideal für Sport, Freizeit und Beruf, für Fußball und alle anderen Sportarten, bei denen eine schnelle effektive Kühlung von Nöten ist. Unterstützend anwendbar zur lokalen Schmerzbehandlung, Zerrungen, Verstauchungen, Blutergüssen, Krämpfen, Verbrennungen, auch ideal nach der Zahnarztbehandlung.

Vorteile

- Kaltanwendung bis -18°C
- Warmanwendung bis 80°C
- mikrowellengeeignet
- ungiftige Füllung
- stabile Ausführung
- in drei Größen lieferbar

Anwendungsgebiete

- Zahnmedizin
- Orthopädie
- Gynäkologie
- Sportmedizin
- Physiotherapie
- erste Hilfe
- postoperative Therapie



Kältekompressen nicht anwenden bei: arteriellen Durchblutungsstörungen, Raynaud-Syndrom

Anwendung Kältekompressen: In den Gefrierfach oder Kühltruhe (bis -18°C) für ca. 2 Std. legen- danach gebrauchsfertig.

Die Kompressen vor dem Auflegen in ein dünnes Tuch o.ä. einschlagen.

Anwendung Wärmekompressen: Kompressen ca. 4 Minuten in heißes Wasser bis + 80°C legen, danach gebrauchsfertig. Die Kompressen vor dem Auflegen in ein dünnes Tuch einschlagen.

Mikrowelle: max. 45 sek. bei 280W

Erhältlich als 8 x 13 cm, 13 x 14 cm und 12 x 29 cm-

MVK Pharma GmbH - Herrlinghausen 3 - 42929 Wermelskirchen - Tel: 02196/97588-0