





MaiMed® – MyClean DS OA

Produktbeschreibung	Gebrauchsfertiges, alkoholfreie Lösung zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen.						
Anwendung	Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen vollständig mit Mai-Med® MyClean DS OA benetzen und die Desinfektionslösung ggf. mit einem hygienisch, sauberen Einmaltuch verteilen. Dabei die Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen. Nur für den professionellen Gebrauch						
Auszeichnungen							
Ausführungen	Artikelbeschreibung	Duft	Inhalt	Artikelnummer	GTIN	PZN	VE
	Schnelldesinfektion ohne Alkohol	Neutral	500 ml	79712	4046153136896	18844218	18 Flaschen
	Schnelldesinfektion ohne Alkohol	Neutral	1 l	79613	4046153116164	10305769	12 Flaschen
	Schnelldesinfektion ohne Alkohol	Neutral	5 l	79711	4046153126217	15397776	2 Kanister
	Schnelldesinfektion ohne Alkohol	Neutral	10 l	79614	4046153116188	10305781	1 Kanister
Einwirkzeiten	Wirksamkeit	Belastung	Normen	Einwirkzeiten			
	Bakterizid (mit Mechanik)	hohe Belastung	EN 13727, EN 16615*	1 Minute (VAH 5 Minuten)			
	Bakterizid (ohne Mechanik)	hohe Belastung	EN 13727, EN 1276***, EN13697	1 Minute			
	Levurozid (mit Mechanik)	hohe Belastung	EN 13624, EN 16615*	1 Minute (VAH 5 Minuten)			
	Levurozid (ohne Mechanik)	hohe Belastung	EN 13624, EN1650***, EN 13697	1 Minute			
	Tuberkulozid (M. terrae)	hohe Belastung	EN 14348	1 Stunde**			
	Begrenzt viruzid (Modified Vaccinia Ankara)	hohe Belastung	EN 14476	1 Minute			
	Begrenzt viruzid PLUS (- Adenovirus Typ 5) (- Murines Norovirus)	niedrige Belastung	EN 14476	1 Stunde**			
	*an der Tränklösung getestet, **nicht für patientennahe Oberflächen, ***Lebensmittelbereich						
Zusammensetzung	In 100 g Lösung sind enthalten: Wirkstoffe: 0,35 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid; 0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin; 0,1 g 2-Phenoxyethanol.						
Chemisch-physikalische Daten	Dichte	Aussehen	Flammpunkt	pH-Wert	Viskosität		
	nicht verfügbar	flüssig	> 100 °C	7–9	nicht verfügbar		
Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung	H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103: Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P501: Inhalt, Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle zuführen.						



MaiMed® – MyClean DS OA

Qualitätssicherung	EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 Medizinproduktklasse IIa Desinfektionsprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. VAH Biozid BAuA - Registrierungsnummer: N-114461 UFI: 3TU0-305F-9009-7QW2
Verwendbarkeit	3 Jahre / 12 Monate haltbar nach Anbruch. Gebinde nach dem Gebrauch sorgfältig verschließen.
Symbole	  0482 