
Gebrauchsanweisung

Hyaluron-ratiopharm® Augentropfen ***Befeuchtende Augentropfen***

Natriumhyaluronat 1 mg/ml, steril, ohne Konservierungsmittel

Zusammensetzung:

Natriumhyaluronat 1 mg/ml, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Dinatriumhydrogenphosphat Dodecahydrat, Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat, Magnesiumchlorid Hexahydrat, Calciumchlorid Dihydrat, Natriumhydrogencarbonat, Aqua Purificata

Indikation und klinischer Nutzen:

Zur Befeuchtung der Augenoberfläche bei trockenen, müden, gereizten, überanstrengten oder brennenden Augen aufgrund des trockenen Augen Syndroms und Umweltfaktoren (z.B. Medikamente, Umweltverschmutzung, Computernutzung, Klimaanlage, Allergie, Benetzung von Kontaktlinsen während des Tragens) sowie nach operativen Eingriffen am Auge.

Hyaluron-ratiopharm® Augentropfen machen das Tragen von Kontaktlinsen angenehmer.

Leistungsmerkmale:

Konservierungsmittelfreie wässrige Lösung auf Basis von Hyaluronsäure und Elektrolyten versorgt das Auge mit Feuchtigkeit.

Gegenanzeigen und Vorsichtsmaßnahmen:

Nicht anwenden bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

Falls Sie zusätzlich Augentropfen/Augensalben verwenden, sollte ein zeitlicher Abstand von 30 Minuten eingehalten werden.

Falls die Beschwerden bestehen bleiben oder sich verschlechtern, suchen Sie medizinischen Rat.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hinweise:

Unmittelbar nach der Anwendung kann die Sehschärfe kurzfristig beeinträchtigt sein.

In sehr seltenen Fällen wurde von Hornhautkalzifizierungen in Zusammenhang mit der Anwendung von Augentropfen mit erhöhter Phosphatkonzentration bei Patienten mit erheblich beschädigter Hornhaut berichtet. Hyaluron-ratiopharm® Augentropfen enthalten lediglich die physiologische Phosphatkonzentration, so dass Ihre Anwendbarkeit auch bei bestehenden stärkeren Hornhautstörungen/-schädigungen grundsätzlich nicht eingeschränkt ist. Sofern zusätzlich weitere Augentropfen-Präparate angewendet werden, sollte in diesem Zusammenhang aber auf deren Phosphatgehalt geachtet werden, da insbesondere bei Antiglaukomatosa oder Antiallergika erhöhte Phosphatkonzentrationen enthalten sein können.

Anwendung:

1. Vor dem ersten Gebrauch Originalitätsverschluss entfernen (Abb. 1).
2. Vor jedem Gebrauch die Kappe abnehmen und nach der Anwendung wieder aufsetzen (Abb. 2). Vermeiden Sie jeden Kontakt mit der Tropferspitze.
3. Den Kopf etwas nach hinten neigen und die Flasche mit der Tropferöffnung senkrecht nach unten über das Auge halten (Abb. 3).
4. Das Auge vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger öffnen oder das Unterlid leicht nach unten ziehen (Abb. 4).
5. Durch leichtes Drücken auf die Mitte der Flasche werden 1-2 Tropfen auf die Augenoberfläche oder in den Bindehautsack eingebracht (Abb. 4).

Im Allgemeinen empfiehlt sich eine 4-mal tägliche Anwendung. Bei stärkeren Beschwerden können die Augentropfen bedenkenlos häufiger angewendet werden.

Eine Überdosierung ist aufgrund der Anwendungsart und der Zusammensetzung nicht möglich.

Hyaluron-ratiopharm® Augentropfen können während des Tragens von harten oder weichen Kontaktlinsen verwendet werden.

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

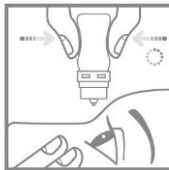
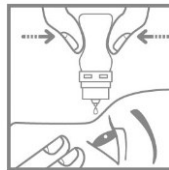


Abb. 4

**Nebenwirkungen:**

In sehr seltenen Fällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen, die nach Beendigung der Anwendung rasch und folgenlos abklingen.

Falls eine schwerwiegende, unerwünschte Reaktion im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt auftreten sollte, melden Sie dies bitte dem Hersteller oder der zuständigen Behörde.

Haltbarkeit, Aufbewahrung und Entsorgung:

Empfohlene Lagerbedingung: Raumtemperatur, nicht einfrieren.

Nach Anbruch 6 Monate verwendbar.

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Entsorgung entsprechend lokaler Vorgaben.

Stand der Information: 2022-09

Symbolerklärung

Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten



Nicht verwenden wenn die Flasche beschädigt ist



Nach Anbruch 6 Monate verwendbar



Chargen-Nummer



Verfallsdatum (JJJJ-MM: Jahr - Monat)



Herstellungsdatum (JJJJ-MM: Jahr – Monat)



Sterilisiert mit aseptischen Verfahren



Bevollmächtigter in der Europäischen Union



Medizinprodukt

C€0482



Optima Medical Swiss AG
Bundesstrasse 7
6300 Zug
Schweiz



Optima Sanità S.r.l.
Viale della Stazione 5
39100 Bolzano (BZ)
Italien

Importeur :
Optima Pharmazeutische GmbH
Ludwigstr. 49
85399 Hallbergmoos
Deutschland

Vertrieb:
ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm

Versionscode Z07