

# ALLEVYN® Schaumverband haftend



HAFTEND



MÄSSIG



BIS ZU 7 TAGE

**Smith+Nephew**

## ALLEVYN® Schaumverband haftend

Haftender hydrozellulärer Schaumverband

### Produktbeschreibung

Die dreilagige Konstruktion von ALLEVYN® Schaumverband haftend kombiniert ein absorbierendes hydrozelluläres Wundkissen mit einer perforierten, haftenden Wundkontaktschicht und einer atmungsaktiven, wasserdichten Außenfolie, die eine bakterielle Kontamination der Wunde verhindert.

### Wirkweise

Die dreilagige Konstruktion von ALLEVYN Schaumverband haftend ermöglicht ein dynamisches Flüssigkeitsmanagement, das ein feuchtes Wundheilungsmilieu schafft und zur Heilung beiträgt und das Risiko einer Mazeration reduzieren kann. Die Außenfolie hilft, das Eindringen von Flüssigkeit und Bakterien zu verhindern. Der Verband kann an Ort und Stelle verbleiben, ohne dass eine sekundäre Fixierung erforderlich ist, und ist sowohl leicht anzulegen als auch zu entfernen.

### Indikationen

Wundbehandlung mit sekundärer Wundheilung bei flachen, granulierenden Wunden, chronischen und akuten exsudierenden Wunden, mehr oder weniger tiefen Wunden, einschließlich Druckgeschwüren, Beingeschwüren, diabetischen Fußgeschwüren, malignen Wunden, Operationswunden, Entnahmestellen und exulzierende Wunden.

### Vorsichtsmaßnahmen

- ALLEVYN Schaumverband haftend nicht mit Oxidationsmitteln wie Hypochloritlösungen (z. B. EUSOL) oder Wasserstoffperoxid verwenden, da diese die Saugfähigkeit des Verbandes verringern können.
- Wie bei allen haftenden Produkten kann in einigen Fällen eine Reizung und/oder Mazeration der Haut um die Wunde beobachtet werden. In seltenen Fällen wurde über eine Empfindlichkeit gegenüber dem Verband berichtet. Wenn Hautrötungen oder Zeichen einer Sensibilisierung auftreten, stellen Sie die Anwendung ein und konsultieren Sie das medizinische Fachpersonal.
- Der unsachgemäße Gebrauch oder ein zu häufiger Verbandwechsel, insbesondere bei Patienten mit empfindlicher Haut, kann zum Abreißen der Haut führen.
- ALLEVYN Schaumverband haftend ist ein Produkt zum Einmalgebrauch. Eine Verwendung bei mehr als einem Patienten kann Kreuzkontamination oder Infektionen zur Folge haben und der Verband kann unwirksam sein. Das Öffnen der Verpackung des Verbandes gefährdet die sterile Barriere. Deshalb sollte der unbenutzte Verband nicht zur späteren Anwendung aufbewahrt werden.
- Bei Verwendung auf infizierten Wunden sollte die Infektion gemäß dem lokalen klinischen Protokoll behandelt werden.

ALLEVYN Schaumverband haftend ist für den Gebrauch durch medizinisches Fachpersonal und für die Verwendung durch Patienten unter Anleitung von medizinischem Fachpersonal bestimmt.

### Gebrauchsanweisung

1. Reinigen Sie die Wunde gemäß lokaler klinischer Protokolle.
2. Die Haut um den Wundbereich vorbereiten und reinigen und überschüssige Feuchtigkeit entfernen. Übermäßiger Haarwuchs sollte gekürzt werden, um eine enge Annäherung an die Wunde zu gewährleisten.

3. Geeignete Verbandgröße auswählen. ALLEVYN Schaumverband haftend kann für schwierige Bereiche zugeschnitten werden. Wenden Sie beim Schneiden des Verbandes immer eine saubere Technik an.
4. Ziehen Sie mit einer sauberen Technik eine der Schutzfolien von ALLEVYN Schaumverband haftend ab und bringen Sie den haftenden Teil des Verbandes auf die Haut auf.
5. Entfernen Sie die restliche Schutzfolie und legen Sie den Verband ohne Dehnung auf den Rest der Wunde, um sicherzustellen, dass es keine Falten gibt. Die Wundauflage des Verbandes muss über die gesamte Oberfläche der Wunde appliziert werden.
6. Falls der Verband zugeschnitten wurde, ist sicherzustellen, dass alle exponierten Schaumbereiche mit einem geeigneten Folienvorverband bedeckt sind, wobei darauf zu achten ist, dass nicht der gesamte Verband bedeckt wird. Das Zuschneiden des Verbandes beeinträchtigt die Bakterienbarriere und die durchfesten Eigenschaften des Verbandes.
7. Beim Anlegen von ALLEVYN Sacrum das schmale Ende des Verbandes mindestens 2 cm über dem analen Schließmuskel platzieren und dann den Verband über dem Sakrum glattstreichen.
8. ALLEVYN Schaumverband haftend kann in Verbindung mit INTRASITE® Gel für nekrotische oder schorfige Wunden verwendet werden.

### Häufigkeit des Verbandwechsels

In den frühen Phasen des Wundmanagements sollte ALLEVYN Schaumverband haftend, wo klinisch erforderlich, kontrolliert werden. Wenn das Produkt auf infizierten Wunden verwendet wird, sollte die Infektion untersucht und gemäß den Vorschriften der betreffenden Klinik behandelt werden. Verbände können je nach Zustand der Wunde und der umliegenden Haut bis zu 7 Tage lang angelegt bleiben, bzw. bis das Exsudat sichtbar wird und sich auf weniger als 0,5 cm an den Rand des Wundkisses annähert (je nachdem, was zuerst eintritt). Wenn Verbände im Sakralbereich angelegt werden, können sie bis zu 5 Tage lang belassen werden. Aufgrund des erhöhten Kontaminations- und Infektionspotenzials in diesem Bereich kann jedoch eine verstärkte Überwachung der Haftung des Verbandes erforderlich sein, wo klinisch erforderlich. Die Entscheidung zum Verbandwechsel sollte anhand der klinischen Beurteilung erfolgen und lokale Protokolle sollten ebenfalls berücksichtigt werden.

### Entfernung

Zur Entfernung von ALLEVYN Schaumverband haftend eine Ecke anheben und bis zur vollständigen Entfernung langsam von der Wunde abziehen. Sakralverbände sollten von der Oberkante zum Anus hin entfernt werden, um das Risiko einer fäkalen Kontamination zu minimieren. Gemäß den örtlichen Klinikprotokollen entsorgen oder auf hygienische Weise nach der Verwendung entsorgen.

Die Skala\* auf dem Beutel dient nur als Orientierungshilfe, um die Auswahl des Verbandes zu erleichtern, und es sollte darauf geachtet werden, eine Kreuzkontamination zu vermeiden.

Sollten Sie bei der Verwendung dieses Produkts den Eindruck haben, dass ein schwerwiegender Vorfall aufgetreten ist, wenden Sie sich bitte an den Hersteller und Ihre zuständige Behörde  
Complaints@Smith-Nephew.com

# ALLEVYN<sup>®</sup> Schaumverband haftend



**Smith+Nephew**

## Produktsortiment

Best.-Nr.	Größe	Stck/Pkg.	PZN
66801111	7 cm x 8 cm	12 Stück	09686542
66801112	12 cm x 13 cm	12 Stück	09686559
66801113	13 cm x 22 cm	12 Stück	09686565
66801114	17 cm x 18 cm	12 Stück	09686571
66801115	22 cm x 23 cm	12 Stück	09686588
66801140	7 cm x 8 cm	20 Stück	nur Krankenhaus
66801141	12 cm x 13 cm	20 Stück	nur Krankenhaus
66801142	13 cm x 22 cm	20 Stück	nur Krankenhaus
66801143	17 cm x 18 cm	20 Stück	nur Krankenhaus
66801144	22 cm x 23 cm	20 Stück	nur Krankenhaus
66012593	ALLEVYN Sacrum, 17 x 17 cm	10 Stück 10	

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN England

®Marke von Smith+Nephew. ©Smith+Nephew 2023

Ausgabedatum 09/2023. Änderung 01

[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)

Dieses Produkt unterliegt eventuell einem oder mehreren US-Patenten.

[www.smith-nephew.com/patents](http://www.smith-nephew.com/patents)



Smith & Nephew Operations B.V. Bloemlaan 2, 2132 NP Hoofddorp, Netherlands

**STERILE R**



25°C/  
77°F

Bei beschädigter  
Verpackung nicht  
verwenden



Grüner  
Punkt



10601857 39962