

SYMBIOINFEKT SL FLEX 5X5CM

SYMBIOINFEKT Silverlon flex 5x5 cm

PZN: 11601665

Inhalt: 5 St

Hersteller: L+F Medizinprodukte GmbH

Zweckbestimmung

Silverlon Wundkontaktverbände sind sterile, einlagige, nicht-adhäsive, antimikrobielle Barriereverbände, die zur topischen Anwendung bei der Wundversorgung und Unterdruck-Wundtherapie (NPWT) bestimmt sind, um das Risiko einer Wundinfektion zu vermindern. Der Silverlon Wundkontaktverband enthält Silber, welches eine zusätzliche lokale antimikrobielle Wirkung besitzt, um das Risiko einer Wundinfektion durch silberempfindliche Organismen zu verringern. Ionisches Silber ist ein Breitbandantibiotikum mit nachgewiesener Wirksamkeit gegen verschiedene Erreger, die mit Wundinfektionen in Zusammenhang stehen. Silverlon Verbände wurden in vitro geprüft und für wirksam unter anderem für folgende Mikroorganismen befunden: *Enterococcus faecalis*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter Baumannii*, *Enterobacter cloacae*, *Staphylococcus epidermis* und *Klebsiella pneumoniae*. Durch in-Vivo-Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass Silverlon Verbände MRT-kompatibel sind. Indikationen: Der Silverlon Wundkontaktverband ist ein Wundverband der für die Wundversorgung sowie in Kombination mit der Unterdruck-Wundtherapie (NPWT) zur lokalen Versorgung durch eine medizinische Fachkraft von folgenden Wunden bestimmt ist: Verbrennungen 1. und 2. Grades, Wunden an Hautentnahme- und Transplantationsstellen, diabetische, dekubitale und venöse Ulzera, traumatische und chirurgische Wunden und infizierte Wunden. Der Silverlon Wundkontaktverband kann auf den oben aufgeführten infizierten Wundtypen verwendet werden. Bei der Anwendung auf infizierten Wunden muss die Infektion gemäß dem örtlichen klinischen Protokoll behandelt werden. Der Silverlon Wundkontaktverband eignet sich für eine Wundkontaktzeit (d. h. bei Behandlungen, bei denen einzelnen Verbände aufeinander folgend angewendet werden) von bis zu insgesamt 30 Tagen. Kontraindikationen: Der Silverlon Wundkontaktverband sollte bei Patienten mit bekannter Empfindlichkeit gegen Silber oder Nylon nicht angewendet werden. Der Silverlon Wundkontaktverband ist nicht für die Behandlung von Verbrennungen 3. Grades bestimmt.

Zusammensetzung

5x Silberbeschichteter Wundverband aus Nylon