

HAUTRISSE



Gebrauchsfertiges Flüssigpflaster zur Behandlung von Hautrissen, Fissuren und Schrunden an den Händen und Füßen.

• Gebrauchsanweisung:

Bei Personen unter 16 Jahren muss die Anwendung durch einen Erwachsenen erfolgen. Den Filmverband mit Hilfe des Spatels auftragen und verteilen, so dass die Wunde gleichmäßig bedeckt wird.

Einige Sekunden trocknen lassen. Den Vorgang 2 bis 3 Mal täglich wiederholen, bis es zur vollständigen Wundheilung gekommen ist.

Nach Gebrauch gut verschließen.

Bei Bedarf kann der Film entfernt werden; dazu genügt es, einen Tropfen auf den bereits gebildeten Film zu geben, und anschließend sofort mit einer trockenen Kompresse abzuwischen.

Die Zusammensetzung des Produktes erspart die Reinigung des Spatels nach dessen Gebrauch.

Nach dem Öffnen innerhalb von 6 Monaten aufzubrauchen.

• Zusammensetzung:

Weizenkeimöl, Nitrocellulose, Isopropanol, Ethylacetat, Ethanol, Hydroxypropylcellulose, Rizinusöl.

• Gegenanzeigen:

Nicht auftragen auf:

- infizierten Wunden, Pilzinfektionen, Verbrennungen und blutenden Wunden
- Schleimhäuten (besonders Lippen)

Wegen fehlender Studien während Schwangerschaft und Stillzeit wird der Gebrauch des Produktes in dieser Zeit nicht empfohlen.

• Vorsichtsmaßnahmen:

Ausschließlich auf der Haut anwenden. Produkt nur durch Erwachsene auftragen lassen. Nur auf kleinen Wunden anwenden. Keine Anwendung für Kinder unter 3 Jahren. Während der Anwendung, vor vollständigem Trocknen des Produktes, oder in der Nähe des offenen Fläschchen nicht rauchen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Kann beim Auftragen brennen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Nicht schlucken. Kontakt mit den Augen vermeiden. Reizt die Augen. Das Produkt kann nach vorheriger Rücksprache mit einem Arzt von Diabetikern verwendet werden. Im Falle von schwerwiegenden Ereignissen oder einer Gesundheitsgefährdung wenden Sie sich bitte an: kontaktindeutschland@urgo.de
Für alle anderen Fragen oder Rückmeldungen wenden Sie sich bitte an: contact@urgo.fr

• Aufbewahrung:

Nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Von Flammen oder Zündquellen fernhalten. Bei Raumtemperatur unter 25°C aufbewahren. Medizinprodukt. CE-Kennzeichnung angebracht: 2017 - Letzte Prüfung der Packungsbeilage: 09-2023

• Was sind Hautrisse?

Hautrisse sind mehr oder weniger tiefe Risse in der Hautoberfläche, hervorgerufen durch Trockenheit oder Verdickung der Hornhaut. Die Bildung von Hautrissen wird vorwiegend durch Hitze, Kälte, aggressive Reinigungsmittel oder durch Reibung hervorgerufen.


• Wie wirkt URGO HAUTRISSE?

Die Formel schafft eine für die Wundheilung günstige Umgebung. Nach dem Auftragen auf die Haut bildet sich ein transparenter und flexibler Schutzfilm, der:

- vor äußeren Einflüssen SCHÜTZT
- den Hautriss auffüllt und ein erneutes Aufbrechen VERHINDERT
- SCHMERZLINDERND IST
- WUNDHEILUNGSFÖRDERND IST
- WASSERFEST IST

 Laboratoires URGO HEALTHCARE - 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - Frankreich

 Laboratoires URGO HEALTHCARE - 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - Frankreich

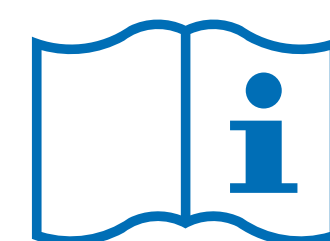

CE 0459



Leicht entzündlich