

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, sie enthält wichtige Informationen über die Anwendung dieses Produkts. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Apotheker, Arzt oder Augenspezialisten oder setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung.

BAUSCH + LOMB

Artelac™ Complete MDO®

0,24 % Natriumhyaluronat, Carbomer, Glycerol, Lipidkomponente (mittelkettige Triglyceride), Natriumhydroxid und Wasser für Injektionszwecke

Verwendungszweck: Augenbefeuchtung

Was ist Artelac® Complete MDO®?

Artelac® Complete MDO® ist eine milchige Augentropfenlösung, die 0,24 % Hyaluronsäure (als Natriumhyaluronat), Carbomer, Glycerol, eine Lipidkomponente (mittelkettige Triglyceride), Natriumhydroxid und Wasser für Injektionszwecke enthält. Die innovative Formulierung weist eine sehr gute Verträglichkeit auf, da sie frei von Konservierungsstoffen und Puffern ist. Nach dem ersten Öffnen kann das Produkt 6 Monate verwendet werden.

Wofür wird Artelac® Complete MDO® angewendet?

Artelac® Complete MDO® ist ein Augenbefeuchtungsmittel, das alle drei Schichten des Tränenfilms ergänzt, um die Befeuchtung der Augenoberfläche bei Trockenheitsgefühl zu verbessern.

Wann sollten Sie Artelac® Complete MDO® anwenden?


Artelac® Complete MDO® enthält den natürlichen Feuchtigkeitsspender Hyaluronsäure (als Natriumhyaluronat), der in den Strukturen eines gesunden menschlichen Auges und des natürlichen Tränenfilm vorkommt, sowie zwei weitere Feuchtigkeitsspender: Glycerol und Carbomer. Daneben enthält Artelac® Complete MDO® zusätzlich eine Lipidkomponente und ergänzt somit alle drei Schichten des Tränenfilms: die Lipidschicht, die wässrige Schicht und die Muzinschicht. Artelac® Complete MDO® ist so konzipiert, dass es auf der Augenoberfläche verbleibt und intensive Feuchtigkeit spendet, um Symptome sofort und langanhaltend zu lindern. Das Produkt eignet sich für alle, die unter verschiedenen Symptomen von trockenen Augen leiden, wie z. B. müde, gestresste, gereizte, brennende und/oder tränende Augen.

Wie oft und wie lange sollte Artelac® Complete MDO® angewendet werden?

Geben Sie nach Bedarf einen Tropfen Artelac® Complete MDO® ins Auge. Sie können die Tropfen täglich und so oft anwenden, wie Sie möchten. Die Anwendungsdauer ist nicht begrenzt.

Wie ist Artelac® Complete MDO® anzuwenden?

Durch den patentierten Pumpmechanismus von Artelac® Complete MDO® benötigt die Augentropfenlösung keine Konservierungsstoffe.
Allgemeiner Hinweis: Waschen Sie sich vor jeder Anwendung die Hände. Vermeiden Sie den Kontakt der Flaschenspitze mit Ihren Fingern oder Augen, um eine mögliche Verunreinigung der Lösung oder Augenverletzungen zu verhindern.

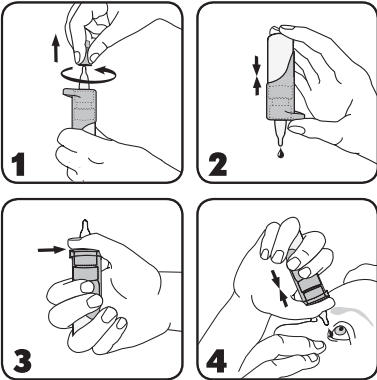

1. Entfernen Sie vor jedem Gebrauch die transparente weiße Schutzkappe mit einer Drehbewegung von der Flaschenspitze.
2. **Achtung! Vor der ersten Anwendung oder wenn die Flasche einige Zeit lang nicht verwendet wurde:** Richten Sie die Flasche mit der Spitze nach unten und drücken Sie wiederholt auf den Pumpmechanismus, bis ein Tropfen freigesetzt wird.
3. Halten Sie die Flasche wie gezeigt: Legen Sie Ihren Daumen auf die ergonomische Daumenauflege- und umschließen Sie den unteren Teil mit Ihren Fingern. Zwei Finger sollten am Flaschenboden platziert werden.
4. Halten Sie die Flasche mit der Spitze nach unten. Lehnen Sie Ihren Kopf leicht zurück. Ziehen Sie das untere Augenlid mit einem Finger der freien Hand sanft nach unten und halten Sie die Flasche wie abgebildet senkrecht über Ihre Augen. Drücken Sie den Pumpmechanismus behutsam zusammen, um einen Tropfen in das Auge einzutropfen. Schließen Sie danach Ihr Auge und blinzeln Sie, um den Tropfen optimal auf der Augenoberfläche zu verteilen. Schütteln Sie sofort nach dem Gebrauch eventuelle Resttropfen ab und setzen Sie die transparente weiße Schutzkappe wieder auf die Flaschenspitze.

Aufgrund des Flaschendesigns verbleibt eine kleine Menge Lösung in der Flasche. Das angegebene Füllvolumen kann jedoch vollständig aus der Flasche entnommen werden.

Wann sollte Artelac® Complete MDO® nicht angewendet werden?

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe empfindlich reagieren.

Wichtige Informationen zur Anwendung von Artelac® Complete MDO®

- In sehr seltenen Fällen können lokale Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. In diesen Fällen muss die Behandlung beendet werden. Wenn anhaltendes Unbehagen oder Irritationen auftreten, brechen Sie die Anwendung des Produkts ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Nach dem Einträufeln des Produkts kann kurzzeitig verschwommene Sicht auftreten, die zu Beeinträchtigungen beim Führen von Fahrzeugen oder bei der Bedienung von Maschinen führen kann.
- Berühren Sie die Augenoberfläche nicht mit der Flaschenspitze, um mögliche Verletzungen der Augenoberfläche oder eine Verunreinigung der Lösung zu vermeiden.
- Berühren Sie die Flaschenspitze nicht mit den Fingern, um eine mögliche Verunreinigung der Lösung zu vermeiden.
- Geben Sie die Flasche nach dem Öffnen nicht an andere Personen für deren Gebrauch weiter.
- Unvorsichtiger Gebrauch des Produkts entgegen der Gebrauchsanweisung kann dazu führen, dass das Produkt aus der Hand rutscht und Augenverletzungen verursacht.
- Nehmen Sie Kontaktlinsen vor der Anwendung heraus.
- Warten Sie nach der Anwendung ungefähr 15 Minuten, bevor Sie ein anderes Produkt am Auge anwenden oder Ihre Kontaktlinsen wieder einsetzen.
- Entsorgen Sie das Medizinprodukt 6 Monate nach dem ersten Öffnen.
- Nach dem Verwendbarkeitsdatum nicht mehr verwenden.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung oder Flasche beschädigt ist.
- Artelac® Complete MDO® enthält Kleinteile aus Plastik, die von Kindern verschluckt werden könnten. Erstickungsgefahr. Daher muss Artelac® Complete MDO® für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.
- Für die Anwendung dieses Produkts ist keine spezielle Schulung erforderlich.
- Nach derzeitigem Kenntnisstand kann dieses Produkt bei schwangeren Frauen, stillenden Müttern und Kindern eingesetzt werden.
- Wenn Ihr Kind unter trockenen Augen leidet, sprechen Sie vor der Anwendung eines Augenbefeuchtungsmittels mit einem Arzt.

Wie ist Artelac® Complete MDO® zu lagern?

Lagern Sie das Produkt bei +1 °C und +25 °C. Dank des Flaschendesigns kann Artelac® Complete MDO® nach dem Öffnen 6 Monate verwendet werden.

Entsorgung: Das Produkt ist entsprechend den örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.

In Verbindung mit dem Produkt auftretende schwerwiegende Vorfälle sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

Packungsgrößen: Artelac® Complete MDO® ist in Packungen mit jeweils 3 ml (Probe), 10 ml und 2 x 10 ml 10 ml Augentropfen erhältlich.

Artelac® Complete ist zudem in praktischen, konservierungsmittelfreien Ein-Dosis-Optiolen erhältlich.

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, il contient des informations importantes pour l'utilisation de ce produit. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre professionnel de santé – votre pharmacien, votre médecin, votre ophtalmologiste, ou vous mettre en relation avec l'information médicale.

BAUSCH + LOMB

Artelac™ Complete MDO®

2,4 mg/ml d'hyaluronate de sodium, carbomère, glycérol, composant lipidique (triglycérides à chaîne moyenne), hydroxyde de sodium et eau pour injection

Indications: Hydratation de l'œil.

Qu'est-ce que Artelac® Complete MDO®?

Artelac® Complete MDO® est une solution ophtalmique non translucide contenant 0,24 % d'acide hyaluronique (sous forme de sodium hyaluronate), du carbomère, du glycérol, un composant lipidique (triglycérides à chaîne moyenne), de l'hydroxyde de sodium et de l'eau pour injection.

La formulation présente une très bonne tolérance car elle ne contient ni conservateur ni substance tampon.

Grâce à son flacon sans conservateur, Artelac® Complete MDO® s'utilise facilement et de façon sécurisée. Artelac® Complete MDO® se conserve 6 mois après ouverture.

Consignes d'utilisation: Artelac® Complete MDO® est une solution ophtalmique qui renforce les trois couches du film lacrymal pour améliorer l'hydratation de la surface oculaire en cas de sensation de sécheresse oculaire.

Quand utiliser Artelac® Complete MDO®?

Artelac® Complete MDO® s'inspire de la conception du film lacrymal naturel. Il contient un hydratant naturel, l'acide hyaluronique (sous forme de hyaluronate de sodium) que l'on retrouve dans les structures de l'œil humain sain et dans le film lacrymal, ainsi que deux hydratants additionnels : le glycérol et le carbomère. Grâce à son composant lipidique additionnel (triglycérides à chaîne moyenne), Artelac® Complete MDO® renforce les trois couches du film lacrymal : lipidique, aqueuse et mucineuse.

Artelac® Complete MDO® est conçu pour rester sur la surface de l'œil, apporter une hydratation intense et immédiate et apporter un soulagement durable des symptômes. Il peut être le produit idéal pour toute personne souffrant d'une série de symptômes de sécheresse oculaire tels que la fatigue, le stress, les picotements, les sensations de brûlures et/ou les larmoiements oculaires.


Pendant combien de temps et à quelle fréquence devez-vous utiliser Artelac® Complete MDO®?

Instillez une goutte de Artelac® Complete MDO® dans l'œil lorsque vous en ressentez le besoin. Vous pouvez l'utiliser quotidiennement et aussi souvent que nécessaire. Il n'y a pas de limite dans la durée d'utilisation.

Comment utiliser Artelac® Complete MDO®?

Artelac® Complete MDO® dispose d'un mécanisme de pompe breveté permettant de ne pas inclure d'agent conservateur. Il est possible que ce flacon soit différent de ceux que vous avez pu utiliser dans le passé.

Note générale: Lavez-vous les mains avant chaque utilisation. Évitez tout contact entre l'embout du flacon et vos doigts ou la surface de votre œil afin d'éviter tout risque de contamination de la solution ou de blessure de l'œil.

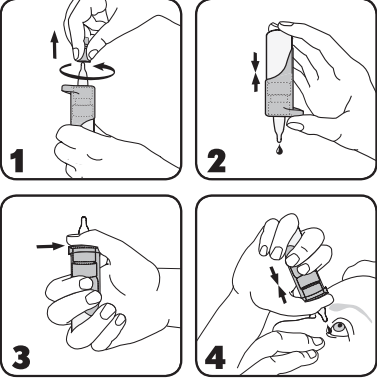

1. Avant chaque utilisation, enlevez le bouchon protecteur blanc transparent de l'embout du flacon par un mouvement rotatif.
 2. **Attention ! Avant la première utilisation et si le flacon n'a pas été utilisé depuis un certain temps:** Retournez le flacon vers le bas, appuyez sur le mécanisme de pompe de façon répétée, jusqu'à ce qu'une goutte tombe.
 3. Tenez le flacon comme indiqué: Placez votre pouce sur le support pouce ergonomique. Maintenez le bas du flacon avec les autres doigts. Deux doigts doivent être placés sur le bas du flacon.
 4. Retournez le flacon et penchez légèrement la tête en arrière. Tirez doucement votre paupière inférieure vers le bas avec un doigt de votre main libre, tenez le flacon en position verticale au-dessus de l'œil, comme indiqué, et appuyez sur le mécanisme de pompe pour instiller une goutte dans votre œil.
- Fermez l'œil et tournez-le doucement afin de diffuser la solution uniformément à la surface de votre œil.
5. Immédiatement après utilisation, secouez le flacon pour éliminer les éventuelles gouttes résiduelles et remplacez le bouchon protecteur blanc transparent sur l'embout du flacon.
- En raison de la conception du flacon, il reste un peu de solution dans le flacon. Cependant, on peut entièrement vider le flacon du volume de remplissage déclaré.

Quand ne faut-il pas utiliser Artelac® Complete MDO®?

N'utilisez pas ce produit en cas d'hypersensibilité à l'un des ingrédients

