

ALLEVYN[®] ADHESIVE

ALLEVYN[®] Sacrum



HAFTEND
HAFTENDER
VERBAND



MÄSSIG
MODERATE
AUFNAHME



BIS ZU 7 TAGE
VERBANDLIEGEZEIT
BIS ZU 7 TAGEN

SmithNephew

**ALLEVYN[®] Haftender hydrozellulärer
Schaumverband**

Für mäßig bis stark exsudierende Wunden.

Produktbeschreibung

Der ALLEVYN[®] Adhesive Verband besteht aus einem absorbierenden hydrozellulären Polyurethanschaum, der zwischen eine perforierte, haftende Wundkontaktschicht und eine wasserdichte, atmungsaktive Außenfolie eingebettet ist.

Wirkungsweise

Der ALLEVYN[®] Adhesive Verband absorbiert Wundexsudat bei kontinuierlicher Erhaltung eines feuchten Wundheilmilieus. Der Verband lässt sich leicht anlegen und rückstandsfrei entfernen.

Indikationen

Sekundäre Wundheilung oberflächlicher, granulierender Wunden. Chronische und akut exsudierende Wunden, Voll- und Spalthautwunden, wie zum Beispiel Druckgeschwüre, Ulcus cruris, diabetische Fußulzerationen, maligne Wunden, Operationswunden, Spalthautentnahmestellen, pilzbefallener Ulcus. Kann bei nekrotischen oder schorfigen Wunden in Verbindung mit INTRASITE[®] GEL Hydrogel-Wundverbänden verwendet werden.

Anwendungshinweise:

1. Wunde auf übliche Weise reinigen.
2. Eine geeignete Verbandgröße auswählen.
3. Die Haut um die Wunde reinigen, entfetten und trocknen. Bei starkem Haarwuchs an dieser Stelle die Haare entfernen, um einen engen Kontakt zur Wunde zu ermöglichen. Bei empfindlicher Haut kann SKIN-PREP[®] vor dem Auflegen des ALLEVYN[®] Adhesive Verbands verwendet werden.
4. Beginnen Sie die Trägerfolie vom ALLEVYN[®] Adhesive Verband zu entfernen und legen Sie die Wundaufgabe an.
5. Drücken Sie den Verband leicht an und entfernen Sie die verbleibende Trägerfolie.
6. Der ALLEVYN[®] Adhesive Verband kann zugeschnitten werden, was insbesondere für Fersen, Ellbogen und andere schwer zugänglichen Körperstellen von Vorteil ist.
7. Wird der ALLEVYN[®] Sacrum Verband verwendet, platzieren Sie den Verband mit dem schmalen Ende mindestens 2 cm über dem Analsphinkter. Anschließend drücken Sie den restlichen Verband über dem Sakrum sanft an.

Häufigkeit des Verbandwechsels

In den frühen Phasen der Behandlung sollte der Verband regelmäßig überprüft werden. Aufgrund ihrer Beschaffenheit können die Verbände bis zu 7 Tagen, bzw. im Sakralbereich, bis zu 5 Tagen, getragen werden - Oder bis das Wundexsudat sichtbar wird und bis max. 2 cm an den Rand des Verbandes heranreicht, je nachdem was früher eintritt. Lokale klinische Protokolle sollten zur Beurteilung der Situation mit einbezogen werden. Die Außenfolie ist wasserdicht und atmungsaktiv und dient der Verhinderung einer bakteriellen Kontamination der Wunde.

Entfernen des Verbands

Zum Entfernen des ALLEVYN[®] Adhesive Wundverbands heben Sie eine Ecke der Auflage an und ziehen Sie den Verband nach hinten. Sakralverbände sollten vom oberen Rand her nach unten in Richtung Anus entfernt werden, um das Risiko einer Infektionsübertragung zu minimieren.

Vorsichtsmaßnahmen

Den ALLEVYN[®] Adhesive Verband nicht gleichzeitig mit Oxidationsmitteln wie Hypochloridlösung (z.B. EUSOL) oder Wasserstoffperoxid (H₂O₂) verwenden, da diese den absorbierenden Polyurethanschaum des Verbandes zersetzen können. Eine Rötung und/oder Mazeration der Haut um die Wunde nach der Verwendung von ALLEVYN[®] Adhesive Verbänden wurde selten berichtet. Gelegentlich wurden Fälle einer Empfindlichkeit gegen den Verband berichtet. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder zu häufigen Verbandwechseln, speziell bei Patienten mit brüchiger Haut, können Hautschädigungen auftreten. Bei einer Rötung oder Sensibilisierung muss der Gebrauch eingestellt werden.

Die auf der Packung angegebene Skala dient lediglich zur Orientierung für die Auswahl der Auflagen. Nur zur einmaligen Verwendung, bei Verwendung an mehr als einem Patienten kann es zu Kreuzkontaminationen kommen.

Bei Verwendung auf infizierten Wunden sollte die Infektion gemäß dem lokalen klinischen Protokoll behandelt werden.

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN England.

®Warenzeichen von Smith&Nephew. ©2023 Smith&Nephew. Alle Rechte vorbehalten.

Ausgabedatum 02/2023. Dieses Produkt ist möglicherweise durch ein oder mehrere US-Patente geschützt. Siehe: www.smith-nephew.com/patents
www.smith-nephew.com

STERILE R



Einfach-
Sterilbarrieresystem



Keine Verwendung bei
geöffneter oder beschädigter
Verpackung



CE
2797



25°C



Grüner Punkt



10601774 34905