

## DOMETRA Test 10

### Visuell auswertbare Teststreifen zur Harnanalyse für den Schnellaufweis von 10 Parametern

**BITTE UNBEDINGT BEACHTEN:**

Dies ist lediglich eine Übersicht über das Produkt und seine Anwendung. Vor Verwendung der Teststreifen unbedingt die komplette Gebrauchsinformation (Beipackzettel) beachten!

DOMETRA Test 10 ist nur für die In-Vitro-Diagnostik und für den professionellen Einsatz durch Fachpersonal bestimmt.

**Anwendungsgebiet:**

Schnelltest zur Diagnostik und Erkennung von Diabetes, Leber- und hämolytischen Erkrankungen, Stoffwechselstörungen und Erkrankungen im Bereich der Nieren und Harnwege.



**10 Parameter:**

Urobilinogen	Bilirubin	Keton	Glukose	Protein
Blut	pH - Wert	Nitrit	Leukozyten	spez. Gewicht


**Probensammlung und Vorbereitung:**

1. Urin in einem sauberen, trockenen Behälter sammeln
2. Keine Konservierungsmittel hinzufügen
3. Die gut vermischte, jedoch nicht zentrifugierte Urinprobe so schnell wie möglich testen

**Visuelle Testdurchführung:**

Bitte nur die erforderliche Anzahl von Teststreifen entnehmen und Packung sofort wieder sorgfältig mit Originalverschluss fest verschließen. Teststreifen mit verfärbten oder dunklen Testfeldern sollten nicht verwendet werden

1. Teststreifen kurz (ca. 1 - 2 Sek.) in die Urinprobe **eintauchen**.
2. Überschüssigen Urin seitlich am Rand des Sammelgefäßes **abstreifen**. Überschüssiger Urin kann zu chemischen Interferenzen zwischen benachbarten Testfeldern führen.
3. Teststreifen während der Reaktionszeit **waagrecht halten**, um Interferenzen zwischen den Reaktionszonen zu vermeiden.
4. Auswertung: Farben der Reaktionszonen innerhalb von ca. 60 Sek. (Leukozytenfeld nach 120 Sek.) bei gutem Licht **mit der Farbskala vergleichen**. Streifen mit der Griffseite am unteren Ende des Röhrchens parallel zur Farbskala halten und ablesen. **Teststreifen und Röhrchen dabei waagrecht halten**. Farbveränderungen nach 2 Min. sowie Verfärbungen, die nur am Rand der Testfelder auftreten, sind ohne Bedeutung.

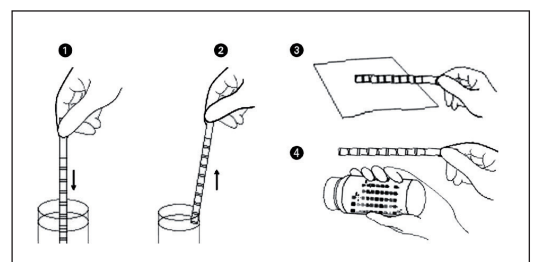

**WICHTIG: Bitte beachten Sie vor Verwendung unbedingt die weiteren Hinweise in der Gebrauchsinformation!**

Artikel	Art.-Nr.	PZN
Dometra Test 10, 100 Teststreifen	9010600	12520696



 servoprax GmbH  
Am Marienbusch 9  
D-46485 Wesel

Vertrieb durch:

**Dometra GmbH & Co. KG**  
Auf Pfuhlst 1 | D-66589 Merchweiler  
Tel.: 0 68 25 / 8 01 99 56  
Fax.: 0 68 25 / 9 52 27 82