

# RESTIFEM VAGINALPESSAR M

## RESTIFEM Vaginalpessar M

PZN: 12902239

Inhalt: 1 St

Hersteller: VIOMED Vertriebs GmbH

### Zweckbestimmung

Vaginales Stützpessar aus Silikon Präventiver Effekt: Bei allen Frauen nach vaginaler bzw. abdominaler Geburt nach Abschluss des Wochenbettes für 3 bis 6 Monate. Durch Schwangerschaft und Geburt kommt es zur Überdehnung des Beckenbindegewebes und Überlastung der Beckenbodenmuskulatur. Beides wird durch die Therapie mit dem Stützpessar entlastet, um dadurch die Rückbildungsprozesse zu unterstützen. Therapeutischer Effekt: Bei allen Frauen, die unter Belastungsharninkontinenz und / oder Deszensus (insbesondere Prolaps, Descensus uteri, Zystozele) leiden, können diese Beschwerden durch das Tragen gebessert, beziehungsweise aufgehoben werden. Das Pessar richtet die Gebärmutter auf und stützt die Urethra. Kontraindikationen zur Anwendung: Bei noch persistierenden Lochien (noch nicht abgeschlossenem Wochenbett), einer Scheidenentzündung (Kolpitis) oder Blasen- und Harnwegsentzündung soll das Pessar nicht angewendet werden. Ebenfalls soll das Pessar nicht benutzt werden, wenn die Anwenderin mental oder physisch nicht in der Lage ist, dass Pessar selbst einzusetzen und heraus zu nehmen. Art und Dauer der Anwendung: Das Pessar wird von der Frau selbst vaginal appliziert, idealerweise nach dem Aufstehen am Morgen. Es wird tagsüber getragen und zur Nacht wieder von der Anwenderin entfernt und gereinigt.

### Zusammensetzung

biokompatibles Silikon