

PICO MUL 15X15 WUNDAUFLAGE

PICO Multipack 15x15 cm 5 Wundauflagen

PZN: 13355288

Inhalt: 5 St

Hersteller: Smith & Nephew GmbH - Woundmanagement

Zweckbestimmung

Die PICO-UnterdruckWundtherapiesysteme zum Einmalgebrauch sind indiziert bei Patienten, bei deren Behandlung eine Absaugvorrichtung (UnterdruckWundtherapie) Nutzen bringt, da eine Entfernung von geringen bis mäßigen Exsudatmengen und infektiösem Material die Wundheilung unterstützt. Indizierte Wundtypen sind unter anderem: Chronische Wunden, Akute Wunden, Traumatische Wunden Subakute und dehiszente Wunden, Verbrennungen zweiten Grades, Ulzera, Lappenplastiken und Transplantationswunden, Chirurgisch geschlossene Inzisionen PICO-Unterdruck-Wundtherapiesysteme zum Einmalgebrauch eignen sich sowohl zur Verwendung in Krankenhäusern als auch in der häuslichen Krankenpflege.

Zusammensetzung

PICO-Wundverbände sind steril verpackt und zur einmaligen Verwendung vorgesehen. Das Exsudatmanagement mit dem PICO-Wundverband erfolgt durch eine Kombination aus Absorption und Verdampfung von Flüssigkeit durch die äußere Folie. Der PICO-Wundverband kann über schwach exsudierenden Wunden bis zu 7 Tage lang verwendet werden. Bei mäßig exsudierenden Wunden sollte der Verband gemäß der allgemein anerkannten Richtlinien zum Verbandswechsel gewechselt werden. Als schwach exsudierende Wunden gelten Wunden, die innerhalb von 24 Stunden bis zu 0,6 g flüssiges Exsudat pro cm² Wundbereich abgeben. Als mäßig exsudierende Wunden gelten Wunden, die innerhalb von 24 Stunden bis zu 1,1 g flüssiges Exsudat pro cm² Wundbereich abgeben. 1 g Exsudat entspricht ungefähr 1 ml Exsudat. Die Häufigkeit des Verbandswechsels hängt von mehreren Faktoren ab, etwa von Wundtyp, Größe und Orientierung der Wunde, Stärke und Volumen des Exsudatflusses oder Umweltbedingungen.