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


# Moor-Nacken- und Schulterkissen mit Komfortbezug

PZN 13781039 | Art. 2283



## Wirkungsweise:

Diese Moorkomresse eignet sich hervorragend für eine Wärme- Kälteanwendung. Das Naturmoor speichert Wärme oder Kälte und gibt diese ganz langsam wieder ab.

Diese Methode ist für folgende Anwendungen geeignet: Wärmeanwendung: Muskel-, Nackenverspannungen, rheumatische Beschwerden, Blähungen, Bauchweh oder als Wärmequelle für ein warmes und angenehmes Wohlbefinden. Kälteanwendung: Prellungen, Kopfschmerzen, Insektenstiche, Quetschungen, Stauchungen und Migräne.

## Achtung:

1. Eine Überhitzung (durch Mikrowelle oder Kochtopf) oder extreme Unterkühlung (dauerhafte Lagerung im Tiefkühlfach) können bei der Moorkomresse zu Beschädigungen führen. Eine beschädigte Komresse vor der Berührung auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Bitte halten Sie sich unbedingt an die vorgegebenen Anwendungswerte dieser Gebrauchsanleitung. Vor jedem Erwärmen oder Kühlen immer den Außenbezug herunternehmen.
2. Achtung: Kleine Kinder sind empfindlicher gegen Wärme und Kälte. Gebrechliche und behinderte Personen können sich evtl. nicht bemerkbar machen, wenn eine zu warme oder kalte Temperatur erreicht wird.
3. Testen Sie die Temperatur vor Gebrauch mit Ihrem Handrücken. Sollte eine Person Wärme und Kälte nicht richtig wahrnehmen können, darf diese Moorkomresse nicht angewendet werden.
4. Legen Sie die Moorkomresse niemals direkt auf die Haut, um Verbrennungen bzw. Unterkühlungen zu vermeiden. Legen Sie die Moorkomresse vor der Anwendung immer in den Bezug.
5. Vorsicht bei Personen mit Durchblutungsstörungen der äußeren Arterien und Gewebe, schweren Herz-Kreislauferkrankungen sowie Nieren- und Blasenerkrankungen, im Zweifel, ob Wärme bzw. Kälte zur Linderung beitragen, fragen Sie Ihren Arzt.
6. Folgende Personen sollten diesen Artikel nicht benutzen: Kinder unter 3 Jahren, Hilflose, Allergiker, Personen mit Immunschwäche, Personen mit Schmerzen aus ungeklärter Ursache oder Diabetes, im Zweifel fragen Sie ihren Arzt.

## Wärmeanwendung:

1. Vor jeder neuen Wärmeanwendung muss die Moorkomresse vollständig ausgekühlt sein, damit keine Überhitzung und somit ein Schaden entstehen kann.
2. Nach der Erwärmung die Moorkomresse wieder in den Bezug einlegen und den Klettverschluss schließen.
3. Bei zu langem Erhitzen der Moorkomresse kann diese beschädigt werden. Eine beschädigte Moorkomresse darf nicht mehr verwendet werden.
4. Die Temperatur vor dem Gebrauch mit dem Handrücken testen. Niemals die Moorkomresse ohne Bezug auf die direkte Haut legen.
5. Die Erwärmung der Moorkomresse sollte niemals unbeaufsichtigt erfolgen.
6. Immer vor dem Erwärmen den Klettverschluss öffnen und die Moorkomresse aus dem Bezug herausnehmen.

## Anlegen der Moorkomresse:

Legen Sie die Komresse wie auf der Abbildung gezeigt, um Ihren Hals. Befestigen Sie bei Bedarf die Komresse mit dem Klettverschluss an der Körpervorderseite.

## Merkmale, Marke, Eigenschaften und Inhaltsstoffe

### Produktinformationen

Abmessungen: 163,00 x 62,00 x 203,00 cm  
Artikelgewicht: 0,000 kg  
Gewicht mit Verpackung 1,01 kg  
Inhalt/Menge: 1 St  
UVP: 13,50 € inkl. MwSt

Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39 info@megadent.de  
40211 Düsseldorf Tel +49 211 17754 0  
www.megadent.de Fax +49 211 17754 20

