

Anwendungshinweise eeeears®

Allgemeines

eeeears® ist wiederverwendbar und somit umweltschonend. Das Ohrenschmalz (Cerumen) hält das Innenohr feucht und reinigt es von Staub, Schmutz und anderen Materialien, die sich im Gehörgang ansammeln können. Das Ohrenschmalz transportiert den Schmutz aus dem Ohr heraus. Daher sollten die Ohren nicht mit Wattestäbchen oder anderen Instrumenten gereinigt werden. Die Ohren können hierdurch verstopft werden. Außerdem kann das Trommelfell beschädigt werden, was zu Blutungen und temporären Hörverlust führen kann. Das Ohrenschmalz sollte nicht komplett entfernt werden, damit die Schutzfunktion für das Ohr erhalten bleibt. eeeears® entfernt *nur das überschüssige Ohrenschmalz* im vorderen Teil des Ohres, so dass o.g. Schutzfunktion erhalten bleibt. Eine Schädigung des Trommelfells kann durch die korrekte Anwendung nicht entstehen.

Anwendung

Führen Sie das vordere Ende (Kreuz) unter leichten Druck und mit einer drehenden Bewegung in das Ohr. Danach machen Sie ca. zwei Umdrehungen, ohne die Drehrichtung zu verändern. Drehen Sie beim Herausziehen weiter, so dass das Ohrenschmalz mit aus dem Ohr herausgezogen wird.

Reinigung

Reinigen Sie eeeears® einfach mit lauwarmem Wasser und legen sie eeeears® zum Trocknen an die Seite, oder in die unverschlossene mitgelieferte Box. eeeears® ist sofort wieder einsatzbereit

Sicherheitshinweis

Bitte bewahren Sie eeeears® unzugänglich für Kinder auf. eeeears® passt sich der Größe des Gehörganges an. Es sollte nicht bei Kindern unter 5 Jahren angewendet werden. Kinder über 5 Jahren sollten eeeears® nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Sie sollten eeeears® nicht verwenden:

- wenn Sie eine Entzündung/Mittelohrentzündung haben
- bei Verletzungen des Trommelfells
- unter chronischen Ohrenschmerzen leiden
- an anderen Ohrenerkrankungen wie z. Bsp. Barotrauma leiden

eeeears® besteht aus einem 100% allergenfreiem medizinischen Silikon und wird in Europa gefertigt.

