



**BD™ ThinWall -  
mehr Innendurch-  
messer für leichtere  
Injektionen**

**BD™ ThinWall**

### Bestellinformation

Produkt	Packungsgröße	PZN
 <b>BD™ ThinWall</b> 0,23 mm (32G) x 4 mm	100 Stück	16603723
 <b>BD™ ThinWall</b> 0,25 mm (31G) x 5 mm	100 Stück	16605308
 <b>BD™ ThinWall</b> 0,25 mm (31G) x 8 mm	100 Stück	16605449

Stand: Mai 2020

**Bezugsquelle** [www.eu-medical.de](http://www.eu-medical.de)

**Erhältlich mit Rezept oder im Freiverkauf  
in jeder Apotheke und dem Diabetesfachhandel**

BD™: Alle Rechte vorbehalten. BD, das BD Logo und alle anderen  
Marken sind – sofern nicht anders angegeben – Eigentum der Becton,  
Dickinson und Company.

**Auf Wunsch mit  
Abwurfbox gegen  
unbeabsichtigte  
Stichverletzungen**





Durch die richtige Kombination aus Nadellänge und Injektionstechnik ist eine sichere Insulininjektion gewährleistet.

### Empfohlene Nadellänge (nach VDBD)

Kinder und Jugendliche	
senkrecht, ohne Hautfalte	4* mm
senkrecht, mit Hautfalte	5 mm
schräg, mit Hautfalte	8 mm
Erwachsene	
senkrecht, ohne Hautfalte	4* + 5* mm
senkrecht, mit Hautfalte	8 mm
schräg, ohne Hautfalte	8 mm

\* Bei der Injektion in den Oberschenkel und bei schlanken Personen auch im Bauchbereich kann die Bildung einer Hautfalte auch bei kurzen Nadeln empfohlen sein.

### Passen auf alle gängigen Insulinpens:

#### BERLIPEN von Berlin-Chemie

BerliPen areo 3

BerliPen Precision

BerliPen Junior



#### HUMAPEN von Lilly

HumaPen Savvio

HumaPen Luxura HD



#### NOVOPEN von Novo Nordisk

NovoPen 5

NovoPen Echo



#### AUTOPEN 24 von Owen-Mumford

Autopen 24 für Aventis Insulin 3/1

Autopen 24 für Aventis Insulin 3/2



#### INSULINPENS von sanofi-aventis

ClikStar

TactiPen

JuniorSTAR



AutoPen classic; BerliPen areo und areo 2, BerliPen 301 und 302; DiaPen; HumaPen Memoir und Luxura; NovoPen 4 und NovoPen Junior; OptiPen Pro 1 und 2; Pendiq; YpsoPen und auf alle Fertigpens.

### Achtung: Pen-Nadeln sind Einmalprodukte

Durch den Gebrauch kann sich die Nadel verformen und ist nicht mehr steril.