

Produkte

- = LIGASANO® weiß
- = LIGASANO® orange
- = LIGASANO® grün


Verordnung

LIGASANO® Produktfamilie


Kurzinfo

Diabetologie / Podologie

- = LIGASANO® weiß
- = LIGASANO® orange
- = LIGASANO® grün

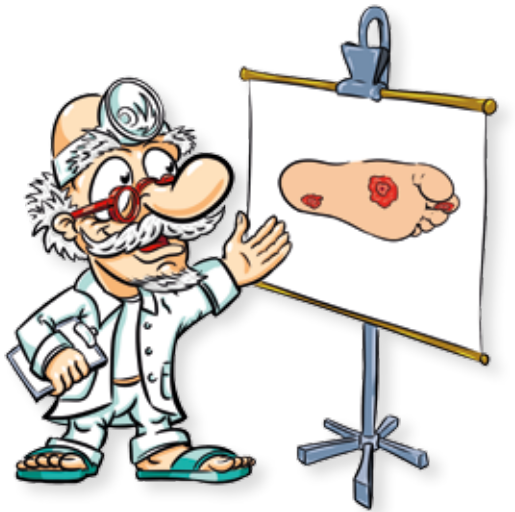

LIGASANO®
Wundreinigung - Wundheilung - Rezidivprophylaxe

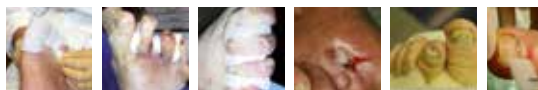

Versicherte haben Anspruch auf Versorgung mit Verbandmitteln, soweit diese medizinisch notwendig sind, schreibt der G-BA in seinem Beschluß vom 19.10.2017. Auch nach der neuen Verbandmitteldefinition des G-BA ist LIGASANO® weiterhin **als Verbandmittel auf Patientenrezept verordnungsfähig**.

In den **Sprechstundenbedarfsvereinbarungen** kann es in den Kassenärztlichen Vereinigungen unterschiedliche Regelungen geben, sprechen Sie sich am besten mit der zuständigen KV ab.

Nachfolgend einige Beispiele für Verordnungen zur **therapeutischen Anwendung**.

Vorschlag Verordnungstext

Wundbehandlung: Wundreinigung Keimverarmung Förderung der Granulation und Epithelisation	... OP LIGASANO® wegen Ulcus cruris arteriosum ... OP LIGASANO® wegen Ulcus cruris venosum ... OP LIGASANO® wegen Ulcus cruris mixtum ... OP LIGASANO® wegen diabetisch bedingter Fußläsionen ... OP LIGASANO® zur Wundreinigung ... OP LIGASANO® wegen offener Kratzwunden/Schürfwunden ... OP LIGASANO® zur postoperativen Versorgung
--	---

Bettlägerigkeit	... OP LIGASANO® wegen Durchblutungsstörungen im Kontaktbereich
Intertrigo	... OP LIGASANO® wegen Intertrigo-bedingter Hautläsionen
Pilzinfektionen	... OP LIGASANO® bei Pilzinfektionen
Arterielle Durchblutungsstörungen	... OP LIGASANO® Binden wegen massiver arterieller Durchblutungsstörungen
Venöser Rückstau	... OP LIGASANO® zur Unterstützung der Kompressionstherapie
Mazeration	... OP LIGASANO® wegen mazerationsbedingten Hautläsionen

Weitere therapeutische Anwendungen ergeben sich durch das breite Anwendungsspektrum.



Bitte unbedingt beachten: **LIGASANO® ist** kein Hilfsmittel, sondern **ein Verbandstoff**, auch bei der Wundbegleitbehandlung und Rezidivprophylaxe. Bitte **keinesfalls Hilfsmittel ankreuzen**, da die GKV die Kosten sonst nicht übernimmt.

Nutzen Sie unsere Info-Hotline unter Tel. 09103 / 20 46

Art.-Nr.	PZN	Versandereinheit
----------	-----	------------------

LIGASANO® weiß: Sterile Wundauflagen und Wundeinlagen

15341-010	17251249	10 Stück	5 x 5 x 1 cm	steril		○
15342-010	17251261	10 Stück	5 x 5 x 2 cm	steril		○
15346-010	17251290	10 Stück	10 x 10 x 1 cm	steril		○
15347-010	17251321	10 Stück	10 x 10 x 2 cm	steril		○

15371-007	17251516	7 Stück	100 x 1,5 x 0,4 cm	steril		○
15372-010	17251545	10 Stück	50 x 1,5 x 0,4 cm	steril		○
15375-010	17251568	10 Stück	6 x 2,5 x 0,4 cm	steril		○

15385-010	17251628	10 Stück	Ø 5 cm x 1 cm	steril		○
-----------	----------	----------	---------------	--------	--	---

LIGASANO® Wundputzer®

16814-010	17251841	10 Stück	5 x 5 x 2 cm	steril		●
36814-010	17252071	10 Stück	5 x 5 x 2 cm	steril		●
15342-010	17251261	10 Stück	5 x 5 x 2 cm	steril		○
36815-005	17252125	5x3 Stück je	5 x 5 x 2 cm	steril		●

16812-010	17251829	10 Stück	30 x 1,5 x 0,6 cm	steril		●
36812-010	20421725	10 Stück	30 x 1,5 x 0,6 cm	steril		●
15372-010	17251545	10 Stück	30 x 1,5 x 0,6 cm	steril		○

LIGASANO® weiß: Zehenschläuche

15391-012	17251640	12 Stück	6x3,5/2,5 cm	x 1 cm steril		○
15392-012	17251657	12 Stück	6x2,5/1,5 cm	x 1 cm steril		○
15393-012	17251663	12 Stück	6x1,5 cm	x 1 cm steril		○
15070-012	17250942	12 Stück	6x3,5/2,5/1,5 cm	x 1 cm unsteril		○

LIGASANO® weiß: Hallux valgus- und Großzehenverband

15395-004	17251700	4 Stück	Ø 4,5 / 4,0 x	12 cm steril		○
15075-002	17250959	2 Stück	Ø 4,5 / 4,0 x	12 cm unsteril		○
15075-006	17250965	6 Stück	Ø 4,5 / 4,0 x	12 cm unsteril		○

LIGASANO® weiß: Hammerzehenverband

15078-012	17250988	12 Stück	Ø 3,5 cm x 12 cm	unsteril		○
-----------	----------	----------	------------------	----------	--	---

LIGASANO® weiß: Sterile und unsterile Binden

15381-008	17251605	8 Stück	300 x 5 x 0,3 cm	steril		○
15383-004	17251611	4 Stück	300 x 10 x 0,3 cm	steril		○
15571-012	17251717	12 Stück	300 x 5 x 0,3 cm	unsteril		○
15573-006	17251746	6 Stück	300 x 10 x 0,3 cm	unsteril		○

Unsere komplette Produktübersicht mit **allen LIGASANO®-Produkten** schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu.

Art.-Nr.	PZN	Versandereinheit
----------	-----	------------------

LIGASANO® weiß: Finger- und Zehenverband mit Kleberand

15215-001	17251189	1 Stück	200 x 14 x 0,5 cm	unsteril		○
			gerollt, abschneidbar, mit Klebekante ergibt ca. 40-50 Zehenschläuche			
15394-015	17251692	15 Stück	Zehenschlauch/-kappe	steril		○
			für Zehendurchmesser von 1,0 - 3,8 cm			

LIGASANO® weiß: Unsterile Kompressen

15152-010	17251077	10 Stück	24 x 16 x 1 cm	unsteril		○
15153-005	17251083	5 Stück	24 x 16 x 2 cm	unsteril		○
15158-013	17251108	13 Stück	15 x 10 x 2 cm	unsteril		○
15159-026	17251114	26 Stück	15 x 10 x 1 cm	unsteril		○

15083-025	17250994	25 Stück	Ø 3,5 cm x 1 cm	unsteril, rund		○
15085-036	17251002	36 Stück	Ø 5 cm x 1 cm	unsteril, rund		○

LIGASANO® Roll: Spenderboxen

15025-001	17250853	1 Stück	200 x 2,5 x 1 cm	unsteril		○
15225-001	17251203	1 Stück	300 x 2,5 x 0,6 cm	unsteril		○
15050-001	17250882	1 Stück	300 x 5,0 x 0,3 cm	unsteril		○
15055-001	17250899	1 Stück	200 x 5,5 x 1 cm	unsteril		○
15255-001	17251226	1 Stück	300 x 5,5 x 0,6 cm	unsteril		○
15110-001	17251054	1 Stück	200 x 11 x 1 cm	unsteril		○
15210-001	17251172	1 Stück	300 x 11 x 0,6 cm	unsteril		○
16110-001	17251806	1 Stück	200 x 11 x 1 cm	unsteril		●

LIGASANO® weiß + grün: Universal-Praxispackung

12016-007	17250741	3 Stück	49 x 29,5 x 1 cm	unsteril		○
		4 Stück	45 x 27,5 x 1 cm	unsteril		●

LIGASANO® weiß: Podo-Mischpackung

12017-022	17674961	Verschiedene	unsterile Verbände			○
-----------	----------	--------------	--------------------	--	--	---


LIGASANO® weiß + grün: Diabetes-Plantarverband

15098-007	17251031	4 Stück	35 x 15 x 1 cm	unsteril		○
		1 Stück	35 x 15 x 2 cm	unsteril		○
		5 Stück	35 x 15 x 1 cm	unsteril		○
		1 Stück	35 x 15 x 2 cm	unsteril		○
		1 Stück	Fixierstrumpf			●
15099-020	17251048	20 Stück	35 x 15 x 1 cm	unsteril		○
			Nachkaufpackung			

LIGASANO® weiß: Ambulanzpackung Podologie-Diabetologie

15354-016	17251427	Verschiedene	sterile und unsterile Verbände			○
-----------	----------	--------------	--------------------------------	--	--	---

LIGASANO® Produktfamilie

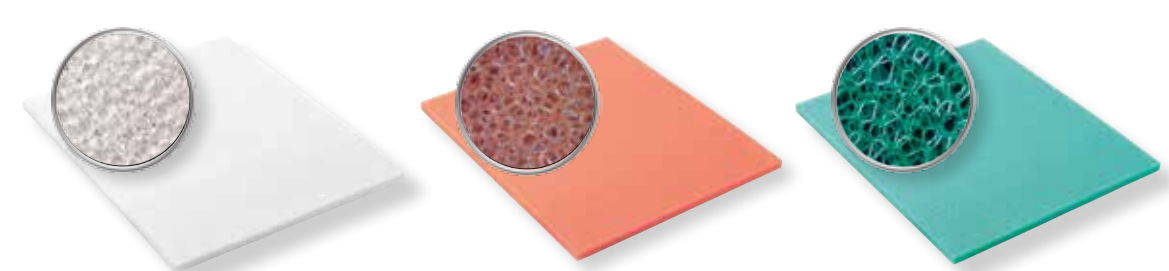

LIGASANO® weiß:


- Gemischtporiges, vergleichsweise grobporiges geschäumtes Polyurethan
- Zelltyp 750

Eigenschaften:

- Schnell nachlassende Druckspannung



- Mechanischer Reiz

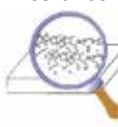

- Kontrollierte Saugwirkung




LIGASANO® orange:

- Offenporiges, großporiges Zellgitter mit entfernten Zellmembranen
- Zelltyp 850

Eigenschaften:

- Offenzellige und großporige Struktur
- Mittelstarker mechanischer Reiz
- Fast ungehinderte Wasserdampf-permeabilität

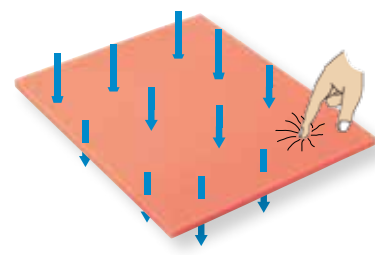


LIGASANO® grün:

- Offenporiges, sehr großporiges Zellgitter mit entfernten Zellmembranen
- Zelltyp 1500

Eigenschaften:

- Offenzellige und großporige Struktur
- Intensiver mechanischer Reiz
- Fast ungehinderte Wasserdampf-permeabilität

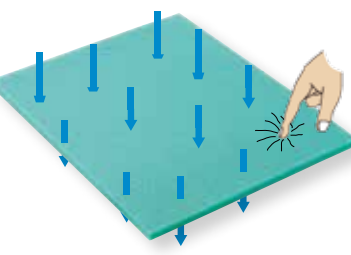


Wundreinigung

Das Débridement ist ein zentraler Bestandteil der Wundversorgung. LIGASANO® Wundputzer® sind sterile Wundverbände für einen kurzzeitigen Verbleib auf oder in der Wunde. Die Reinigungswirkung führt schnell zu sauberen Wunden, eine der Voraussetzungen für die Wundheilung. Je nach Art und Menge der Beläge haben Sie drei verschiedene Wundputzer® zur Auswahl, besonders sinnvoll kann eine Kombination sein. Durch Anwendung der **Drehtechnik** (Drehbewegung um 180°) und/oder der **Wischtechnik** (Auswischen in nur eine Richtung) erhält man mit den LIGASANO® Wundputzern® ein optimales Reinigungsergebnis. Für schwer erreichbare Stellen gibt es die LIGASANO® Wundputzer® interdigital! Durch die angepasste Form können Sie nun auch im Interdigitalbereich und bei Unterminierungen bzw. Wundtaschen optimale Reinigungsergebnisse erzielen.


LIGASANO® Wundputzer® intensiv

Entfernt sehr hartnäckige, zähe, feste und/oder nekrotische Beläge, kann sehr viel Detritus aufnehmen

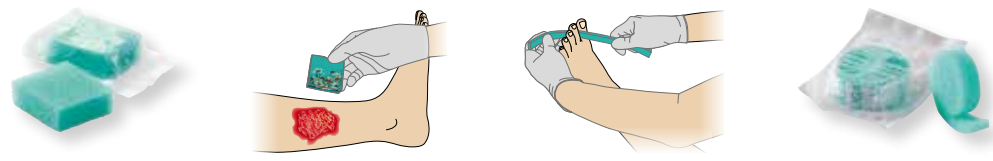


LIGASANO® Wundputzer® medium

Entfernt relativ zähe, feste und/oder nekrotische Beläge, kann viel Detritus aufnehmen

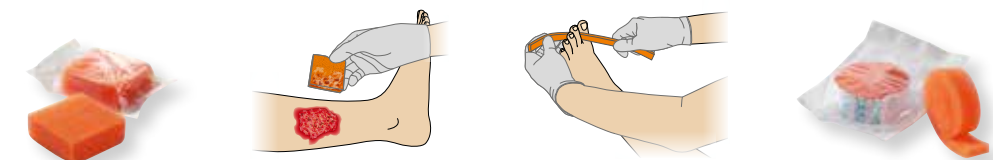

LIGASANO® Wundputzer® soft

Entfernt weiche Beläge und Biofilm

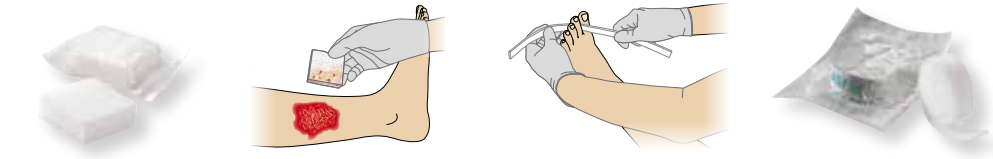

Wundreinigung / Mechanisches Débridement

Wundheilung




Die **schnell nachlassende Druckspannung** von LIGASANO® weiß reduziert den Druck auf die Wunde, fördert die Granulation und reduziert den Gegendruck auf das neu gebildete Granulationsgewebe. Der **mechanische Reiz** (d.h. die Struktur des Verbandes wird vom Gewebe wahrgenommen) fördert die Durchblutung und aktiviert die Selbstreinigung. Da nur überschüssiges Exsudat aufgenommen wird (**kontrollierte Saugwirkung, Exsudatmanagement**), trocknet LIGASANO® weiß die Wunde nicht aus. Je nach Dicke des Materials entsteht ein intermittierender Unterdruck.




Wundheilung

Anwendung bei verschiedenen Wundarten


Flache Wunde (bis ca. 0,5 cm Tiefe)

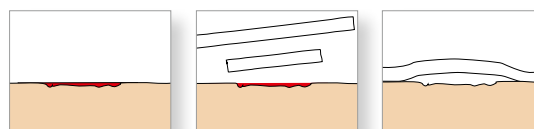


Tiefe Wunde mit Unterminierung

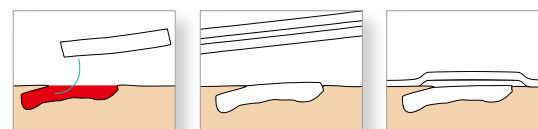

Tiefe Wunde

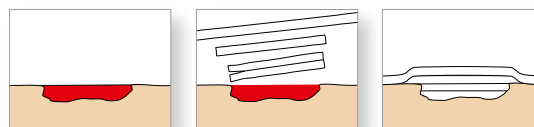

Tiefe Wunde mit engem Eingang / Fistel

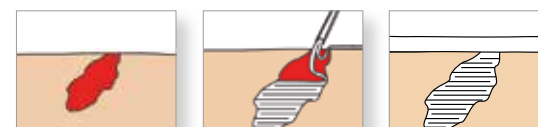


Rezidivprophylaxe

Eine gute, regelmäßige Versorgung des diabetischen Fußes und Aufklärungsarbeit durch den Podologen kann, in enger Zusammenarbeit mit dem Patienten, dem behandelnden Arzt und dem Wundversorger, das Entstehen von Wunden und Amputationen verhindern, sowohl im präventiven, als auch im sekundärpräventiven Bereich.


Sowohl in der podologischen Fachpraxis als auch im häuslichen Bereich kann LIGASANO® erfolgreich eingesetzt werden:

- Druckschutz, z.B. bei Hallux valgus und Fersensporn
- Interdigitaler Druckschutz
- Reibungsschutz
- Druckschutz nach Entfernen eines Clavus (Hühnerauge)
- Interdigital bei Mykosen
- Versorgung und Prävention beim diabetischen Fußsyndrom
- Aufnahme von überschüssigem Schweiß
- Platzhalter nach Amputationen
- Tamponieren des Nagelfalzes insbesondere bei Unguis incarnatus (eingewachsenem Fußnagel)
- Subunguale Tamponade zur Dermatophyten bedingten Nagelpilztherapie

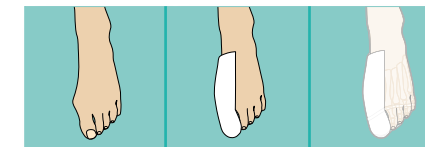


Zehenverband aus LIGASANO® weiß mit Klebekante: So individuell wie Ihre Patienten

Herstellung eines Zehenschlauches

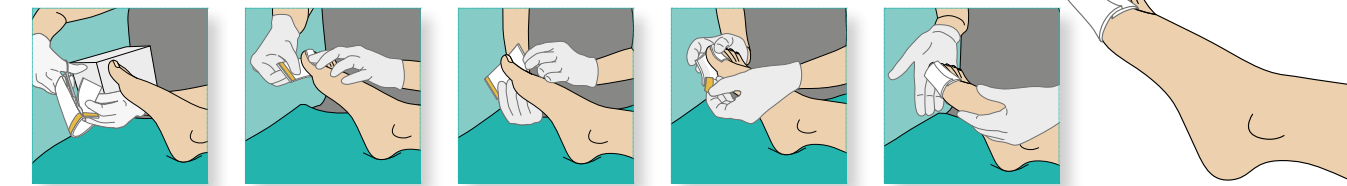

Herstellung einer Zehenkappe

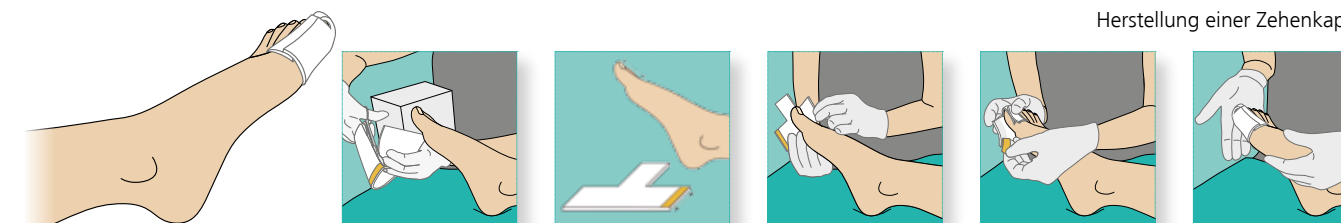

Prävention / Rezidivprophylaxe

In Deutschland erhalten Sie unsere Produkte in der Apotheke oder im medizinischen Fachhandel (Sanitätshaus). Wiederverkäufer können LIGASANO® auch direkt über den Großhandel beziehen. Sollte einmal ein Artikel nicht vorrätig sein, können Sie versandkostenfrei auch direkt bei uns bestellen, das bestellte Produkt ist dann meist am nächsten bzw. spätestens am übernächsten Werktag bei Ihnen. Sie erreichen uns persönlich Montag bis Donnerstag von 08.00 bis 16.00 Uhr und Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr. Außerhalb unserer Geschäftszeiten bitten wir Sie, uns Ihre Nachricht auf Band zu sprechen oder eine Email zu senden.

Gerne beliefern wir Sie auch weltweit. Die entstehenden Transportkosten teilen wir Ihnen nach Anfrage mit. Da diese je nach Paketgröße, Paketgewicht und Land variieren, können wir Ihnen die tatsächlichen Kosten erst im Zusammenhang mit einer konkreten Bestellmenge mitteilen.

LIGAMED® medical Produkte GmbH
Pfannenstielstr. 2 • 90556 Cadolzburg, Deutschland
Tel. 09103 / 2046 • Fax 09103 / 2796 • E-Mail: info@ligamed.de

www.ligasano.com

Das Copyright für alle Texte, Zeichnungen und Abbildungen in dieser Broschüre liegt bei der LIGAMED® medical Produkte GmbH in 90556 Cadolzburg.

LIGASANO®, LIGAMED®, MOLTOSAN®, MOLTOMED®, CAVASAN®, KLIMAGITTER®, Dr. Guck®, Wundputzer®, A.Pf.E.L.®, are Trade Marks of LIGAMED® medical Produkte GmbH, Germany

LIGASANO®
wird einfach

MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C107518

