

Domotherm® SPRÜH & WISCHDESINFEKTION plus

Desinfektion
500 ml e



Domotherm SPRÜH & WISCHDESINFEKTION plus

Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion

100g enthält:
20,0g 1-Propanol;
5,0g 2-Propanol

- Sehr materialschonend
- Gebrauchsfertige und stark alkoholreduzierte Schnelldesinfektion
- Aldehydfrei, Phenolfrei
- Begrenzt viruzid PLUS

Art der Anwendung:

Gemäß MPG: Gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten im medizinischen Bereich. Gemäß Biozid-Verordnung: Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigen kleinen Flächen.

Hinweise zur Anwendung:

Zur Wischdesinfektion ist ein geeignetes Tuch mit der Desinfektionslösung zu benetzen und zu wischen, bzw. die Lösung direkt auf die Fläche zu geben und zu wischen. Zur Sprühdeseinfektion wird das Präparat auf die zu desinfizierende Oberfläche aufgesprüht und gewischt. Alle betroffenen Flächen müssen vollständig feucht sein. Das Präparat gemäß angegebener Einwirkzeiten einwirken lassen. Nur zur Anwendung auf alkoholverträglichen Materialien (für Acrylglas z.B. nicht geeignet). Zum Tränken von mit der Lösung kompatiblen Tüchern.

Einwirkzeiten: Bakterien nach EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 16615, VAH (hohe Belastung): Konz. 1 min.; Candida albicans nach EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 16615, VAH (hohe Belastung): Konz. 1 min.; TbB (Tuberkulose)-Erreger (M. terrae) und Mycobakterien (M. avium) nach EN 14348 (hohe Belastung): Konz. 1 min.; „Begrenzt viruzid“ (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV gemäß EN 14476, hohe Belastung): Konz. 1 min.; „Begrenzt viruzid Plus“ (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV) und Noro-, Adeno- und Rota- Viren nach EN 14476 (niedrige Belastung): Konz. 1 min.; Polyoma SV 40 (RKI/ DVV mit Belastung): Konz. 1min.

Sicherheitshinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Entzündlich! Nicht in offene Flamme sprühen! Flammpunkt nach DIN 51755: ca. 30°C. Ausbringung max. 50ml pro m². Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100ml je m² Raumgrundfläche betragen. Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 99 entsorgen. VO 648/2004/EG: Enthält Duftstoffe.

PZN 17380426

UFI: WW0U-0X2W-W109-C3GY

BAuA Reg-Nr. N-82353

HMV-Nr.: 54.99.02.0002

Art. Nr. 11500



PRISMAN GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-18
64653 Lorsch
Tel.: +49 (0) 6251 866980-0



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE
Amsterdam, Netherlands



ACHTUNG

2021-06

Vertreiber: UEBE Medical GmbH
Bürgermeister-Kuhn-Straße 22
97900 Kulsheim, Deutschland

MD Medizin-
produkt

UEBE
Germany est. 1890