

## **ALLEVYN GENT BO 7.5X7.5**

### **ALLEVYN Gentle Border 7,5x7,5 cm Schaumverb.**

PZN: 17830852

Inhalt: 5 St

Hersteller: Acti Medi GmbH

### **Zweckbestimmung**

Beschreibung ALLEVYN Gentle Border ist dreilagig aufgebaut - eine Kombination aus einem absorbierenden hydrozellulären Schaumstoffkern, eingeschlossen zwischen einer perforierten Wundkontaktschicht mit einem haftenden Silikongel und einer hoch atmungsaktiven und wasserdichten Außenschicht. Die Außenfolie hilft, das Durchdringen von Wasser und Keimen zu verhindern. Anwendungsgebiete Sekundäre Wundheilung bei oberflächlichen, granulierenden Wunden. Chronische und akute exsudierende Wunden, tiefe und oberflächliche Wunden wie Dekubitalulzera, Unterschenkelulzera, Ulzera bei diabetischem Fuß, infizierte Wunden, maligne Wunden, Operationswunden, Verbrennungen ersten und zweiten Grades, Transplantationswunden, Hautrisse, exulzerierende Läsionen. Bei nekrotischen oder schorfigen Wunden kann ALLEVYN Gentle Border zusammen mit INTRASITE Gel eingesetzt werden. ALLEVYN Gentle Border ist für die Wundversorgung bei empfindlicher Haut geeignet. Vorsichtsmaßnahmen ALLEVYN Gentle Border Wundverbände dürfen nicht mit oxidierenden Substanzen wie Hypochloritlösungen (z. B. EUSOL) oder Wasserstoffperoxid genutzt werden, da diese die absorbierende Polyurethankomponente des Verbands zersetzen können. Anwendung abbrechen, wenn Rötungen oder Sensibilisierungen auftreten. ALLEVYN Gentle Border Heel darf nicht unabhängig von druckentlastenden Medizinprodukten zur Druckentlastung verwendet werden. ALLEVYN Gentle Border ist ein Einmalprodukt. Wenn es bei mehr als einem Patienten angewandt wird, kann dies zu Kreuzkontamination oder Infektionen führen. Das Öffnen der Verpackung beschädigt die sterile Barriere. Alle unbenutzten Verbände sind zu verwerfen.

### **Zusammensetzung**

Haftender hydrozellulärer Schaumverband mit Silikon-Beschichtung