

ALLEVYN GENTTLE 5X5 CM

ALLEVYN Gentle 5x5 cm Schaumverband

PZN: 17830941

Inhalt: 5 St

Hersteller: Acti Medi GmbH

Zweckbestimmung

Beschreibung Der Wundverband ALLEVYN Gentle ist dreilagig aufgebaut - eine Kombination aus einem absorbierenden hydrozellulären Schaumstoffkern, eingeschlossen zwischen einer perforierten, weichen, Gel-Wundkontaktschicht und einer hoch atmungsaktiven und wasserdichten Außenschicht.

Anwendungsgebiete Behandlung von flachen granulierenden Wunden. Chronische und akute exsudierende Wunden, tiefe und oberflächliche Wunden wie Dekubitalulzera, Unterschenkelulzera, Ulzera bei diabetischem Fuß, infizierte Wunden, maligne Wunden, OP-Wunden, Verbrennungen ersten und zweiten Grades, Transplantationswunden, Hautrisse, exulzerierende Läsionen. Kann bei nekrotischen oder schorfigen Wunden zusammen mit INTRASITE Gel eingesetzt werden. ALLEVYN Gentle ist für die Wundversorgung bei empfindlicher Haut geeignet. Vorsichtsmaßnahmen ALLEVYN Gentle Wundverbände dürfen nicht mit oxidierenden Substanzen wie Hypochloritlösungen (z. B. EUSOL) oder Wasserstoffperoxid genutzt werden, da diese die absorbierende Polyurethankomponente des Verbands zersetzen können. Bei Einsatz im Rahmen der Kompressionsbehandlung könnte ALLEVYN Gentle aus seiner Position geraten, wenn es bei der betroffenen Gliedmaße zu einem schnellen Abklingen des Ödems kommt. Anwendung abbrechen, wenn Rötungen oder Sensibilisierungen auftreten.

Zusammensetzung

Sanft haftender hydrozellulärer Schaumverband mit Gel-Beschichtung