

Domotherm® Medizinische Gesichtsmasken

Typ IIR
Größe: 17,5 cm x 9,5 cm
EN 14683:2019+AC:2019



Medizinische Gesichtsmaske

Schützen Sie Ihre Gesundheit und die Ihrer Familie

- Bakterielle Filtrationseffizienz (BFE) ≥ 98 %
- Medizinisch einwandfreie Materialien mit Sicherheitsgarantie
- Formbarer Nasenbügel
- Elastische Ohrschlaufen – Hoher Tragekomfort
- Nicht steril
- Für Erwachsene

Anwendungsbereich:

Medizinische Gesichtsmaske, die Mund und Nase abdeckt und eine Barriere bildet zur Minimierung der direkten Übertragung von pathogenen Mikroorganismen, Körperflüssigkeiten, Partikeln, etc.

Material und Zusammensetzung:


Vliesstoffe (70 %), Schmelzgeblasener Vliesstoff (30 %), elastische Ohrbänder

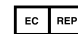
Hinweise

Personen, die es nicht gewohnt sind, eine Maske zu tragen und folgende Personen, die das Gefühl haben zu ersticken, sollten die Maske nicht über einen längeren Zeitraum tragen:

- 1) Personen mit Herz- oder Atemproblemen (z. B. Asthma, Emphysem).
- 2) Schwangere Frauen.
- 3) Personen mit Schwindel, Atemnot oder empfindliche Haut nach dem Tragen.
- 4) Kinder unter 3 Jahren.

PZN 17924406
HMV-Nr.: 54.99.01.2001
Art. Nr. 11360

 Sichuan Ai Doctor Medical Technology Co., Ltd. 333 Yongke Road, Yongsheng town, Wenjiang District, Chengdu City, Sichuan Province, China

 Sungo Europe B.V.
Olympisch Stadion 24,
1076DE Amsterdam, Netherlands



50 Stück



Einfache Anwendung:

1. Halten Sie die Maske mit der Farbschicht nach außen und dem Nasenstück nach oben. Ziehen Sie die Gummibänder hinter die Ohren.
2. Nasenbügel um den Nasenrücken biegen.
3. Fächern Sie die Maske nach unten auf, so dass Nase und Mund vollständig bedeckt sind und die Unterkante unter dem Kinn sitzt.

Vertreiber: UEBE Medical GmbH
Bürgermeister-Kuhn-Straße 22
97900 Kilsheim, Deutschland




Germany est. 1890

2022-01