

# FORMADES

## SCHNELLEDESINFEKTION



schnelle Wirksamkeit

begrenzt viruzid PLUS



## PLUS PURE

### Alkoholische Schnelldesinfektion

#### Anwendung

Zur Wischdesinfektion ein geeignetes Tuch mit der Desinfektionslösung sehr gut benetzen und die Flächen abwischen, bzw. die Lösung direkt auf die Fläche geben und danach wischen. Alle zu desinfizierenden Flächen müssen vollständig feucht und benetzt sein. Das Präparat gemäß angegebener Einwirkzeiten einwirken lassen. Auch zum Tränken von kompatiblen und mit der Wischdesinfektion geprüften Tücherrollen geeignet. Es ist in diesem Anwendungsfall die geforderte Tränkmenge des jeweiligen Tuchmaterials zu beachten. Sehr gute Materialverträglichkeit auch gegenüber sonst alkoholunverträglichen Materialien.

- schnelle Wirksamkeit gegen Bakterien, behüllte und unbehüllte Viren
- gebrauchsfertige Lösung
- aldehydfrei
- auf allen alkoholbeständigen Oberflächen anzuwenden
- Medizinprodukt (D,CH)
- HACCP- konform

#### Einsatzbereich

Gemäß MPG (D, CH): Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten im medizinischen Bereich.

Gemäß Biozid-Verordnung (D): Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion zur Desinfektion von kleineren Flächen.

Geeignet für den medizinischen Bereich ((zahn)ärztliche Praxen, Kliniken, Altenheime, Pflege- und Rettungsdienste) und die Bereiche Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid	konz. 1 Min.	EN 13697, EN 16615 hohe Belastung, VAH*
Tuberkulozid (M. terrae) und Mycobakterien (M. avium)	konz. 1 Min.	EN 14348 hohe Belastung, VAH*
Begrenzt viruzid (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV)	konz. 1 Min.	EN 14476 hohe Belastung
Begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV) und Noro-, Adeno- und Rota-Viren	konz. 1 Min.	EN 14476 niedrige Belastung
Polyoma SV 40, RKI/DV	konz. 1 Min.	DVV/RKI-Leitlinie

\*in der VAH in der 5 Min. Spalte gelistet.

#### Wirkstoffe

100 g enthalten: 20,0 g 1-Propanol; 5,0 g 2-Propanol

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

**Kennzeichnung** gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP):  
Gefahr; GHS02, GHS07

#### Hinweise

FORMADES PLUS PURE soll nicht auf alkoholempfindlichen Flächen wie Acryl- und Flexiglas angewendet werden.

Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett

Gebinde	Inhalt	VE	Art.Nr.	PZN
Keulenflasche	1 Liter	8 (inkl. 2 Sprühköpfe)	65773	17999568
Kanister	5 Liter	1	65771	16928974
Euroflasche	1 Liter	6	65770	16928968

BAuA-Reg. Nr. N-82462



Stand 08/2023

Alle Angaben unserer Produktdatenblätter entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Weitere Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Vertrieb durch:

**D:** unizell Medicare GmbH  
Pohnsdorfer Str. 3  
DE-23611 Bad Schwartau  
Telefon: 0451 - 39 89 00  
Telefax: 0451 - 39 39 93  
E-mail: info@unizell.de



**PRISMAN GmbH**  
Otto-Hahn-Ring 6-18  
DE-64653 Lorsch  
Tel.: +49 (0) 6251 866980-0

**CH:** Praximedico AG  
Bleichelstraße 22  
CH-9055 Bühler AR



**PRISMAN Pharma International AG**  
Am Stalden 16 ·  
CH-4622 Egerkingen