

schülke -+



Feuchttuchspender für den Einsatz von schülke Flächendesinfektionsmitteln in Krankenhäusern, Altenheimen, Rettungsdiensten und Arztpraxen.

schülke wipes

Unser Plus

- umfassend einsetzbar
- einfache Handhabung
- 40, 70, 100 oder 111 wipes pro Rolle

Anwendungsgebiet

Feuchttuchspender zum eigenständigen Befüllen von schülke Flächendesinfektionsmitteln. schülke wipes können zur Flächendesinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten sowie Flächen eingesetzt werden.

Folgende Größen sind erhältlich:

- schülke wipes 40 (30 x 30 cm)
- schülke wipes 70 (28 x 23 cm)
- schülke wipes 100 (30 x 30 cm)
- schülke wipes 111 (30 x 24 cm)

Anwendungshinweise

Befüllung unter hygienischen Bedingungen

Zunächst die Hände desinfizieren, frische Schutzhandschuhe und Kittel anziehen. Bitte während des Befüllungsvorgangs darauf achten, dass die Handschuhe nicht durch andere Tätigkeiten kontaminiert werden. Danach den Deckel des Feuchttuchspenders öffnen und die entpackte Vliesrolle einsetzen. Ziehen Sie das innerste Tuch ein kleines Stück aus der Mitte heraus. Anschließend 2 Liter bei gebrauchsfertigem Produkt und 3 Liter bei Gebrauchslösung aus einem Konzentrat langsam spiralförmig über die Vliesrolle geben. (schülke wipes 40/70 1,5 Liter.) Nun das innerste Tuch der Rolle in die sternförmige Entnahmeöffnung des Deckels einziehen und verwerfen. Jetzt den Verschluss auf den Spender setzen und verschließen bis er einrastet. Ebenfalls die Schutzkappe des Entnahmesystems sorgfältig verschließen. Die Tücher sind nach

30 Minuten Wartezeit vollständig durchtränkt. In der Zwischenzeit, wie auch bei jeder Nachbefüllung, den Präparatenamen, die gewählte Einsatzkonzentration, die Einwirkzeit und das Befülldatum auf dem Etikett, welches jeder Vliestuchrolle beiliegt, dokumentieren und auf das vorgesehene Feld kleben. Verwenden Sie hierzu nur die von schülke empfohlenen Präparate. Die Angaben des Herstellers der verwendeten Desinfektionspräparate zu Einwirkzeiten, Einsatzkonzentrationen, Hinweise zum Wirkspektrum und Anwendungshinweise sind zu beachten. Sichtbare Verunreinigungen vor der Desinfektion entfernen. Oberfläche gründlich mit getränktem Vliestuch abwischen. Auf vollständige Benetzung achten. Nach Tuchentnahme die Deckelöffnung wieder fest verschließen, um ein Austrocknen der Tücher zu vermeiden. Ausgetrocknete Tücher nicht mehr verwenden. Die wiederaufbereitbaren Tuchspender sind nicht geeignet für den Einsatz in Risikobereichen. Hier empfehlen wir die schülke wipes safe & easy bag-in-box / schülke wipes safe & easy bagless. Darüber hinaus sollte auch das eingesetzte Desinfektionsmittelpreparat auf seine Eignung hin für Risikobereiche geprüft werden.

Reinigung und Desinfektion

Bitte beim Wischen mit den getränkten Tüchern auf eine vollständige Benetzung der Flächen und nach jeder Tuchentnahme auf ein sorgfältiges Verschließen der Entnahmeöffnung, um einer Austrocknung der Tücher vorzubeugen, achten. Ausschließlich für die Verwendung von Fachkräften bestimmt. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden. Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten!

Wiederbefüllung unter hygienischen Bedingungen

Vor der Wiederbefüllung ist der Spender zu reinigen und zu desinfizieren. Bei allen schülke Produkten beträgt die Standzeit



schülke wipes

28 Tage, ausgenommen: terralin® PAA*. Weitere Informationen können Sie unserem Beipackzettel entnehmen.

Zertifikate / Normen



Besondere Hinweise

Das Verfallsdatum für alle schülke Produkte liegt bei 28 Tagen, außer von terralin® PAA mit 12 Stunden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	GTIN	PZN	Art.-Nr.
schülke wipes 40 ST RO	10 / Karton(e)	4032651983575	18050441	70003344
schülke wipes 70 ST RO	6 / Karton(e)	4032651983599	18050429	70003345
schülke wipes 100 ST RO	6 / Karton(e)	4032651983612	18050412	70003346
schülke wipes 111 ST RO	6 / Karton(e)	4032651983636	18050435	70003347
schülke wipes 130 ST RO	6 / Karton(e)	4032651983650	18050470	70003348
schülke wipes Feuchttuchsp. 1 ST EM	5 / Karton(e)	4032651981892	18050518	70003212
schülke wipes mini Feuchttuchsp. 1 ST EM	5 / Karton(e)	4032651981878	18050524	70003211

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.



Für individuelle Fragen:

Application Department

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com

*terralin® PAA kann nur in Kombination mit den schülke wipes 40 und 3 l Gebrauchslösung angewendet werden. Die Standzeit beträgt 12 Stunden.

Anwendungshilfen

Artikel	Art.-Nr.
Wandhalterung VA schülke wipes	134430

Verwandte Produkte

- **antifect® N liquid**
- **buraton® rapid**
- **mikrozid® AF liquid**
- **mikrozid® sensitive liquid**
- **perform® advanced alcohol EP**
- **perform® classic alcohol EP**
- **perform® classic concentrate Q-Plus**
- **schülke wipes safe&easy®**
- **terralin® PAA**
- **terralin® liquid**
- **terralin® protect**

schülke +

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt |
Deutschland
Tel. +49 40 52100582
www.schuelke.com
info@schuelke.com

schülke Österreich
Schülke & Mayr GmbH
(Austria)
Seidengasse 9
1071 Wien | Österreich
Tel. 43-1-5232501-0
www.schuelke.com
office.austria@schuelke.com

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22 22
8500 Frauenfeld | Schweiz
Tel. +41 44 466 55 44
www.schuelke.com
mail.ch@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.