

## **MEPILEX BORDER SAC 22X25**

### **MEPILEX Border Sacrum Schaumverb.22x25 cm steril**

PZN: 18070254

Inhalt: 10 St

Hersteller: EurimPharm Arzneimittel GmbH

#### **Zweckbestimmung**

Mepilex Border ist für die Behandlung einer Vielzahl von exsudierenden Wunden geeignet, darunter Bein-, Fuß- oder Druckgeschwüre und traumatischen Wunden wie Hautrisse oder chirurgische Wunden. Außerdem eignet sich Mepilex Border bei trockenen/nekrotischen Wunden auch für den Gebrauch in Kombination mit Gelen. Mepilex Border kann als Teil einer prophylaktischen Therapie zur Prävention von Hautschäden, z. B. Druckgeschwüren, postoperative Blasenbildung, verwendet werden.

#### **Zusammensetzung**

Mepilex Border besteht aus: 1. einer Safetac Wundkontaktschicht 2. einem flexiblen, aus drei Schichten bestehenden Absorptionspad: Polyurethanschaum, eine weiterleitende Vliesschicht und eine Schicht aus hochabsorbierenden Polyacrylatfasern 3. einem wasserdampfdurchlässigen und wasserfesten äußeren Film Safetac ist eine patentierte Silikon-Hafttechnologie, die den Schmerz für die Patienten reduziert und die Traumatisierung der Wunde und der wundumgebenden Haut minimiert. Mepilex Border ist ein flexibler, selbstklebender Verband, der Exsudat absorbiert, ein feuchtes Wundmilieu aufrecht erhält und das Mazerationsrisiko minimiert. Da Mepilex Border das feuchte Wundmilieu aufrecht erhält, kann bei einem unterstützenden Débridement die Wunde zunächst größer werden. Das ist normal und muss erwartet werden.