

SPYCRA MAX A XS

SPYCRA Max A SAP steril adhesive 7,5x7,5 cm XS

PZN: 18179011

Inhalt: 10 St

Hersteller: L+F Medizinprodukte GmbH

Zweckbestimmung

SPYCRA Max A ist eine sterile, sanft haftende, superabsorbierende Wundauflage zur Verwendung bei mäßig bis stark exsudierenden Wunden. SPYCRA MaxA ist indiziert für die Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden Wunden, einschließlich Beingschwüren, Druckgeschwüren, diabetischen Fußgeschwüren und Wunddehiszenzen nach chirurgischen Eingriffen. Der mehrschichtige Aufbau erleichtert das Flüssigkeitsmanagement und sorgt für ein optimales, feuchtes Wundmilieu, welches zu einer schnelleren Wundheilung führt. Das saugfähige Kissen sorgt für eine hervorragende Absorption und schließt Exsudate ein, wodurch das Risiko einer Mazeration und einer Schädigung der Haut in der Wundumgebung minimiert wird. Spycra Max A trägt dazu bei, ein optimales Wundheilungsmilieu zu schaffen, indem es die Wundexsudatmenge reguliert und die Wunde vor Austrocknung sowie externer Bakterien- und Virenbesiedlung schützt. Indikationen: Spycra Max A ist für ein breites Spektrum an exsudierenden Wunden indiziert. Hierzu zählen traumatische Wunden (z. B. Schürfwunden, Risswunden, kleine Schnittwunden, kleine Verbrühungen und Verbrennungen), Beinulzera, nicht infizierte diabetische Fußulzera und Druckgeschwüre. Exsudatmenge: Spycra MAX A kann bei geringer, mittlerer oder großer Exsudatmenge verwendet werden. Bei stärker exsudierenden Wunden sollten die Verbandwechsel entsprechend häufiger erfolgen. Spycra MAX A kann unter Kompressionsverbänden angewendet werden. Spycra MAX A sollte nur unter Kontrolle von medizinischem Fachpersonal angewendet werden. Kontraindikationen: SPYCRA Max A nicht auf trockenen oder schwach exsudierenden Wunden, Augen, Schleimhäuten oder in Wundhöhlen verwenden, da der Verband während der Absorption anschwillt. Nicht bei Verbrennungen dritten Grades anwenden. SPYCRA Max A sollte nicht bei Personen mit einer bekannten Allergie oder Überempfindlichkeit gegenüber dem Verband oder seinen Bestandteilen verwendet werden.

Zusammensetzung

10 x sterile, sanft haftende, superabsorbierende Wundauflage, bestehend aus einer atmungsaktiven und wasserdichten Vliesstoffschicht, einem superabsorbierenden Polster, einer feuchtigkeitstransportierender Gewebeschicht und einem weichen Wundkontaktlayer aus Silikon.