

Gebrauchsanweisung für den Cannabis-Schnelltest auf THC

Bitte lesen Sie die Informationen dieser Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie den Test durchführen.

Verwendungszweck

Der THC-Schnellteststreifen ist ein Schnelltest zum qualitativen Nachweis von THC aus Cannabisprodukten oder Medikamenten im menschlichen Urin. Der Grenzwert zur Nachweisbarkeit liegt bei 50 ng/ml.
Der Test liefert ein vorläufiges Ergebnis.

Welche Substanz wird nachgewiesen, wie hoch ist der Grenzwert und die ungefähre Zeit der Nachweisbarkeit?

Auf welche Substanz wird mit diesem Schnelltest getestet?	Wie hoch ist der Grenzwert zur Nachweisbarkeit von THC ?	Ab wann lässt sich THC nach dem Konsum nachweisen?	Wie lange lässt sich THC im Urin nach dem Konsum nachweisen?
THC (Cannabis)	50 ng THC/ml Urin	Ca. 2 Stunden nach dem Konsum	Bis zu 5 Tage. Bei regelmäßigem Konsum auch länger

Probenentnahme und -vorbereitung

Der Zeitpunkt der Entnahme der Urinprobe ist für die Nachweisbarkeit von THC nach Cannabiskonsum relevant. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Welche Substanz wird nachgewiesen, wie hoch ist der Grenzwert und die ungefähre Zeit der Nachweisbarkeit?“

Beachten Sie die Hinweise in dieser Anleitung, um den Zeitraum der Nachweisbarkeit einschätzen zu können, in welchem der Grenzwert für THC überschritten wird.

Der Test kann zu jeder Tageszeit angewendet werden.

Urinprobe

Sammeln Sie die Urinprobe mit einem sauberen, trockenen Behälter.

Hinweis: Dieser Test kann ausschließlich für Urinproben verwendet werden.


Wie führt man den Test durch?

Der Test muss bei Raumtemperatur (15–30 °C) durchgeführt werden.

1. Öffnen Sie den versiegelten Beutel, indem Sie ihn entlang der Perforation aufreißen. Nehmen Sie den Teststreifen aus dem Beutel.
2. Tauchen Sie den Streifen in angezeigter Pfeilrichtung in den Urin ein. Nehmen Sie den Streifen nach 10 Sekunden heraus.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass der Teststreifen nur bis zur Markierungslinie (gekennzeichnet durch MAX) in den Urin getaucht wird, da der Test sonst nicht ordnungsgemäß funktioniert.

3. Legen Sie den Teststreifen auf eine saubere, trockene und nicht saugende Oberfläche.
4. Lesen Sie die Ergebnisse nach 5 Minuten ab. Die Ergebnisse des THC-Schnelltests bleiben bis zu dreißig Minuten stabil.

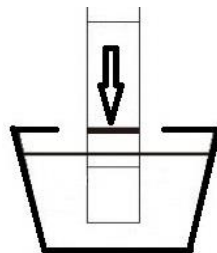

Nur bis zur Markierungslinie eintauchen.

Beurteilung der Ergebnisse

Negativ (-) (Kein Nachweis von THC im Urin)

Im Kontrollbereich und im Testbereich ist je ein rosafarbener Streifen sichtbar. Dies weist darauf hin, dass kein THC im Urin vorhanden ist oder nur so gering, dass es mit diesem Test nicht nachgewiesen werden kann.

Vorläufig positiv (+)


Im Kontrollbereich ist ein rosafarbener Streifen sichtbar. Im Testbereich erscheint jedoch kein rosafarbener Streifen. Dies deutet auf ein positives Ergebnis für THC im Urin hin. Bei einem positiven Ergebnis kann auf einen Zusammenhang zu einem möglichen Cannabis-Konsum geschlossen werden. Es handelt sich um ein vorläufig positives Ergebnis.

Um ein gezieltes quantitatives Ergebnis zu erhalten, können weitere Untersuchungen durch spezialisierte Labore angeschlossen werden.

Ungültig

Wenn im Kontrollbereich kein rosafarbener Streifen sichtbar ist und/oder nur im Testbereich ein rosafarbener Streifen sichtbar ist, gilt der Test als ungültig. Sie sollten den Test mit einem neuen Teststreifen wiederholen. Wenn der Test weiterhin ein ungültiges Ergebnis anzeigt, kontaktieren Sie uns bitte und geben die Chargennummer des Tests an.

Hinweis: Die Intensität oder Breite der rosafarbenen Streifen lässt keine Interpretation zu. Jeder sichtbare rosafarbener Streifen wird als ein gültiger Streifen betrachtet.

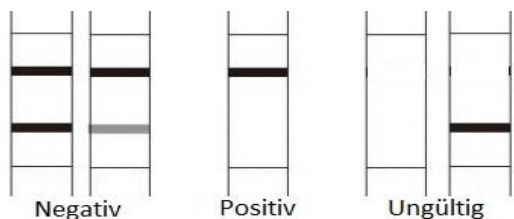

Bestimmte Farbstreifen können heller oder dünner erscheinen als andere Farbstreifen.

Jedem rosafarbenen Streifen im „T“-Bereich des Tests, egal wie dunkel oder schwach, sollte als negatives Ergebnis interpretiert werden, solange die rosafarbene Kontrolllinie ebenfalls vorhanden ist.

Wichtig:

Der Teststreifen liefert nur ein vorläufiges Testergebnis. Alle „vorläufig positiven“ Ergebnisse sollten für ein genaueres Ergebnis durch ein spezialisiertes Labor verifiziert werden.

Dieser Test dient ausschließlich als Selbsttest. Das Ergebnis darf nicht als rechtliche Handlungsgrundlage gegenüber staatlichen Behörden herangezogen werden.

Lieferumfang

- 10 Teststreifenbeutel.
- Jeder Beutel enthält einen Teststreifen und ein Trockenmittel. Das Trockenmittel wird nur zur Lagerung verwendet.
- Diese Gebrauchsanweisung.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

- Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.
- Der Teststreifen sollte bis zur Verwendung im versiegelten Beutel bleiben.

Lagerung und Stabilität

- Bei 4–30 °C (39–86 °F) im versiegelten Beutel bis zum Verfallsdatum lagern.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Hitze schützen.
- Nicht einfrieren.

Testeinschränkungen

1. Kontaminierte Urinproben können zu falschen Ergebnissen führen.
2. Ein positives Ergebnis sagt nichts über die Quantität des THCs im Urin aus.
3. Negative Ergebnisse können erzielt werden, wenn das THC im Urin den Grenzwert von 50ng/ml dieses Tests unterschritten wird.

Hergestellt bei:
Co-Innovation Biotech Co. Ltd
No. 9 Baihe 3 Street, Economic & Tech Development
East Zone, Guangzhou 510530, Guangdong P.R. China

Hergestellt für:
Cohex Biotech GmbH
Fergersbergstr. 6
27721 Ritterhude, Deutschland