

AUGEN TRÖSTER MDO®

**Erfrischende Befeuchtung und Linderung gereizter Augen
Mit Hydrolaten von Kamille, Zaubernuss und Augentrost**

Artelac® AUGENTRÖSTER MDO® ist eine sterile Kochsalzlösung für die Augen mit physiologischem pH-Wert.

Die aus Natriumchlorid und Wasser für Injektionszwecke bestehende Kochsalzlösung lindert die Beschwerden bei trockenen und gereizten Augen.

Die Formulierung enthält zusätzlich destilliertes Hydrolat von Kamille, Zaubernuss und Augentrost, um für eine befeuchtende Wirkung zu sorgen.

Sie enthält keine Konservierungsmittel und/oder Moleküle mit entzündungshemmenden und gefäßverengenden Wirkungen.

Artelac® AUGENTRÖSTER MDO® ist geeignet für Kontaktlinsenträger.

VERWENDUNGSZWECK

Artelac® AUGENTRÖSTER MDO® wird für seine erfrischende und lindernde Wirkung angewendet.

Artelac® AUGENTRÖSTER MDO® ist angezeigt zur Linderung der Beschwerden bei trockenen und gereizten Augen verursacht durch:

- Luft- und Umweltfaktoren (Klimaanlage, übermäßige Sonnenstrahlung, Wind, Rauch, Verschmutzung, Salz, Meerwasser, Schwimmbadwasser)
- starke Ermüdung aufgrund langer Bildschirmarbeit oder beim Lernen
- leichtes Syndrom des Trockenen Auges
- vielstündige tägliche Anwendung von Kontaktlinsen.

ANWENDUNG

- Vor der Anwendung gründlich die Hände waschen und abtrocknen.

- Vor der ersten Anwendung die Sicherheitsversiegelung abreißen.
- Schutzkappe entfernen und Flasche öffnen.
- Flasche auf den Kopf drehen und leicht auf die Flasche drücken, um 1 bis 2 Tropfen in jedes Auge zu geben.
- Nach jedem Tropfen ein paar Sekunden warten, ohne auf die Flasche zu drücken. Dadurch kann wieder ausreichend Luft in das sterile Luftfiltersystem gelangen, anderenfalls wird die Abgabe der Tropfen erschwert.
- Beim allmählichen Leeren der Flasche kann es erforderlich sein, stärker auf die Flasche zu drücken, um das Produkt abgeben zu können. Dies ist durch die Eigenschaften des Verschlusssystems bedingt, mit dem die Sterilität und die chemischen und physikalischen Merkmale konservierungsmittelfreier Lösungen erhalten bleiben. In der Flasche bleibt außerdem stets eine geringe Menge Lösung zurück.
- Nach der Anwendung den letzten Tropfen von der Spitze abschütteln.
- Nach der Anwendung die Flasche sofort wieder mit der Kappe verschließen.
- Die Schutzkappe nicht wieder aufsetzen, solange das Behältnis noch zusammenge-drückt ist.
- Kontakt der Spitze des Behältnisses mit anderen Oberflächen einschließlich Augen oder Finger vermeiden.
- Der Inhalt ist innerhalb von 3 Monaten nach Anbruch zu verbrauchen.
- Das Produkt ist für die häufige Anwendung geeignet. Sofern von Ihrem Arzt nicht anders empfohlen, kann das Produkt auch mehrmals täglich (3- bis 4-Mal oder bei Bedarf häufiger) angewendet werden.

ZUSAMMENSETZUNG

Natriumchlorid (0,85 %), destilliertes Hydrolat von Kamille, destilliertes Hydrolat von Zaubernuss, destilliertes Hydrolat von Augentrost, Natriumdihydrogenphosphat, Dinatriumhydrogenphosphat, Wasser für Injektionszwecke.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Wenn die klare Schicht vorne an Ihrem Auge (die Hornhaut) stark geschädigt ist, können Phosphate in sehr seltenen Fällen trübe Flecken auf der Hornhaut verursachen, da sich während der Behandlung Calcium ansammelt.
- Das Produkt ist nur zur Anwendung an den Augen bestimmt.
- Das Produkt ist zur Anwendung an einem einzelnen Patienten bestimmt.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn das Behältnis bei Anbruch beschädigt oder nicht korrekt verschlossen ist.
- Nicht verwenden, wenn sichtbare Schwebstoffe und/oder farbliche Veränderungen der Lösung vorliegen.
- Während der Anwendung nicht mit dem Tropfer des Behältnisses das Auge oder eine andere Oberfläche berühren.
- Das Produkt nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfalldatums nicht verwenden.
- Bei Auftreten von Nebenwirkungen während der Anwendung die Behandlung abbrechen und einen Arzt aufsuchen.
- Das Produkt bei bekannter Unverträglichkeit eines der Bestandteile der Lösung und/oder von Pflanzen aus der Familie der Asteraceae und/oder Compositae und/oder Hamamelidaceae und/oder Orobanchaceae nicht verwenden.
- Das Produkt entsprechend den örtlichen Abfallbestimmungen entsorgen.

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Wenn Sie schwanger sind oder stillen, fragen Sie Ihren Arzt um Rat, bevor Sie dieses Produkt anwenden.
- Nur zur äußerlichen Anwendung, nicht schlucken.
- Düse nicht von der Flasche abtrennen oder auseinandernehmen.
- Schwere Vorkommnisse in Verbindung mit dem Produkt müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats gemeldet werden, in dem Sie wohnhaft sind.

NEBENWIRKUNGEN

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

VERPACKUNG

Eine Flasche zu 10 ml steriler Lösung ohne Konservierungsmittel.

AUFBEWAHRUNGSBEDINGUNGEN

Zwischen 2 °C und 25 °C trocken und vor Wärme und direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren.

Der Inhalt muss innerhalb von 3 Monaten nach Anbruch verwendet werden.

HALTBARKEIT

Siehe das Verfalldatum, das auf der Schachtel und dem Behältnis angegeben ist.

®/™ sind eingetragene Warenzeichen von Bausch & Lomb Incorporated oder ihrer verbundenen Unternehmen

© 2024 Bausch & Lomb Incorporated oder ihrer verbundenen Unternehmen

Letzte Überarbeitung: 03.02 von 02/2024
020362