

Schulterwärmer mit Angorawolle, Med-Kl. 1

Sehr gut geeignet für eine hohe Wärmeentwicklung

Anwendungsbereiche:

Arthrose
Gelenk- und Muskelschmerzen
Bei Wintersportaktivitäten
Typische Pathologien älterer Menschen

Produktbeschreibung:

Er haftet perfekt und passt sich am Körper an.
Er spendet sofortigen Komfort und Wohlbefinden
Hergestellt aus Angorakaninchenfell, extrem weich und dünn. Die hohle Innenseite der Wolle hat eine hohe Fähigkeit, Wärme zu speichern.
Extrem fein und mit abgerundeter Spitze, brennt nicht und verursacht nicht den lästigen Effekt, der als „Wollallergie“ bezeichnet wird.
Er bietet Wärmewirkung.
Er ermöglicht die Bewegungsfreiheit beizubehalten.
Er rollt nicht auf und fällt nicht herunter.

Hinweise:

Nicht in Kontakt mit geschädigter Haut bringen.
Nicht in direktem Kontakt mit Cremes und Salben verwenden.
Verändern Sie nicht die Form. Die korrekte Funktionsweise ist ansonsten nicht garantiert.
Die zur Herstellung des Artikels verwendeten Materialien, schließen in den meisten uns bekannten Fällen das Auftreten von Nebenwirkungen aus.
Für die ordnungsgemäße Verwendung, kontaktieren Sie bitte das medizinische Personal und / oder Apotheke / Sanitätshaus für die Wahl des Modells, richtige Größe, Art und Zeitpunkt der Nutzung.

Pflege:

Handwäsche bei 30 ° mit neutraler Seife oder Reinigungsmitteln - Spülen - Nicht auswringen, sondern mit einem Handtuch abtupfen - Leicht bügeln - nicht bleichen - nicht chemisch reinigen - horizontal abwischen.

Material:

Angora-Wolle/Viscose: 23%
Polyamid: 67%
Elastan: 10%

Techn. Angaben:

Ausf.	Artikel-Nr.	Menge	Größe	Schulterbreite	Höhe	Farbe	EAN	PZN
	71278	1 St.	S	34 – 36 cm	32 cm	beige / haut	4017685712780	19502833
	71279	1 St.	M	37 – 39 cm	32 cm	beige / haut	4017685712799	19502856
	71280	1 St.	L	40 – 42 cm	32 cm	beige / haut	4017685712803	19502862
	71281	1 St.	XL	43 – 45 cm	32 cm	beige / haut	4017685712810	19502879

Hergestellt: EU

Vertrieb: **Groß GmbH** Im- und Export, med.-techn. Handelsvertretung, Talstr. 35, D-72658 Bempflingen

Fon + Fax: +49-(0)7127-35425, eMail: grossgmbh@methmed.de, www.methmed.com