



ManukaSan Patches

Wundauflagen für Tiere

Nicht klebende Netzwundauflage aus Viskose mit Manuka Honig und Manuka Öl



- schmerzfreie Anwendung, da nicht haftend
- kann bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben und reduziert den Bedarf an Verbandswechseln
- fördert das Wachstum neuer Zellen und die Wundheilung
- schützt und erleichtert den Abfluss von Exsudat
- schafft feuchtes Milieu zur optimalen Regeneration
- reduziert unangenehmen Wundgeruch
- reguliert die Entstehung von Biofilmen
- vermindert Narbenbildung

Kann bis zu
7 Tage auf
der Wunde
verbleiben



ManukaSan Patches sind nicht-adhärenente Wundauflagen, die Manuka Honig und Manuka Öl enthalten. Sie wurden entwickelt, um den Heilungsprozess von schwer heilenden und chronischen Wunden zu unterstützen und eignen sich für die Anwendung bei allen Arten von Wunden. Dank ihrer osmotischen Eigenschaften fördern die Auflagen das autolytische Debridement und tragen so zur Reinigung und Regeneration des Wundbetts bei. Sie sind insbesondere für den Einsatz auf gering bis mäßig exsudierenden Wunden vorgesehen und ermöglichen den Durchtritt von Exsudat durch die Gaze, ohne die Wunde zu beeinträchtigen.

Die Wundauflagen bieten einen umfassenden Schutz und fördern durch den hygroskopischen Effekt ein feuchtes Heilungsmilieu und eine schnelle Regeneration.

Geeignet für folgende Wundarten:

- granulierend
- epithelisierend
- exulzierend
- infiziert

Inhaltsstoffe:

Viskosenetz, beschichtet mit *Leptospermum scoparium* honey und *Leptospermum scoparium* honey oil

Anwendung:

Entfernen Sie den transparenten Schutzfilm von beiden Seiten der Auflage. Legen Sie die Auflage mit beliebiger Seite direkt auf die Wunde. Bei Bedarf kann die Auflage zugeschnitten werden. Bedecken Sie sie, je nach Wundbett und Exsudatmenge, mit einem sekundären Verband. Je nach Exsudatmenge, umliegender Gewebefeuchtigkeit und Verbandstyp, kann die Auflage bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben. Die Wirksamkeit nimmt ab, wenn die Honigschicht durch Wundexsudat verdünnt wird. Um eine kontinuierlich effektive Honigschicht sicherzustellen, sollte die Auflage gewechselt werden, sobald eine deutliche Verfärbung auftritt. Das Entfernen der Auflage kann erleichtert werden, indem das Wundbett zuvor mit einer Kochsalzlösung befeuchtet wird.

Bei allen Wunden anwendbar, wie beispielsweise:

- Oberflächliche Wunden wie Schnitt- und Schürfwunden
- Bisswunden
- Geschwüre
- Verbrennungen
- Chirurgische Wunden
- Infizierte Wunden

Hinweise:

Die Wundauflage ist ausschließlich für den Einmalgebrauch vorgesehen. Eine Wiederverwendung erhöht das Risiko einer Infektion und ist daher unbedingt zu vermeiden. Das Öffnen der Verpackung gefährdet die Sterilität der Wundauflage. Alle geöffneten, unbenutzten Wundauflagen sind umgehend zu entsorgen.

Bei Zimmertemperatur, trocken und lichtgeschützt lagern.

Haltbarkeit: 36 Monate

Handelsform:

10 Wundauflagen (10 cm x 10 cm)