

**DEUTSCH**

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Medizinproduktes beginnen.**

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf, vielleicht möchten Sie diese später noch einmal lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Therapeuten, Apotheker oder direkt an die FROXIMUN AG als Hersteller.
- Dieses Medizinprodukt ist rezeptfrei und frei verkäuflich.

## 1. Was ist TOXAPREVENT® SKIN Suspension und wofür wird es angewendet?

TOXAPREVENT® SKIN Suspension ist ein natürliches Medizinprodukt zur Unterstützung der Wundheilung auf der Haut- und Wundoberfläche durch die lokale Bindung von Wundexsudat und Histamin.

### Insbesondere bei:

- Hautreizung, geschlossene Hautirritationen und Wunden
- unspezifischem Juckreiz sowie Rötungen der Haut
- Insektenstichen (Kein Ersatz für ein Antiallergikum!)
- unspezifischen Hautproblemen mit nicht durchtrennter Dermis

## 2. Was ist bei der Anwendung von TOXAPREVENT® SKIN Suspension zu beachten!

- **Kein Ersatz für ein Antiallergikum!**
- Die Suspension darf nur zu dem in der Gebrauchsinformation bestimmten Zweck angewendet werden.
- Die Suspension nicht auf offene Wunden auftragen.
- Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie einen unüblichen Effekt bemerken. Konsultieren Sie ggf. einen Arzt oder Apotheker.
- Die Suspension darf nicht in die Augen oder in andere Körperöffnungen gelangen. Anwendung der Suspension in der Nähe von Körperöffnungen mit besonderer Vorsicht!
- Achten Sie bei der Anwendung im Gesicht darauf, die Folie entsprechend mit Aussparungen für Augen, Nase und Mund vorzubereiten.
- Warten Sie nach der Anwendung von arzneimittelwirksamen Cremes, Salben etc. mind. 60 Minuten, bevor Sie die Suspension anwenden. Konsultieren Sie im Zweifel Ihren Arzt oder Apotheker zur Anwendung des Medizinproduktes mit Medikamenten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der gebrauchten Suspension sowie der Wunde.
- Öffnen Sie die Tube der Suspension erst unmittelbar vor dem Gebrauch. Verschließen Sie die Tube fest nach Entnahme der gewünschten Menge.
- Die Suspension ist nach der Entnahme aus der Tube ausschließlich für den einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Folie und Suspension können nach der Anwendung über den Hausmüll entsorgt werden.

## 3. Wie ist TOXAPREVENT® SKIN Suspension anzuwenden?

Für eine ordnungsgemäße Anwendung kann die Unterstützung durch eine weitere Person erforderlich sein, insbesondere dann, wenn Sie selbst motorisch eingeschränkt sind oder die Suspension an Stellen anwenden, die nur schwer zugänglich sind.

Soweit nicht ärztlich anders verordnet:

- Die Suspension in einer ca. 2 mm dünnen Schicht auf die betroffene Hautstelle auftragen und mit einem passenden Stück der beigelegten Folie abdecken.
- Verwenden Sie ausschließlich die beigelegte Folie zur Abdeckung der Suspension. Andere Folien können Weichmacher enthalten, welche zu Hautirritationen und Gesundheitsschäden führen können.
- Die Anwendungszeit sollte mindestens 30 Minuten betragen.
- Bei sichtbarer Abtrocknung ist die Suspension zu entfernen.
- Entfernen Sie die Suspension und Folie nach der Anwendung, in dem Sie die behandelte Stelle mit sauberem, klarem Wasser reinigen.
- Die Anwendung kann mehrmals täglich durchgeführt werden. Wiederholen Sie die Anwendung erst, nachdem Sie die behandelte Stelle gereinigt haben.
- Soweit nicht anders verordnet, bei wiederholter Anwendung nach 14 Tagen eine Anwendungspause von 5 Tagen einhalten.

## 4. Meldungen von Nebenwirkungen

Falls Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt, Therapeuten oder Apotheker. Bitte melden Sie diese auch der FROXIMUN AG unter den nachfolgenden Kontaktdaten:

Hersteller und Meldestelle: FROXIMUN AG, Neue Straße 2a,  
D - 38838 Schlanstedt  
Telefon: +49 (0) 39401 632-0  
Telefax: +49 (0) 39401 632-199  
E-Mail: [anwender@froximun.de](mailto:anwender@froximun.de)  
Verantwortliche Person (PRRC): +49 (0) 39401 632-320

## 5. Wie ist TOXAPREVENT® SKIN Suspension aufzubewahren?

- außer Reichweite von Kindern aufbewahren
- trocken und zwischen 5°C - 30°C lagern
- vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- verwendbar bis: siehe Prägung/Aufdruck Faltschachtel/Tubenfalz
- Produkt nach Anbruch der Tube innerhalb von zwei Wochen aufbrauchen

## 6. Weitere Informationen

### Inhaltsstoffe:

Klinoptilolith (MANC®), kolloidales Wasser

### Information zum MANC®:

- 100 % natürlich

**DEUTSCH**

- Bei MANC® handelt es sich um ein modifiziertes Alumosilikat.
- kosher, halal: Wir bestätigen hiermit, dass MANC® Produkt in einem Prozess aus mineralischen Rohstoffen hergestellt wird. Das Produkt enthält keine tierischen Bestandteile, Blut oder dessen Nebenprodukte sowie Alkohol.

**7. Herstellerinformation**

FROXIMUN AG, Neue Str. 2a, D - 38838 Schlanstedt  
Telefon: +49 39401 632-0, Telefax: +49 39401 632-199  
eMail: info@froximun.de

*Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet: 2025-04-29*