

Prothesenpolster Sof-Grip 3 g

PZN 19859558 | Art. 1443

Dr. Denti Sof-Grip ist eine gebrauchsfertige, weiche Acrylharz-Lösung zur Fixierung und Polsterung von Prothesen. Es stabilisiert lockere Prothesen, füllt Hohlräume und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.



Dr. Denti Sof-Grip ist eine weiche, gebrauchsfertige Acrylharz-Lösung, die speziell zur Fixierung und Polsterung von Zahnprothesen entwickelt wurde. Sie bietet eine effektive Lösung bei schmerzhaften neuen Prothesen, lockeren Sitzproblemen oder Schrumpfung des Zahnfleisches.

Anwendungsbereiche:

- Polsterung schmerzender Prothesen
- Fixierung lockerer Prothesen
- Auffüllen lokaler Hohlräume
- Stabilisierung nach Zahnfleischrückgang

Anwendung:

Prothese gründlich reinigen und trocknen.

Die Sof-Grip-Spritze 2 Minuten in heißem Wasser erwärmen.

Harz gleichmäßig auf die Innenseite der Prothese auftragen.

Mit feuchten Fingern verteilen.

Prothese einsetzen, 5-mal seitlich bewegen und anschließend 2 Minuten sanft zubeißen.

Überschüssiges Harz mit feuchten Fingern entfernen und Mund ausspülen.

Hinweise:

- Die Prothese mindestens 8 Wochen durchgehend tragen.
- Die ersten 3 Stunden nach der Anwendung nicht essen.
- Nach 5–6 Wochen kann das Material entfernt und bei Bedarf erneuert werden.
- Bei anhaltenden Problemen einen Zahnarzt konsultieren.

Dr. Denti Sof-Grip – für einen stabilen und komfortablen Sitz Ihrer Prothese!

Merkmale, Marke, Eigenschaften und Inhaltsstoffe

Blisterkarte mit Faltschachtel

Produktinformationen

Abmessungen: 12,00 x 9,00 x 2,50 cm

Artikelgewicht: 0,030 kg

Gewicht mit Verpackung 0,03 kg

Inhalt/Menge: 3 g

UVP: 12,99 € inkl. MwSt

Megadent

Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39
40211 Düsseldorf
www.megadent.de

info@megadent.de
Tel +49 211 17754 0
Fax +49 211 17754 20

