

Aligner und Retainer Reinigungsschaum 50 ml

PZN 19859618 | Art. 1445

FreshAlign Reinigungsschaum reinigt und erfrischt Aligner, Retainer, Mundschutz und herausnehmbare Zahnapparate gründlich – ohne Bleichmittel und ohne fettige Rückstände.



FreshAlign Reinigungsschaum ist die ideale Lösung für eine hygienische Pflege von Alignern, Retainern, Mundschutz und anderen herausnehmbaren Zahnapparaten. Der blaue, antiseptische Schaum entfernt zuverlässig Gerüche, Ablagerungen und Verfärbungen, die durch tägliche Nahrungsaufnahme entstehen – ganz ohne Bleichmittel.

- Für Aligner, Retainer & Mundschutz geeignet
- Entfernt Verfärbungen & Speisereste gründlich
- Antiseptische Formel für hygienische Frische
- Kein fettiger Rückstand – angenehmes Tragegefühl

Anwendung:

1. Den Schaum gleichmäßig auf die Innenseite des Aligners oder Retainers auftragen.
2. Mindestens 60 Sekunden einwirken lassen.
3. Mit einer weichen Zahnbürste sanft bürsten, dann gründlich mit kaltem Wasser abspülen.
4. Ihr Aligner oder Retainer ist nun hygienisch sauber und bereit zum Tragen!

Merkmale, Marke, Eigenschaften und Inhaltsstoffe

Glycerin, Wasser, 50 ml, Minze, Schaumspenderflasche, Propylenglykol, Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA), Natriumlaurylsarcosinat, Benzalkoniumchlorid (BAC), Cocamidopropylbetain

, Diazolidinylharnstoff, Iodopropynylbutylcarbamate, Indigoblau (E132), Pfefferminzöl,

Produktinformationen

Abmessungen: 13,50 x 4,50 x 4,50 cm
Artikelgewicht: 0,080 kg
Gewicht mit Verpackung 0,08 kg
Inhalt/Menge: 50 ml
UVP: 22,50 € inkl. MwSt

Megadent

Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39
40211 Düsseldorf
www.megadent.de

info@megadent.de
Tel +49 211 17754 0
Fax +49 211 17754 20



5 1031966 000327