

## BEFEUCHTENDE, BENETZENDE UND SCHÜTZENDE AUGENTROPFEN

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf, da sie wichtige Informationen über die Verwendung und Sicherheit des Produkts enthält.

### BESCHREIBUNG UND WIRKMECHANISMUS:

VisuECTOINE® ist eine sterile ophthalmische Lösung mit Bestandteilen, die die Augen befeuchten, benetzen und schützen. Diese Dreifachwirkung ist auf die folgenden Wirkstoffe in VisuECTOINE® zurückzuführen:

- **Natriumhyaluronat (Hyaluronsäure)**, ein natürliches Polysaccharid, das die Feuchtigkeit im Auge bindet, den natürlichen Tränenfilm stabilisiert und die Heilung der Hornhaut fördert.
- **Carboxymethylcellulose (CMC)**, ein Cellulosederivat, das durch Bindung an die Epithelzellen der Hornhaut das Produkt auf der Augenoberfläche hält, wodurch langanhaltende Benetzung und Linderung geboten wird.
- **Ectoin**, ein natürliches Molekül mit feuchtigkeitsspendenden und zellschützenden Eigenschaften, bindet Wasser am Auge, verhindert das Austrocknen der Zellen, sorgt für eine angemessene Augenfeuchtigkeit und schützt mit antiallergischen und entzündungshemmenden Eigenschaften vor eindringenden Allergenen.

Die einzigartige Formel von VisuECTOINE® weist eine hohe Verträglichkeit auf, da sie keine Konservierungsstoffe oder Phosphate enthält. Aufgrund des Boratpuffers hat es einen gepufferten pH-Wert, der die Phosphatfällung hemmt und mit Kontaktlinsen kompatibel ist.

### ZUSAMMENSETZUNG

Ectoin 2% (m/m), Natriumhyaluronat 0,1% (m/m), Natriumcarboxymethylcellulose (CMC) 0,15% (m/m), Boratpuffer (Borsäure, Natriumtetraborat-Decahydrat) und gereinigtes Wasser.

### VERPACKUNGSMENGE

VisuECTOINE® wird in Mehrdosisfläschchen mit OSD-Technologie (Ophthalmic Squeeze Dispenser) geliefert, die frei von Konservierungsstoffen sind und 10 ml steriles Produkt enthalten.

### ZWECK UND VORGESEHENE BENUTZER

VisuECTOINE® ist für die Verwendung durch Verbraucher (Patienten) bestimmt, um Trockenheit und Reizungen der Augen zu lindern.

### INDIKATIONEN

VisuECTOINE® ist angezeigt zur Linderung von Augentrockenheit und -reizung, verursacht durch Umweltfaktoren (Wind, Staub, Rauch, Klimaanlage, trockene Hitze), längeren Gebrauch von Bildschirmen oder Kontaktlinsen und/oder bestimmte Augenleiden, die diese Symptome hervorrufen.

### EIGENSCHAFTEN

VisuECTOINE® bietet symptomatische und langanhaltende Linderung bei Augentrockenheit und dem Gefühl trockener Augen. VisuECTOINE® lindert Augenreizungen. VisuECTOINE® ist mit der Verwendung von Kontaktlinsen kompatibel.

### VERABREICHUNG UND DOSIERUNG

VisuECTOINE® ist zur ophthalmischen Anwendung bestimmt und wird auf der Augenoberfläche angewandt. Die empfohlene Dosis besteht darin, zweimal täglich ein oder zwei Tropfen in jedes betroffene Auge oder nach Anweisung eines Spezialisten einzutropfen. Die maximale Dauer der kontinuierlichen Anwendung bei jedem Schub beträgt zwei Wochen. Es kann darüber hinaus während der gesamten Haltbarkeitsdauer des Produktes mehrfach verwendet werden.

### NUTZUNGSHINWEISE

Entfernen Sie den Sicherheitsring vor der ersten Anwendung. Aufgrund des Filtersystems des Behälters kann es einige Zeit dauern, bis der erste Tropfen austritt.

1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich vor der Anwendung und kontrollieren Sie, dass das Fläschchen nicht beschädigt ist.
2. Entfernen Sie die Kappe, um das Mehrdosisbehältnis zu öffnen.
3. Neigen Sie Ihren Kopf nach hinten und schauen Sie nach oben.
4. Ziehen Sie das untere Augenlid vorsichtig nach unten, um eine kleine Tasche zwischen dem Augenlid und dem Auge zu bilden.
5. Halten Sie das Fläschchen mit der anderen Hand zwischen Daumen und Mittelfinger und drücken Sie es vorsichtig zusammen, um ein oder zwei Tropfen in die Bindehautsack zu geben.
6. Blinzeln Sie mehrmals, um eine gleichmäßige Verteilung der Tropfen auf der Augenoberfläche zu erreichen.
7. Wenn der Tropfen nicht ins Auge gelangt ist, wiederholen Sie den Vorgang.
8. Entfernen Sie vorsichtig jegliches Produkt um das Augenlid mit Gaze.
9. Wiederholen Sie das Verfahren am anderen Auge.
10. Drehen Sie das Fläschchen nach der Anwendung nach unten und schütteln Sie es, bevor Sie die Kappe schließen, um etwaige Produkt-

rückstände aus dem Spender zu entfernen. Verschließen Sie das Mehrdosisbehältnis ordnungsgemäß, sobald es wieder in seine übliche Form zurückgekehrt ist.

### GEGENANZEIGEN

Verabreichen Sie VisuECTOINE® nicht bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Hyaluronsäure und/oder andere Produktbestandteile.

### WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Die Lösung muss sofort nach dem Öffnen verwendet werden.
- Für Personen, die eine eingeschränkte Mobilität ihrer Hände haben bzw. bei älteren Menschen wird empfohlen, Hilfe einer weiteren Person anzunehmen, um eine ordnungsgemäße Anwendung zu gewährleisten.
- Verschwommenes Sehen kann unmittelbar nach der Anwendung der Tropfen auftreten. Warten Sie, bis sich das Sehvermögen geklärt hat, bevor Sie Aktivitäten ausführen, die aufgrund verschwommener Sicht Risiken bergen könnten.
- Nicht verwenden, wenn der sterile Behälter beschädigt ist, anderen als den angegebenen Umweltbedingungen ausgesetzt wurde oder vor der Verwendung unbeabsichtigt geöffnet wurde.
- Die Pipette sollte nicht mit dem Auge oder einer anderen Oberfläche in Berührung kommen. Geben Sie das Produkt nicht an andere weiter.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum. Das Produkt darf nach dem Öffnen maximal 12 Monate verwendet werden.
- Dieses Produkt enthält eine sichere Menge an Borsäure, wenn es gemäß diesen Anweisungen verwendet wird.
- Nicht wiederverwenden oder resterilisieren.
- Außerhalb der Reichweite und Sichtweite von Kindern aufbewahren. Konsultieren Sie vor der Anwendung des Produkts während der Schwangerschaft oder Stillzeit einen Arzt, Apotheker oder Optiker.
- Vorsicht bei der Anwendung bei Kindern unter 4 Jahren (das Produkt wurde in dieser Altersgruppe nicht untersucht).
- Nur zur äußerlichen Anwendung; nicht schlucken.

### WECHSELWIRKUNGEN

Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, die quartäre Ammoniumsalze wie Benzalkoniumchlorid enthalten, da Natriumhyaluronat in deren Gegenwart ausfallen kann. Nach der Anwendung von VisuECTOINE® mindestens 15 Minuten warten, bevor ein anderes Produkt oder Medikament am Auge angewandt wird. VisuECTOINE® ist mit Kontaktlinsen kompatibel. Es wird empfohlen, etwa 30 Minuten zu warten, nachdem die Kontaktlinsen eingesetzt wurden, bevor die Tropfen angewendet werden, um Unverträglichkeitsreaktionen zwischen den für die Kontaktlinsenpflege verwendeten Produkten und VisuECTOINE® zu vermeiden.

### NEBENWIRKUNGEN

VisuECTOINE® wird gut vertragen. In einigen Fällen kann es zu vorübergehenden Augenschmerzen oder -reizungen, Hyperämie oder Rötung der Augen, leichtem Juckreiz oder Brennen, tränenden Augen, verschwommenem Sehen und/oder einem Fremdkörpergefühl kommen. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts bemerken. Wenn diese Effekte anhalten oder sich verschlimmern, konsultieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Im Falle schwerwiegender Vorkommnisse benachrichtigen Sie bitte die zuständigen Gesundheitsbehörden und den Hersteller.

### LAGERUNG

Unter 25°C lagern. Nicht einfrieren. Bewahren Sie den Behälter vor Licht geschützt in der Originalverpackung auf.

### VERFALLSDATUM

Verwenden Sie das ungeöffnete Produkt nicht nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum, und nach dem Öffnen darf der Behälter maximal 12 Monate verwendet werden.

### HERSTELLER UND PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER

i+Med S. Coop.  
Parque Tecnológico de Álava  
C/Hermanos Elhuyar, 6  
01510 Vitoria-Gasteiz, Álava (Spanien)  
www.imasmed.com

### VERTRIEB DURCH

VISUfarma B.V.  
Joop Geesinkweg 601, 1114 AB, NL  
info@visufarma.com

**VISUfarma**  
the eye health company