

50 Stück

- mit Polsterkissen
- latexfrei
- selbstklebend
- hautfreundlich

steril

zu Kanülenfixierung

Steriler selbstklebender
Verband

Kanülenfixierpflaster IV Vlies

höga

höga

Kanülenfixierpflaster IV Vlies

Gebrauchsanweisung:

Die zu behandelnde Stelle sorgfältig reinigen und trocknen. Das Pflaster aus der Verpackung nehmen und die Schutzfolie entfernen. Pflaster anbringen und einige Sekunden anpressen, um ein einwandfreies Anheften zu erzielen. Steril, wenn Einzelpackungen ungeöffnet und unbeschädigt.


Material:

Vlies: Polyester, Viscose
Kleber: hautfreundlicher Acrylkleber
Saugkissen: Viskose-Acetoffaser Polypropylenfaser

Zweckbestimmung:

Zur Fixierung von Kanülen und Kathetern auf der Haut und als mechanische Barriere zum Schutz der Punktionsstelle

Polsterkissen
2 x 3,5 cm

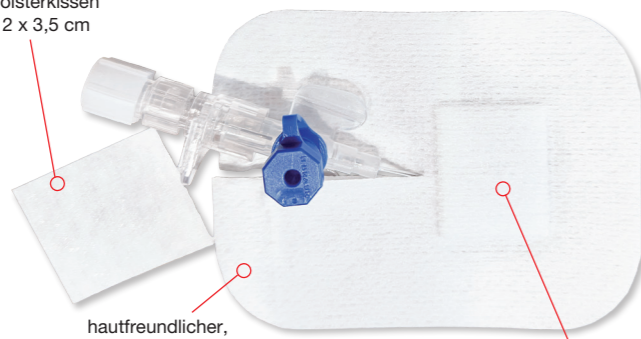

hautfreundlicher,
selbstklebender
Vliesverband

Wundauflage
2,5 x 2 cm



Braunüle im Lieferumfang nicht enthalten.

höga

Kanülenfixierpflaster IV Vlies


Steriler selbstklebender
Verband

zu Kanülenfixierung

steril

- hautfreundlich
- selbstklebend
- latexfrei
- mit Polsterkissen

6 x 8 cm

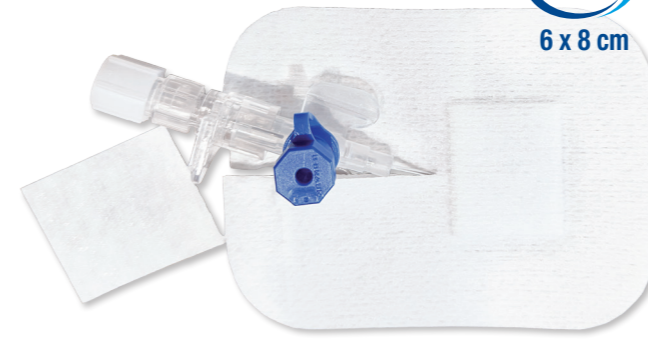

50 Stück



PZN-19891823



HÖGA-PHARM • Gutmaninger Str. 17 • D-93413 Cham

www.hoega.de