

VIZOL S HYDRO LIPID BALANCE

Augentropfen, Emulsion

Gebrauchsanweisung - bitte aufmerksam lesen

Vizol S HYDRO LIPID BALANCE Augentropfen lindern die Symptome eines mittelschweren bis schweren trockenen Auges, das auf eine mangelhafte Lipidschicht des Tränenfilms zurückzuführen ist, was zu einer übermäßigen Verdunstung der wässrigen Schicht und Trockenheit des Auges führt.

ZUSAMMENSETZUNG

Vizol S HYDRO LIPID BALANCE sind sterile Augentropfen, Emulsion, die Natriumhyaluronat 0,15%, Rizinusöl 0,25%, Tocophersolan (Vitamin E TPGS), Glycerin, Polysorbat 80, Macrogolglycerolhydroxystearat, Trometamol, Salzsäure, Dinatriumedetat, Natriumchlorid und gereinigtes Wasser enthält. Rizinusöl, Vitamin E TPGS und Makrogolglycerinhydroxystearat bilden einen Komplex aus langkettigen Triglyceriden (LCT).

**Frei von Konservierungsstoffen.
Phosphatfrei.**

ZWECK

Vizol S HYDRO LIPID BALANCE Augentropfen sind zur Linderung der Symptome eines mittelschweren bis schweren trockenen Auges bestimmt. Sie stellen die Lipidschicht des Tränenfilms wieder her, stabilisieren den Tränenfilm und befeuchten die Augenoberfläche optimal.

Unabhängig davon, ob das trockene Auge durch eine unzureichende wässrige oder eine unzureichende Lipidkomponente der Tränen verursacht wird, verursacht die ausgetrocknete Oberfläche des Auges unangenehme Symptome, die sich mit der Zeit nur verschlimmern, wenn sie nicht angemessen behandelt werden. Augentrockenheit kann sich durch ein Gefühl von Sand oder Fremdkörpern im Auge, Reizung, Brennen, Juckreiz, übermäßiges Tränen und Rötung des Auges äußern.

Augentrockenheit wird mit dem Alterungsprozess, der Einnahme bestimmter Medikamente, hormonellen Veränderungen, der Belastung der Augen (durch das Tragen von Kontaktlinsen), verschiedenen Umwelteinflüssen (trockene Luft, Wind, Klimaanlage) und zahlreichen Risiken des modernen Lebensstils in Verbindung gebracht, wie z.B. dem längeren Betrachten von Bildschirmen (Computer, Mobiltelefone, Fernseher), wenn die Anzahl der Lidschläge pro Minute und damit die optimale Sekretion von Tränen deutlich reduziert wird.

Vizol S HYDRO LIPID BALANCE enthält Nanotröpfchen des **LCT-Komplexes** (bestehend aus Rizinusöl, Vitamin E und Tensiden) **zur Wiederherstellung und zum Schutz der Lipidschicht der Tränen, die eine natürliche Barriere gegen die Feuchtigkeitsverdunstung darstellt.**

Zusätzlich spendet das in Vizol S HYDRO LIPID BALANCE Augentropfen enthaltene Natriumhyaluronat dem **Auge effektiv Feuchtigkeit** und lindert sofort die Symptome von Trockenheit. Geeignet für alle Arten von trockenen Augen.

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Verwenden Sie Vizol S HYDRO LIPID BALANCE nicht:

- bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe des Produkts.

Im Falle einer allergischen Reaktion sollten Sie das Produkt sofort absetzen und einen Arzt aufsuchen.

Andere Warnungen:

- Wenn Sie feststellen, dass die Produktflasche oder der Applikator beschädigt ist, verwenden Sie sie nicht.
- Um eine sichere Verwendung und Hygiene zu gewährleisten, sollte jede Flasche nur von einer Person verwendet werden.
- Es gibt keine bekannten Wechselwirkungen zwischen Vizol S HYDRO LIPID BALANCE Augentropfen und anderen Augentropfen oder Augensalben. Wenn Sie ein anderes Augenprodukt verwenden, fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie Vizol S HYDRO LIPID BALANCE anwenden.

Vizol S HYDRO LIPID BALANCE ist für die Anwendung durch Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt.

Bitte konsultieren Sie vor der Anwendung dieser Augentropfen bei Kindern einen Arzt, um sicherzustellen, dass sie für Ihr Kind geeignet sind.

Hinweis:

Das Produkt kann eine leichte Unschärfe der Sicht verursachen. In diesem Fall wird empfohlen, dass Sie während dieses kurzen Zeitraums kein Auto fahren oder ein Fahrzeug oder eine Maschine bedienen, sondern warten, bis Ihre Sehkraft wieder scharf wird.

PRODUKTSICHERHEIT

Vizol S HYDRO LIPID BALANCE Augentropfen sind **konservierungsmittel-** und **phosphatfrei**, was die Möglichkeit von Reizungen und Schäden an der Augenoberfläche verringert.

Die Tropftechnologie umfasst einen Filter, der die Verwendung des Produkts sicher macht, da er die Kontamination der Augentropfen verhindert und die Sterilität des Inhalts auch 6 Monate nach dem Öffnen bewahrt.

Das Produkt ist im Allgemeinen sehr gut verträglich. Wenn Sie jedoch Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

WIE SIE VIZOL S HYDRO LIPID BALANCE ANWENDEN

Verwenden Sie Vizol S HYDRO LIPID BALANCE immer gemäß dieser Gebrauchsanweisung. Fragen Sie vor der Einnahme Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, geben Sie bei Bedarf mehrmals täglich 1-2 Tropfen in die Augen. Blinzeln Sie mehrmals, um den Tropfen gleichmäßig auf der Augenoberfläche zu verteilen.

Vermeiden Sie den Kontakt der Tropferspitze mit der Oberfläche des Auges oder einer anderen Oberfläche.


Vor der ersten Anwendung ist es notwendig, die Flasche zu aktivieren. Entfernen Sie dazu den Stopfen von der Pumpe, drehen Sie die Flasche auf den Kopf und **drücken Sie den Applikator mehrmals, bis der erste Tropfen erscheint.**

Informationen für Kontaktlinsenträger


Das Produkt ist mit Kontaktlinsen kompatibel.

Gebrauchsanweisung


1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich.
2. Entfernen Sie den Stopfen von der Pumpe (Bild 1).
3. Fassen Sie die Pumpe mit der Hand an, wie in Abbildung 2 gezeigt.
4. Drehen Sie die Flasche auf den Kopf und drücken Sie den Applikator, bis der erste Tropfen erscheint (Abbildung 3).
5. Legen Sie Ihren Kopf zurück und geben Sie vorsichtig 1 Tropfen in das Auge (Abbildung 4).
6. Setzen Sie den Stopfen wieder auf die Pumpe.

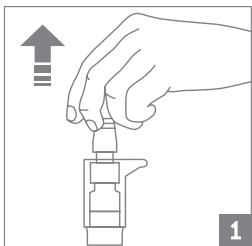


1. Entfernen Sie den Stopfen von der Pumpe.

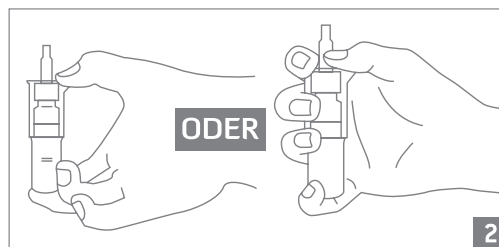

2. Fassen Sie die Pumpe mit der Hand auf eine der in Abbildung 2 gezeigten Arten an.

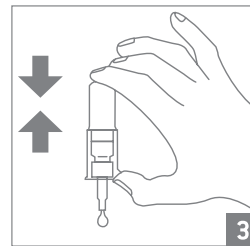

3. Drehen Sie die Flasche auf den Kopf und aktivieren Sie die Pumpe durch Drücken, bis der erste Tropfen erscheint.

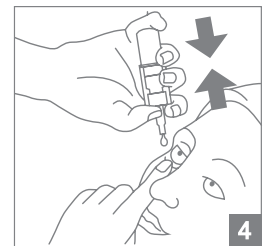

4. Halten Sie die Flasche kopfüber und tröpfeln Sie durch Drücken der Pumpe die vorgeschriebene Anzahl Tropfen in das Auge.

HERSTELLER

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20, 51000 Rijeka, Kroatien

VERFALLSDATUM

Auf der Verpackung aufgedruckt.

Die Frist nach der Eröffnung beträgt 6 Monate.

Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.

LAGERUNG

Bewahren Sie das Produkt unter 30 °C in der Originalverpackung auf.

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

VERPACKUNG












10 ml



REVISIONSDATUM

Juni 2024

Legende zu den Symbolen auf dem Produkt

Symbol	Erläuterung	Symbol	Erläuterung
	Lesen Sie die Gebrauchsanweisung		30 °C Obere Grenze der Temperatur
	Medizinprodukt		Einzelner Patient - Mehrfachnutzung
	Hersteller		Verwenden Sie keine beschädigten oder durchstochenen Produkte
	Verfallsdatum		Vorsicht, lesen Sie die Gebrauchsanweisung (für wichtige Warnungen/Vorsichtsmaßnahmen)
	Chargennummer		CE-Kennzeichnung
	Sterile, aseptische Verarbeitungstechnik		

Zusätzliche Symbole auf der Schachtel:

VIZOL S HYDRO LIPID BALANCE



Feuchtigkeitsspendend und Schutz für mäßig bis stark trockene Augen



Auffüllung und Stabilisierung der Lipid- und der wässrigen Schicht des Tränenfilms



Wiederherstellung der Lipidschicht der Tränen, die eine natürliche Barriere gegen die Feuchtigkeitsverdunstung darstellt



Das Verfallsdatum nach dem Öffnen beträgt 6 Monate