

1

DE: Waschen Sie sich vor dem Anlegen der Maske gründlich die Hände mit Wasser und Seife oder verwenden Sie ein Händedesinfektionsmittel.

E: Wash your hands thoroughly with soap and water or use a hand sanitizer before putting on the mask.

F: Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez un désinfectant pour les mains avant de mettre le masque.

IT: Lavatevi accuratamente le mani con acqua e sapone oppure utilizzate un disinfettante per le mani prima di indossare la mascherina.

2

DE: Entfalten Sie die Maske, berühren Sie dabei nur die Gummibänder.

E: Unfold the mask, touching only the rubber bands.

F: Dépliez le masque en ne touchant que les élastiques.

IT: Svolgere la maschera, toccando solo gli elastici.

3

DE: Platzieren Sie die Maske sorgfältig über Nase, Mund und Kinn. Achten Sie darauf, dass die Maske möglichst dicht anliegt.

E: Place the mask carefully over your nose, mouth and chin. Make sure that the mask fits as tightly as possible.

F: Placez soigneusement le masque sur le nez, la bouche et le menton. Veillez à ce que le masque soit le plus près possible du visage.

IT: Posizionare con cura la maschera su naso, bocca e mento. Assicurarsi che la maschera aderisca il più possibile.

4

DE: Legen Sie die Gummibänder hinter die Ohren.

E: Place the elastic bands behind the ears.

F: Placez les élastiques derrière vos oreilles.

IT: Posizionare gli elastici dietro le orecchie.

5

DE: Drücken Sie den Nasenbügel sanft an Ihre Nasenform an, um einen guten Sitz und eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Überprüfen Sie anschließend, ob die Maske gut anliegt.

E: Gently press the nose clip to fit the shape of your nose to ensure a good seal. Then check that the mask fits properly.

F: Pincez doucement la barrette nasale pour l'adapter à la forme de votre nez et assurer une étanchéité optimale. Vérifiez ensuite que le masque est bien ajusté.

IT: Premere delicatamente la clip nasale per adattarla alla forma del naso e garantire una tenuta ottimale. Controllare poi che la mascherina aderisca bene.