

1x 10 x 10 cm
Pad 5 x 5 cm • steril

ambipad
moderne Wundversorgung

Border

Schaumstoff-Wundauflage mit Haftrand

Beschreibung: Die Schaumstoff-Wundauflage besteht aus zwei Schichten: 1.: Medizinischem, aufgeschäumtem Polyurethan. Die poröse Struktur verhilft ihr zu sehr guter Saugfähigkeit. Exsudate werden absorbiert und es wird ein feuchtes Milieu an der Wundoberfläche aufrecht erhalten. Die Bildung von Granulationsgewebe und die Epithelisierung werden so begünstigt. 2.: Polyurethanfolie: Die PU-Folie ist wasserdicht und wasserdampfdurchlässig. Die Polyurethanfolie ist selbstklebend durch einen hautverträglichen und sehr gut haftenden Kleber auf Hydrokolloidbasis. Die Schaumstoff-Wundauflage ist weich und elastisch und verringert den Druck auf die Wunde.

Indikationen: Die Schaumstoff-Wundauflage kann auf einer Vielzahl von exsudierenden Wunden angewendet werden, einschließlich Dekubiti, Hautulzera, operativ versorgte Wunden und Verbrennungen 2. Grades.

Kontraindikationen: Allergische Reaktionen auf Be-

standteile der Schaumstoff-Wundauflage.

Gebrauchsanweisung: Stellen Sie sicher, dass die Wunde gereinigt ist, Schorf und nekrotisches Gewebe entfernen. Die Schaumstoff-Wundauflage sollte etwa 1 cm über die Wunde hinaus gehen. Nehmen Sie Ambipad border aus der sterilen Verpackung, entfernen Sie die Schutzfolien vom Verband und legen Sie die Wundauflage mit der weißen Seite auf die Wunde. Anschließend drücken Sie die Kleberänder sanft auf die Haut.

Wechselhäufigkeit: Das Intervall der Verbandwechsel hängt vom Grad der Exsudation ab. Die Schaumstoff-Wundauflage kann bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben.

Lagerung: Temperatur: -10 bis 40 °C. Luftfeuchtigkeit: <80 %. Keine korrosiven Gase, dunkel.

| | | | |
|--|--|---|--|
|  <p>1. Wunde gründlich reinigen</p> |  <p>2. Wundauflage steril entnehmen</p> |  <p>3. Weiße Seite auf Wunde legen</p> |  <p>4. Kleberand sanft andrücken</p> |
|--|--|---|--|

CE 0123        

UDI-DI (PPN) 112010676914

L0T

8

STERILE R

 **Zhejiang Longterm Medical Technology Co., Ltd.**

Lotus Global Co., Ltd.

Koningin Julianaplein 10 • 1e Verd
2595AA The Hague • THE NETHERLANDS

Stand08/2025

Das Produkt nicht wiederverwenden! Das Produkt nicht erneut sterilisieren! Die Schaumstoff- Wundauflage mit Haftrand wurde durch Bestrahlung sterilisiert. Wenn die Verpackung beschädigt ist, das Produkt nicht verwenden oder erneut sterilisieren.

Vertrieb: StB-Medizinprodukte GmbH • In'n Lütten Busch 1 • 21423 Winsen Luhe • www.ambipad.care