



WENN TROCKENE AUGEN FEUCHTIGKEIT BRAUCHEN

BAUSCH + LOMB

Artelac[™] Complete MDO[®]



Komplettlösung bei trockenen Augen

Artelac[®] Complete MDO[®] ist unsere Komplettlösung zur zielgerichteten Symptomlinderung bei den häufigsten Formen des trockenen Auges.

Als Mittel gegen trockene Augen ist es inspiriert von der Zusammensetzung der natürlichen Tränenflüssigkeit: Bereits ein Tropfen Artelac[®] Complete MDO[®] versorgt alle drei Schichten des Tränenfilms. Dabei stabilisieren die Augentropfen mit Lipiden die äußere Schicht, sodass die Verdunstung der Tränenflüssigkeit gemindert wird. Der natürliche Feuchtigkeitsspender Hyaluronsäure (0,24 %) und Glycerin binden Feuchtigkeit, das Carbomer befeuchtet und bindet zusätzlich Wasser im Tränenfilm.

Durch den besonderen Pumpmechanismus ist Artelac[®] Complete MDO[®] konservierungsmittelfrei und sehr gut verträglich. Ein Schütteln vor der Anwendung ist nicht nötig.

Produkt auf einen Blick

- Unsere 3 in 1 Lösung: bereits mit einem Tropfen rundum gut versorgt
- Ergänzung des Tränenfilms mit Lipiden, Hyaluronsäure und Carbomer
- Sehr gut verträgliche Augentropfen ohne Konservierungsstoffe
- Schüttelfreie Anwendung
- 6 Monate nach Anbruch haltbar

Anwendungsempfehlung


- Unsere Komplettlösung bei tränenden, geröteten trockenen Augen
- Für die häufigsten Formen des trockenen Auges
- Für Dauernutzer

Hauptinhaltsstoffe


- 0,24% Natriumhyaluronat
- Carbomer
- Glycerin
- Eine Lipidkomponente

SO FUNKTIONIERT'S


1. Nehmen Sie vor jeder Anwendung die transparent weiße Schutzkappe von der Spitze der Flasche mit einer drehenden Bewegung ab.

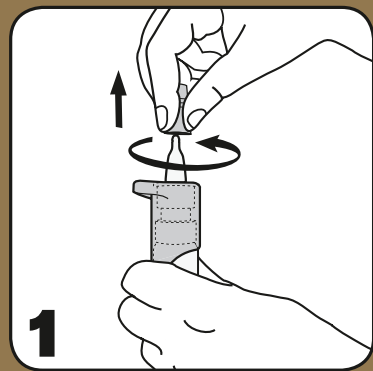

2. Achtung! Vor der ersten Anwendung oder wenn die Flasche einige Zeit lang nicht verwendet wurde: Halten Sie die Flasche mit der Spitze nach unten und **betätigen Sie mehrmals den Pumpmechanismus**, bis ein Tropfen abgegeben wird.

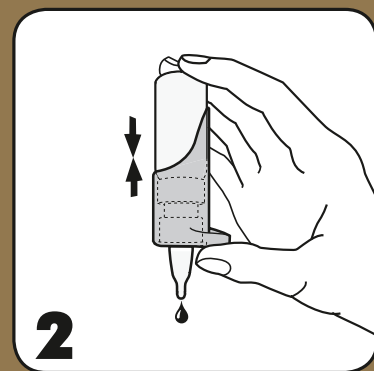

3. Halten Sie die Flasche wie gezeigt: Setzen Sie Ihren Daumen auf die ergonomisch geformte Daumenaufgabe und umschließen Sie den unteren Teil mit Ihren Fingern. Zwei Finger sollten am unteren Teil der Flasche platziert werden.

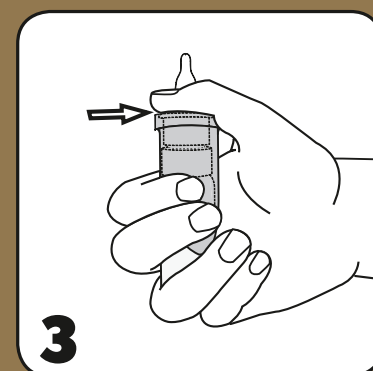

4. Halten Sie die Flasche mit der Spitze nach unten. Neigen Sie den Kopf leicht nach hinten. Ziehen Sie mit einem Finger der freien Hand Ihr unteres Augenlid vorsichtig nach unten. Halten Sie die Flasche senkrecht über Ihre Augen. Drücken Sie den Pumpmechanismus behutsam zusammen, um einen Augentropfen zur Befeuchtung hineinzugeben. Schließen Sie anschließend das Auge und blinzeln Sie, um den Tropfen gut auf der Augenoberfläche zu verteilen.



Kontaktlinsen vor dem Tropfen entnehmen und nach 15 Minuten wieder einsetzen.



ALTER

Mit zunehmendem Alter lässt die Tränenproduktion nach, Frauen in der Menopause können besonders von trockenen geröteten Augen betroffen sein. Artelac[®] Complete MDO[®] befeuchtet und mindert die Verdunstung der Tränenflüssigkeit durch die Stabilisierung aller drei Schichten des Tränenfilms.



TRÄNENDE AUGEN

Trockene Augen können auch mit einem vermehrten Tränenfluss einhergehen. Ursache ist eine gestörte Zusammensetzung des natürlichen Tränenfilms, weshalb die Tränenflüssigkeit über die Lidkante abläuft. Eine Ergänzung der fehlenden Bestandteile verschafft Linderung bei trockenen gereizten Augen.



MEIBOM-DRÜSEN-DYSFUNKTION

Eine der häufigsten Ursachen für trockene Augen ist eine Funktionsstörung der Meibom-Drüsen, die die Lipidkomponente des Tränenfilms produzieren. Dies begünstigt eine vermehrte Verdunstung der wässrigen Anteile des Tränenfilms. Eine zielgerichtete Versorgung des gestörten Tränenfilms ist dann gefragt.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN

Wie hilft Artelac[®] Complete MDO[®]?

Artelac[®] Complete MDO[®] Augentropfen zur Befeuchtung trockener Augen lindern zielgerichtet die Defizite des natürlichen Tränenfilms und die Augenoberfläche ist bereits mit einem Tropfen rundum gut versorgt. Die Augentropfen mit Lipiden schützen den Tränenfilm vor einer vermehrten Verdunstung, der natürliche Feuchtigkeitsspender Hyaluronsäure (0,24 %) und Glycerin binden Feuchtigkeit, das Carbomer befeuchtet und bindet zusätzlich Wasser. Anwender erleben eine umgehende und intensive, langanhaltende Linderung ihrer Symptome.

Wie häufig und wie lange sollte Artelac[®] Complete MDO[®] angewendet werden?

Geben Sie bei Bedarf jeweils einen Tropfen Artelac[®] Complete MDO[®] ins Auge. Sie können die Tropfen täglich und so oft anwenden, wie Sie möchten. Die Anwendungsdauer ist nicht begrenzt.

Wie ist Artelac[®] Complete MDO[®] aufzubewahren?

Lagern Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen +1 und +25 °C. Das Produkt kann dank des Flaschendesigns nach dem ersten Öffnen 6 Monate lang verwendet werden.

